

# Instruktioner rengöring myAirvo

## Daglig rengöring

1. Kör torkningsläget efter användning. Torkningsläge körs automatiskt när man stänger av behandlingen. Programmet tar ca 90 minuter.
2. Avlägsna anslutningen (grimman), skölj den i vatten av dricksvattenkvalitet och anslut den sedan igen till den uppvärmda andningsslangen medan den ännu är i torkningsläge.

3.



Om flergångskammare används

Efter att torkningsläget har slutförts ska vattenkammaren avlägsnas genom att trycka ned fingerskyddet och dra ut kammaren. Kammaren består av två delar, en bas och en kammarkupol. Delarna handdiskas sedan med mildt diskmedel. Skölj noga så allt diskmedel försvinner och låt torka på en plats utan direkt solljus.



Om engångskammare används:

Tvätta inte och ta inte bort denna kammare dagligen.

## Instruktioner för veckorengöring

1. Stäng av apparaten och koppla bort den från eluttaget.
2. Avlägsna den uppvärmda andningsslangen och töm eventuellt överskottskondens. **Slangen får inte blötläggas, tvättas eller steriliseras.**
3. Handdiska grimman med mildt diskmedel. Eller byt ut den om den har använts i 7 dagar.
4. Om **flergångskammare** används rengörs den i diskmaskinen. Ta bort basen från kammarkupolen och placera båda delarna i översta hyllan i diskmaskinen.
5. Kammaren kan missfärgas med tiden pga. mineralavlagring i kranvattnet. För att avlägsna avlagring så blötläggs basen i 1 delar ättika och 2 delar vatten i 10 minuter.
6. torka av apparaten med en lätt fuktad trasa.

7. Om **engångskammare** används kan den tas bort från apparaten vid veckorengöring. Den läggs då försiktigt åt sidan medan man rengör apparaten.

Bytesintervall tillbehör:

**OBS! Leveranstiden för dessa artiklar är ca 7–14 dagar.**

Grimma- Byts 1gång/vecka

Track-anlutning- Byts 1 gång i veckan eller oftare vid behov

Uppvärmd slang- Byts efter 2 månader

Flergångskammare- Bytes efter 2 år

Engångskammare- Byts efter 2 månader

Filter- Byts var 3:e månad