

# RENGÖRING

- Sprita styrenhet och kablar med vanlig desinfektion
- Nebulisatorkammare patientbunden- aldrig mellan patienter
- "Kör igenom" nebulisatorkammaren med 1 ml koksalt efter inhalation med läkemedel. Detta för att de små hålen i den s.k. meshen inte ska täppa till med försämrade prestanda som följd
- Använd nebulisator upp till 28 dagar
- Aerosolbehållare Ultra upp till ca 25 inhalationer skölj med sterilt vatten och låt lufttorka mellan inhalationerna