

## Riktlinjer för rengöring

### **VARNINGAR**

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring av apparaten.


### **Allmänna anmärkningar**

- Följ rengöringsinstruktionerna från sjukhuset/vårdcentralen.
- Använd skyddshandskar för rengöring/disinfektion.
- Kassera vätskor såsom blod och sekret och delar som är kontaminerade enligt sjukhusets/vårdcentralens föreskrifter.

### **Vatten**

Använd endast rent vatten av högsta kvalitet för rengöring. Vattnets hårdhet är en viktig faktor eftersom avlagringar på medicinska produkter förhindrar en effektiv dekontaminering. Använd avjoniserat vatten för att förebygga detta problem.

### **Engångsprodukter**

 Engångsprodukter får inte återanvändas. Återanvändning kan medföra att mekaniska, kemiska och/eller biologiska egenskaper går förlorade. Återanvändning kan orsaka korskontaminering.

### **Demontering**

Lossa alla enstaka delar före rengöring och desinfektion.

### **Rengöring av behållaren och locket**

Rengör delarna i varmt vatten (60–70 °C) med ett rengöringsmedel med ett pH på mellan 6,0 och 8,0 för att undvika skador på instrument och behållare.

1. Blötlägg alla delar noga i varm tvållösning (60–70 °C) eller enzymatiskt rengöringsmedel under 1–5 minuter.
2. Ta bort synlig smuts med ett rengöringsverktyg – vanliga rengöringsborstar som piprensare eller trasor som inte åstadkommer repor. Skölj noga med rent vatten. Låt torka.
3. Kontrollera om det finns synlig smuts på delarna och upprepa stegen ovan vid behov. Alternativt kan behållaren/locket diskas i diskmaskin.

### **Rengöring av pumphuset, elkabel och tillbehör av plast**

Torka med ett rengöringsmedel som rekommenderats av sjukhuset/vårdcentralen. Torka torrt med en ren trasa.