

## NÄR SKA JAG VÄLJA ELRULLSTOL FORTRESS CALYPSO ELLER STERLING ELITE 2 PLUS?

### **Sterling Elite 2 plus**

- Om patienten väger över 90 kg.
- Om brukaren ha väldigt långa ben.
- Om miljön är mer krävande som t.ex. ojämn, backig eller kuperad närmiljö.
- Den allmänna väghållningen är inget som ska påverka val av modell.
- När patienten har smärta och är stötkänslig.

### **Fortress Calypso**

- När behovet är att ta sig fram på små utrymmen som t.ex. affärer.
- När brukarens närmiljö är planerad stadsmiljö med asfalterade gång och cykelbanor eller lantlig miljö som tillåter den mindre modellen.
- När man önska en elrullstol som inte har så hög hastighet.
- Ibland kan körkomforten komma i andra hand pga. Att större modell av elrullstol inte fungerar i brukarens närmiljö (omgivning, hiss, förvaring)

### **Övrig information som kan påverka valet av modell på elrullstol**

- Sterling Elite 2 plus har ett känsligare körreglage och kan pga. detta vara mer svårkörd. Kräver bättre hand/finger motorik.