



Hjälpmiddelsentrum utbildar

Antidecubitusmadrasser

Innehållsförteckning

Kontaktuppgifter/information	1
Antidecubitusmadrasser	2
Hjälpmedelshandboken	2
Fakta om trycksår	3
Handcheck	4
Sortiment.....	5
Bäddmadrass – läggs ovanpå basmadrass	5
Fibermadrass 3-delad	5
Optimal 5zon BM.....	6
Statisk luftmadrass – läggs ovanpå basmadrass	7
CuroCell SAM Pro CF10	7
CuroCell SAM Pro	7
CuroCell SAM.....	7
Roho madrass.....	8
Växlande luftmadrass – läggs ovanpå basmadrass.....	9
CuroCell IQ CX10	9
CuroCell A4 CX10.....	9
CuroCell 3 CX13	10
Växlande luftmadrass – läggs direkt på sängbotten	11
CuroCell A4 CX15.....	11
CuroCell 4 Pro.....	12
Låg basmadrass – läggs direkt på sängbotten.....	13
Distansmadrass	13
Sortimentsöversikt	14

Kontaktuppgifter/information

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent

Eva Scharin

Telefon: 021-17 58 57

E-post: eva.scharin@regionvastmanland.se

Sofie Söderbäck

Telefon: 021-17 68 34

E-post: sofie.soderback@regionvastmanland.se

Omvårdnadsärenden kan skickas till vår gemensamma e-post:

hmc.omvardnad@regionvastmanland.se

Vid brådskande ärenden, ring ovanstående hjälpmedelskonsulenter eller Kundtjänst via telefon 021-17 30 48.

Senaste versionen av förskrivarmaterialet hittar du på Vårdgivarwebben:

<https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/omvardnad/>

Antidecubitusmadrasser

Hjälpmedelshandboken

Utdrag från vårdgivarwebben:

<https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelshandboken/i-hemmet/sangar-sangutrustning-och-madrasser/>

Madrasser och madrasskydd

ISO-kod 04 33 06

Kriterier för förskrivning

Förskrivs för att förebygga eller behandla trycksår.

Madrass i förebyggande syfte: Madrass för att användas i förebyggande syfte bör vara förstahandsval innan eventuellt sår uppkommit (sårkategori 1, 2).

Madrass i behandlande syfte: Behandlande madrass kan förskrivas då trycksår uppstått eller då risken för trycksår är hög (sårkategori 2, 3, 4).

Förskrivning av avancerad antidecubitusmadrass (sårkategori 4) styrs av det medicinska behovet.

Låg basmadrass (distansmadrass) kan förskrivas som tillbehör, om patienten använder sänggrindar, för att minska den totala madrasshöjden.

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska.

Gäller för förskrivning av madrass i förebyggande eller i behandlande syfte.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Fakta om trycksår

Trycksår klassificeras av EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) enligt följande kategorier:

Kategori 1: Hudrodnad som inte bleknar vid tryck

Kategori 2: Delhudsskada, blåsa eller ett ytligt öppet sår

Kategori 3: Fullhudsskada utan sårhåla

Kategori 4: Djup fullhudsskada där ben, sena eller muskel syns

Icke klassificerbart trycksår: Fullhudsskada med okänt sår djup. Sår botten döljs av död vävnad eller sår skorpa.

Misstänkt djup hudskada: Sår djupet går inte att bedöma. Täcks av hel hud som är missfärgad eller av en blodblåsa.

Risikfaktorer

- Oförmåga att röra sig
- Nedsatt allmäntillstånd
- Nyopererad
- Dåligt närings- och vätskeintag
- Mikroklimatet, dvs kombinationen av fukt och värme mellan hud och underlag
- Inkontinens
- Nedsatt känsel
- Nedsatt cirkulation
- Nedsatt medvetandegrad
- Feber, infektion
- Smärttillstånd

Förebygga trycksår

- Bedöm trycksårsrisken
- Bedöm huden
- Minska tryck
- Håll huden torr, mjuk och smidig
- Tillgodose och följ upp närings- och vätskebehov
- Informera patient och närstående
- Informera nästa vårdgivare vid överflyttning

Information

Kombination säng och luftmadrass

Vi rekommenderar enbart förskrivning av luftmadrasser med pump till patienter som har vårdsäng.

I privata sängar som saknar ram, kanter och grindar, är det svårt att förankra en luftmadrass så att den ligger tillräckligt stadigt. Fallolyckor riskerar ske därför att madrassen halkar av sängen, eller att patienten glider av madrassen.

Handcheck

Handcheck rekommenderas för att kontrollera att madrassen är korrekt inställd. Det ska varken vara för lite eller för mycket luft i madrassen. Är det för lite luft riskerar patienten att ligga igenom madrassen, är det för mycket luft kan det bli för hårt och ge tryckmärken på huden.

Handcheck bör, förutom vid installation, även göras regelbundet i samband med omvårdnad, vid positionsändringar eller vid ändring av någon inställning.

Vid handcheck sticks en flat hand in vid madrassens celler i sätesregionen, för att säkerställa att det är några centimeter luft kvar mellan patient och underliggande madrass.

I leverantörens bruksanvisning finns mer detaljerade instruktioner angående installation av madrassen samt hur handcheck på aktuell madrass ska utföras.

Leverantören Care of Sweden har även filmer hur handcheck ska utföras på deras luftmadrasser:
www.careofsweden.se

Sortiment

Bäddmadrass – läggs ovanpå basmadrass



Fibermadrass 3-delad

S-15222 Fibermadrass 3-delad* 90x200cm (Lagervara)

Kategori: Förebyggande

Brukarvikt: Max 95 kg (HMC:s rekommendation max 75 kg)

Leverantör: Comco, www.comco.se

Beskrivning:

Mjuk bäddmadrass med fyllning av silikoniserad polyesterhålfiber. Placeras ovanpå basmadrass.

Speciellt lämplig för magra, lätta patienter.

Asterisk (*) efter Sesam-nr avser försäljningsartikel. Säljs till vårdgivare vid förskrivning. **Madrasen ska därför inte återlämnas till Hjälpmedelscentrum när behovet upphört.**



Optimal 5zon BM

S-34420 Optimal 5zon 90x200x6cm (Lagervara)

S-34673 Optimal 5zon 105x200x6cm (Beställning)

Kategori: Förebyggande

Brukarvikt: Max 130 kg

Leverantör: Care of Sweden, www.careofsweden.se

Beskrivning:

Bäddmadrass av kallskum med hygienöverdrag. Placeras ovanpå basmadrass.

Statisk luftmadrass – läggs ovanpå basmadrass



Curocell SAM

CuroCell SAM Pro CF10

S-45230 SAM Pro CF10 90x200x10cm (Lagervara)

S-45231 SAM Pro CF10 105x200x10cm (Beställning)

CuroCell SAM Pro

S-41842 SAM Pro 90x200x10cm (Utgående)

S-41843 SAM Pro 105x200x10cm (Utgående)

CuroCell SAM

S-37509 SAM 90x200x10 cm (Utgående)

S-37511 SAM 105x200x10 cm (Utgående)

Kategori: Sårkategori 3: Curocell SAM Pro CF10
Sårkategori 3: Curocell SAM Pro
Sårkategori 2: Curocell SAM

Brukarvikt: Curocell SAM Pro CF10 max 250 kg
Curocell SAM Pro max 250 kg
Curocell SAM max 200 kg

Leverantör: Care of Sweden, www.careofsweden.se

Beskrivning:

Statisk luftmadrass med pump. Placeras ovanpå basmadrass.

Curocell SAM Pro CF10 och Curocell SAM Pro har samma pump och madrasskärna, men Curocell SAM Pro CF10 är utrustad med ett mjukt inneröverdrag som standard.

Curocell SAM Pro och Curocell SAM köps inte in längre, men kan förskrivas när de finns i lager. De ersätts vid nyinköp av Curocell SAM Pro CF10.



Roho madrass

S-16589 Madrass-del Roho 86x49x8,5 cm/del (Beställningsvara)

Önskas hel madrass beställs 4 delar

Kategori: Sårkategori 4
Brukarvikt: Obegränsad
Leverantör: Permobil, www.permobil.com

Beskrivning:

Statisk madrass med luftfyllda celler. Placeras ovanpå basmadrass.

Madrassdelarna pumpas upp individuellt med medföljande handpump, knäpps sen ihop med tryckknappar.

Växlande luftmadrass – läggs ovanpå basmadrass



Curocell CX10

CuroCell IQ CX10

S-45222 Curocell IQ CX10 90x200x10 cm (Lagervara)

S-45223 Curocell IQ CX10 105x200x10 cm (Beställningsvara)



CuroCell A4 CX10

S-41840 Curocell A4 CX10 90x200x10 cm (Utgående)

S-41841 Curocell A4 CX10 105x200x10 cm (Utgående)



Kategori: Sårkategori 4

Brukarvikt: Max 200 kg

Leverantör: Care of Sweden, www.careofsweden.se

Beskrivning:

Växeltrycksmadrass med pump. Placeras ovanpå basmadrass.

Curocell IQ CX10 har samma madrasskärna som Curocell A4 CX10, men det är olika pumpar. Pumpen ställer automatiskt in rätt mängd luft efter patientens vikt och rörelser.

Curocell A4 CX10 köps inte in längre, men kan förskrivas när de finns i lager. Den ersätts vid nyinköp av Curocell IQ CX10.



CuroCell 3 CX13

S-34513 Curocell 3 CX13 90x200x13 cm (Utgående)

S-34518 Curocell 3 CX13 105x200x13 cm (Utgående)

Kategori: Sårkategori 3

Brukarvikt: Max 160 kg

Leverantör: Care of Sweden, www.careofsweden.se

Beskrivning:

Växeltrycksmadrass med pump. Placeras ovanpå basmadrass.

Lufttrycket ställs in manuellt efter brukarvikt.

Curocell 3 CX13 köps inte in längre, men kan förskrivas när de finns i lager. Den ersätts vid nyinköp av Curocell IQ CX10.

Växlande luftmadrass – läggs direkt på sängbotten



CuroCell A4 CX15

S-42099 CuroCell A4 CX15 90x200x15cm (Lagervara)

S-42100 CuroCell A4 CX15 105x200x15cm (Beställningsvara)

Kategori: Sårkategori 4

Brukarvikt: Max 220 kg

Leverantör: Care of Sweden, www.careofsweden.se

Beskrivning:

Växeltrycksmadrass med pump.

Ersätter både basmadrass och bäddmadrass. Placeras direkt på sängbotten.

Helautomatisk, ingen inställning av brukarvikt behövs.



CuroCell 4 Pro

S-34659 Curocell 4 Pro 90x200x21cm (Utgående)

S-36995 CuroCell 4 Pro 105x200x21cm (Utgående)

Kategori: Sårkategori 4

Brukarvikt: Max 200 kg

Leverantör: Care of Sweden, www.careofsweden.se

Beskrivning:

Växeltrycksmadrass med pump.

Ersätter både basmadrass och bäddmadrass. Placeras direkt på sängbotten.

Lufttrycket ställs in manuellt efter brukarvikt.

Curocell 4 Pro köps inte in längre, men kan förskrivas när de finns i lager. CuroCell 4 Pro ersätts vid nyinköp av Curocell A4 CX15.

Låg basmadrass – läggs direkt på sängbotten



Distansmadrass

Distansmadrass Solatium

S-45429 Solatium 90x200x6cm (Lagervara)

S-45430 Solatium 105x200x6cm (Beställningsvara)

Distansmadrass Prima 6

S-42012 Prima 6, 90x200x6cm (Utgående)

S-42013 Prima 6, 105x200x6cm (Utgående)

Kategori: Basmadrass

Brukarvikt: Max 130 kg

Leverantör: Care of Sweden, www.careofsweden.se
Comco, comco.se

Beskrivning:

Låg basmadrass. Skumkärna med hygienöverdrag.

Distansmadrasser är avsedda att användas under luftmadrasser och ska ligga direkt på sängbotten. Används för att sänka den totala madrasshöjden, för att säkerställa tillräcklig höjd på vårdsängens grindar.

Obs! Är inte avsedd att användas som bäddmadrass.

Distansmadrass Prima 6 köps inte in längre, men kan förskrivas när de finns i lager. Den ersätts vid nyinköp av distansmadrass Solatium.

Sortimentsöversikt

Sesamnr	Benämning	Kategori	Mått (cm)	Maxvikt (kg)
Bäddmadrasser – läggs ovanpå basmadrass				
15222	Fibermadrass 3-delad	Förebyggande	90x200	95
34420	Optimal 5zon BM	Förebyggande	90x200x6	130
Statisk luftmadrass – läggs ovanpå basmadrass				
45230	CuroCell SAM Pro CF10	Sårkategori 3	90x200x10	250
41842	CuroCell SAM Pro	Sårkategori 3	90x200x10	250
37509	CuroCell SAM	Sårkategori 2	90x200x10	200
16589	Roho madrass	Sårkategori 4	86x49x8,5 *	Ingen maxvikt
Växlande luftmadrass – läggs ovanpå basmadrass				
45222	CuroCell IQ CX10	Sårkategori 4	90x200x10	200
41840	CuroCell A4 CX10	Sårkategori 4	90x200x10	200
34513	CuroCell 3 CX13	Sårkategori 3	90x200x13	160
Växlande luftmadrass – läggs direkt på sängbotten				
42099	CuroCell A4 CX15	Sårkategori 4	90x200x15	220
34659	CuroCell 4 Pro	Sårkategori 4	90x200x21	200
Låg basmadrass – läggs direkt på sängbotten				
45429	Distansmadrass Solatium	Basmadrass	90x200x6	130
42012	Distansmadrass Prima 6	Basmadrass	90x200x6	130

*Måttet avser en madrassdel. Önskas hel madrass beställs fyra delar.