

Hjälpmiddelscentrum utbildar

# Antidecubitusmadrasser



**Kursansvarig hjälpmedelskonsulent**

Eva Scharin

Telefon: 021-17 58 57

E-post: [eva.scharin@regionvastmanland.se](mailto:eva.scharin@regionvastmanland.se)

Våren 2019

# Produktinformation Antidecubitusmadrasser

(Utdrag ur Hjälpmedelshandboken)

## 04 33 Antidecubitushjälpmedel

**04 33 06** Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention

Förskrivare för madrass i förebyggande och behandlande syfte:  
Arbetsterapeut, Sjukgymnast och Sjuksköterska

### Nivå 4.

**Kriterier:** Förskrivs för att förebygga eller behandla trycksår.

#### **Madrass i förebyggande syfte:**

Madrass för att användas i förebyggande syfte bör vara förstahandsval innan eventuellt sår uppkommit. (sårgrad 1, 2)

#### **Madrass i behandlande syfte:**

Madrass i behandlande syfte:  
Behandlande madrass kan förskrivas då trycksår uppstått eller då risken är hög (sårgrad 2, 3, 4)

#### **Utprovning:**

Vid förskrivning av avancerad antidecubitusmadrass (sårgrad 4) krävs bedömning/god motivering till behovet.

Utprovning sker i samråd medhjälpmedelskonsulent.

Kontinuerlig uppföljning ska ske.

## Fakta om trycksår:

Trycksår klassificeras enligt [EPUAP](#) (European Pressure Ulcer Advisory Panel) i en fyragradig skala:

**Kategori I:** kvarstående rodnad, som inte bleknar vid tryck

**Kategori II:** delhudsskada, blåsa eller ett ytligt öppet sår

**Kategori III:** fullhudsskada utan sårhåla

**Kategori IV:** djup fullhudsskada med sårhåla där ben, sena eller muskel syns

## Riskfaktorer:

- Oförmåga att röra sig
- Nedsatt allmäntillstånd
- Nyopererad
- Dåligt näringsintag
- Feber, infektion
- Smärttillstånd

## Förebygga trycksår:

- Bedöm trycksårsrisken
- Bedöm huden
- Minska tryck
- Håll huden torr, mjuk och smidig
- Tillgodose och följ upp närings- och vätskebehov
- Informera patient och närstående
- Informera nästa vårdgivare vid överflyttning

## Fibermadrass Liljenbergs 3-delade

Firma: Care of Sweden



S-nr 15222\*\*

**Kategori:** Förebyggande, speciellt lämplig för magra, lätta brukare.

**Material:** Silikoniserade fibrer.

**Brukarvikt:** 75 kg

**OBS!** Försäljningsvara, personförskrivs ej. **Skall ej återlämnas till HMC.**

## Optimal 5zon BM

Firma: Care of Sweden



S-nr: **34420**

Optimal 5zon är en bäddmadrass, läggs ovanpå befintlig basmadrass.

**Kategori:** Framför allt förebyggande, men även behandlande t o m sårkategori 2.

**Material:** Skumkärna med vätsketätt överdrag.

**Brukarvikt:** 130 kg

Lagervara. Hyresartikel.

Finns även i 105 cm bredd, S-nr 34673 (beställningsvara).

## CuroCell SAM

Firma: Care of Sweden



**S-nr:** 37509 (madrass inkl kompressor)

**Kategori:** Statisk madrass. Behandlande upp t.o.m. sårgrad 2.

**Mått:** 90x200x10 cm

**Brukarvikt:** 200 kg

Lagervara.

S-nr 37511 CuroCell SAM 105 cm bred (beställningsvara).

## SofCare

Firma: Gate Rehab



**Obs!** Ej upphandlad men köps in i särskilda fall. Förskrivs på pappersordination.

SofCare är en **statisk madrass**, dvs växlar inte luft, men kompressorn ser till att rätt luftmängd bibehålls.

**S-nr:** 14902 (inkl kompressor/pump)

**Kategori:** Förebyggande och behandlande madrass för brukare som har konstaterade sår, upp t.o.m. sårgrad 2-3.

**Brukarvikt:** 300 kg

**Material:** Polyurethan/PVC

## CuroCell 3 CX 13

Firma: Care of Sweden



**S-nr:** 34513 (madrass inkl kompressor)

**Kategori:** Växeltrycksmadrass. Behandlande upp t.o.m. sårgrad 3.

**Mått:** 90x200x13

**Brukarvikt:** 160 kg

Lagervara.

Finns även i 105 cm bredd, S-nr 34518 (beställningsvara).



## Madrasser för sårgrad 4

### CuroCell 4 pro

Firma: Care of Sweden



**S-nr:** 34659 (madrass inkl kompressor)

**Kategori:** Växeltrycksmadrass. Behandlande upp t.o.m. sårgrad 4.

**Mått:** 90x200x21 cm

**Brukarvikt:** 200 kg

**OBS!** Läggs **direkt på sängbotten!** Ingen basmadrass under behövs.

## Statisk luftmadrass 4-delad

Firma: Etac



**S-nr:** 16589 Roho (svart) ersätts vid nyinköp av:

**S-nr:** 38109 Star Matt (gul)

**Kategori:** Statisk madrass med luftfyllda celler. Madrassdelarna pumpas upp individuellt, med hjälp av medföljande handpump. Behandlande upp t.o.m. sårgrad 4.

**Mått:** 86x49x8,5 cm/del

**Brukarvikt:** Obegränsad.

**OBS!** Fyra delar ska beställas, som knäpps ihop till fullstor madrass.

Föreskrivning via pappersordination, ej WebSesam.

## UTGÅNGET SORTIMENT

### CuroCell Nova CX 13

Firma: Care of Sweden



**OBS!** UTGÅNGEN, KAN EJ FÖRSKRIVAS.

**S-nr:** 34512 (madrass inkl kompressor)

**Kategori:** Växeltrycksmadrass. Behandlande madrass upp t.o.m. sårgrad 2.

**Brukarvikt:** 150 kg

**Mått:** 90x200x13

S-nr 34519 CuroCell Nova CX13 105 cm bred.

## Prevento Bas

Firma: Parir AB



**OBS!** Utgången, kan endast förskrivas i mån av tillgång på lagret.

**S-nr:** 17300 (kompressor ingår)

**Kategori:** Växeltrycksmadrass. Behandlande madrass upp t.o.m. sårgrad 2.

**Brukarvikt:** 30-120 kg

**Material:** Polyurethan

## Prevento Plus

Firma: Parir AB



**OBS!** Utgången, kan endast förskrivas i mån av tillgång på lagret.

**S-nr:** 17301 (inkl kompressor)

**Kategori:** Behandlande växeltrycksmadrass för brukare som har konstaterade sår, upp t.o.m. sårgrad 3.

**Material:** Polyurethan

**Brukarvikt:** 140 kg