

Hjälpmiddelscentrum utbildar

Arbetsstolar



Kursansvarig hjälpmedelskonsulent

Helena Lagerbäck, telefon: 021-17 44 63

E-post: helena.lagerback@regionvastmanland.se

John Franzén, telefon: 021-17 46 43

E-post: john.franzen@regionvastmanland.se

Björn Flennersjö, telefon: 070-2570022

E-post: bjorn.flennersjo@regionvastmanland.se

Hösten 2020

Innehållsförteckning

Föreskrivningsregler	3
Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	3
Allmänna föreskrivningsregler	4
Arbetsstolar	5
Basstolar Mercado.....	5
Basstolar Eurovema	6
Basstolar Eurovema Barn.....	6
Mercado.....	7
Arbetsstol för tunga användare.....	8
Eurovema	9
Arbetsstol för Barn	10
Sittsystem	11
Mercado.....	11
Ergomedic plus	11
Ergomedic Slow Recovery	11
Coxitsits.....	11
Plansits.....	11
Eurovema	12
SitRite	12
Coxitsits.....	12
Ryggsystem	13
Mercado.....	13
Ergomedic plus & Ergomedic plus m. sidokil.....	13
Eurovema	14
SitRite	14
Forma Komfort & Active	14
Hjul Mercado.....	15
Större Hjul.....	15
Lättrullade hjul	15
Skillnader mellan Mercado & Eurovema.....	16
Rygginställningarna	16
Broms	16
Armstöd	16
Artikel.nr Mercado	17
Artikel.nr Eurovema.....	21

FÖRSKRIVNINGSGREGLER

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekvositionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda, griptång och sängklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

Allmänna förskrivningsregler

Artikel	Kriterier	Kommentar
Arbetsstol	<p>1. Arbetsstol kan förskrivas om brukare kan uppnå en väsentligen högre självständighet och/eller aktivitetsgrad.</p> <p>Fokus ska sättas på självständighet. Brukaren kan bibehålla funktioner i hemmet.</p> <p>2. Kompensera starkt nedsatt eller ingen gångförmåga och ersätta rullstol då gånghjälpmedel inte längre kan användas för förflyttning inomhus.</p> <p>3. Kan ersätta eller föregå rullstol för person som är beroende av sittande och självständig förflyttning i bostaden.</p>	<p>1. Arbetsstol kan inte ersätta sittmöbel.</p> <p>2. För att få mer än 1 arbetsstol krävs ansökan om Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk</p> <p>3. Om broms inte är nödvändigt får brukaren själv köpa sin stol ute i handeln.</p>
Elektrisk Arbetsstol	<p>1. Elarbetsstol kan förskrivas när brukaren inte klarar av att höjreglera en arbetsstol med gasfjäder</p> <p>2. Kompensera mycket svåra uppresningsbesvär och då elstol är enda möjligheten till självständig och skonsam uppresning.</p>	<p>1. Elarbetsstolar är mer tungrullade än manuella.</p>
Arbetsstol m. Elbroms/Sitsmonterad broms	<p>Är endast förskrivningsbart om övriga bromsfunktioner inte funkar (reumatikerkryss, längre bromsspak, etc).</p>	<p>Elbroms monteras endast på elarbetsstol och gör stolen lite tyngre.</p> <p>Sitsmonterad broms går att få på både manuell och el.</p> <p>Ifyllt beställningsformulär krävs.</p>
Arbetsstol till Barn	<p>För barn med svåra funktionshinder kan specialstol förskrivas som personligt hjälpmedel. Arbetsstol kan även förskrivas till barn med svåra smärttillstånd i rygg och nacke.</p>	<p>Barn kan få arbetsstol som dubbelförskrivning.</p>
Stol på specialskola, gruppbostad, dagcenter, arbetsplats	<p>På specialskola, gruppbostad, dagcenter och arbetsplats är arbetsstol ett verksamhetsansvar och bekostas endast vid <u>specialanpassning</u> av regionen.</p>	

ARBETSSTOLAR

Hjälpmiddelscentrums sortiment av arbetsstolar kommer från Mercado och Eurovema. I websesam finns flera modeller från Mercado och Eurovema som är förskrivningsbara. En del Mercado stolar i websesam är endast tillgängliga när dessa har återkommit via rekonden då dessa inte längre köps in.

Vid förskrivning av en mer avancerad stol med exempelvis elbroms eller nackstöd på stolen ska Eurovemas/Mercados beställningsguide användas. Denna guide finns under fliken arbetsstolar på förskrivarsidan. [Sänd ifylld beställningsguide tillsammans med ordinationsblankett till Hjälpmiddelscentrum.](#)

Basstolar Mercado

S- 38287 (35671 & 32031) Arbetsstol REAL 9000 Plus Man, vf, std höjd, låg rygg, sits 44x48

S- 38288 (35673 & 32033) Arbetsstol REAL 9000 Plus Man, vf, låg höjd, låg rygg, sits 44x48

S-35682 (32051) Arbetsstol el vs std höjd sits 44x48 hög medic rygg

S- 38286 (35677 & 32046) Arbetsstol REAL 9000 Plus EL, vf, Std höjd, låg rygg, sits 44x48 24V 1G

S-38289 (35679 & 32048) Arbetsstol REAL 9000 Plus El, vf, låg höjd, låg rygg, sits 44x48 24V 1G

S-35676 (32036) Arbetsstol manuell, vinkelställbar, std sitthöjd, sits 44x48, hög rygg

Maxbelastning: 150 kg

De **fetmarkerade** stolsmodellerna är lagervaror. Övriga stolar är beställningsbara. (Sesamnumret som är inom parentes är likvärdig stol från tidigare upphandling.) Om det finns likvärdiga stolar som har kommit in via rekond så kommer det vara dessa som levereras då de ligger som tvingande byte.

Fotring är standard på alla basstolar.

Vid förskrivning i WebSesam kan man välja mellan olika alternativa sitsar och ryggar. Minsta sitsen som passar till vuxen Mercado stolarna är 44x43.

Anteckningar

Basstolar Eurovema

38380 Arbetsstol Flexbase manuell sh 43-62cm sits 45x45 vev tilt hög rygg

38379 Arbetsstol Flexbase manuell sh 38-54cm sits 45x45 vev tilt hög rygg

38374 Arbetsstol Flexbase manuell sh 43-62cm gasreglerad sitstilt sits 45x45 låg* rygg

38373 Arbetsstol Flexbase manuell sh 38-54cm gasreglerad sitstilt sits 45x45 låg rygg*

S-38388 Arbetsstol Flexbase El sh 43-68cm sits 45x45 vev tilt hög rygg

S-38387 Arbetsstol Flexbase El sh 35-52 cm sits 45x45 vev tilt hög rygg

S-38382 Arbetsstol Flexbase El sh 43-68cm gasreglerad sitstilt sits 45x45 låg rygg*

S-38381 Arbetsstol Flexbase El sh 35-52cm gasreglerad sitstilt sits 45x45 låg rygg*

Maxbelastning: 140 kg

*= Köpstopp på dessa i nuläget då det inkommit många avvikelser på dessa produkter. Ersätts av följande stolar från Mercado: 41067, 41068, 41069, 41070

Basstolar Eurovema Barn

S-38928 Arbetsstol Flexbase El junior/barn sh 43-68cm vevreglerad sitstilt

S-38927 Arbetsstol Flexbase El junior/barn sh 35-52cm vevreglerad sitstilt

Maxbelastning: 80 kg

Fotring är standard på alla basstolar förutom på **barnstolarna** som är utrustade med hel fotplatta.

De **fetmarkerade** stolsmodellerna är lagervaror. Övriga stolar är beställningsbara. Om det finns likvärdiga stolar som har kommit in via rekond så kommer det vara dessa som levereras då de ligger som tvingande byte.

Vid förskrivning i WebSesam kan man välja mellan olika alternativa sitsar och ryggar. Minsta sitsen som passar till vuxen Eurovema stol är 40x40 (Forma sits) eller 36x45 (SitRite sits). De mindre sitsarna passar endast till barn/junior stolarna.

Anteckningar

Mercado

Arbetsstol manuell, vinkelfast, std sitthöjd, sits 44x48 och låg rygg
S-38287



Arbetsstol elektrisk, vinkelfast, std sitthöjd, sits 44x48 och låg rygg
S-38286



Exempel på utrustning (se slutet för artikel.nr)

1. Andra ryggplattor samt nackstöd
2. Hjul för hårda golv/mjuka golv
3. Andra sittplattor
4. Anpassning för låg eller hög vikt
5. Alternativa armstöd
6. Alternativa bromslösningar
7. Placering reglage
8. Benstöd/fotring
9. Bålstöd, vadstöd, sidostöd

Arbetsstol för tunga användare

För tyngre brukare finns Mercados elektriska Twin-stol som tar upp till 180 kg (manuell) & 275 kg (el). Den är utrustad med två stycken lyftmotorer som gör den stark. Dessa stolar finns i tre olika sittbredder, 52cm, 62cm och 72cm. Beställs genom att fylla i Mercados beställningsguide för Twin 9200. Ifylld blankett skickas till Hjälpmedelscentrum tillsammans med ordinationsblankett. Valen är sitthöjd, sittbredd, sittdjup, placering reglage. Fotring finns som tillval. Går ej att få tilt på dessa.



Eurovema

Arbetsstol Flexbase manuell sh 43-62cm gasreglerad sitstilt sits 45x45 låg rygg
S-38374



Arbetsstol Flexbase El sh 43-62cm gasreglerad sitstilt sits 45x45 låg rygg
S-38382



Exempel på utrustning (se slutet för artikel.nr)

1. Andra ryggplattor samt nackstöd
2. Andra sittplattor
3. Anpassning för låg eller hög vikt
4. Alternativa armstöd
5. Alternativa bromslösningar
6. Placering reglage
7. Benstöd/fotring
8. Bålstöd, vadstöd, sidostöd

Arbetsstol för Barn

För barn så finns det två Eurovema stolar som ligger ute i webbsam i dagsläget (38928 & 38927). Barnstativet har samma storlek som vuxenstativen men sitsstativet är mindre och stolens maxvikt är 80 kg. Det finns fortfarande många barnstolar från Mercado som kan återanvändas och det är de stolarna som kommer levereras i första hand om inte kunden i fråga specifikt behöver en Eurovema stol.

Arbetsstol Flexbase El junior/barn sh 45-70cm vevreglerad sitstilt (Eurovema)
S-38928



Arbetsstol el vs junior/barn stativ 48x53 varukorg (Mercado)
S- 35884



SITTSYSTEM

Mercado

Ergomedic plus

sitsen har mycket form, kombinerad med rätt mjukhet, just för att stabiliteten och komforten skall vara optimal. Denna sits är utformad så att den är högre under låren än stjärten. Den högre rundade formen på varje sida om låren stabiliserar både bäckenet och benen.



Ergomedic Slow Recovery

Denna sits är tillverkad av två olika Material. Det översta så kallade slow recovery-materialet formar sig och ger en bra tryckfördelning och ökad sittkomfort. Denna sits är dock känslig för kyla och kan bli hård om den får stå kallt.



Coxitsits

Mercados coxitsits håller samma höga ergonomiska kvalitet som ErgoMedic-sitsen. Coxit-sitsen är delad med individuellt reglerbara klaffar. Den används främst vid lindring-/rehabilitering av ortopediska skador i höft och lårben. **OBS! Annat sittkryss för att denna ska kunna monteras.**



Plansits

När de dessa dynor inte längre fungera så kan en plansits utan dyna förskrivas som man sedan placerar en rullstolsdyna på. Kontakta konsulent.


Eurovema

SitRite

SitRite-sitsens fördelar finns dolda under ytan i de två skummen. De två skummen har olika densitet och är formgivna med hänsyn till var bäcken och lår behöver fasthet respektive mjukhet. Det hårdare undre skummet ger positionerande egenskaper dvs det hjälper till att hålla bäckenet i en god position. Det mjukare övre skummet ger tryckfördelning och är tjockare under sittbenen än under låren. Form och densitet samspelar för att ge komfort och stabilitet och förbättra funktioner som balans, upprättning av ryggraden och handkontroll.

Sitsen består av:

- sittgrop
- anatomiskt formad femurhylla
- stöd för lårens sidor
- stöd för bäckenet i sidled
- plats för utskjutande sacrum och svansben
- tryckfördelnde egenskaper

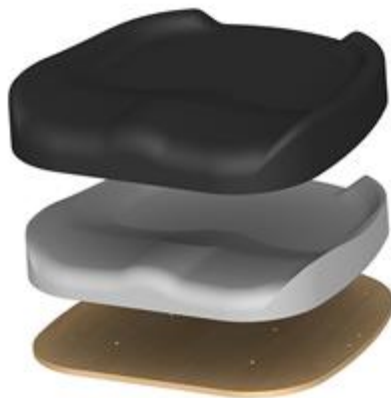

Coxitsits

Coxit-sitsen är delad med individuellt reglerbara klaffar. Den används främst vid lindring-/rehabilitering av ortopediska skador i höft och lårben.



RYGGSYSTEM

Mercado

Ergomedic plus & Ergomedic plus m. sidokil

Det högre ryggstödet har mer form runt bäcken och bröstryggen – det lägre har samma formgivning men kontakter främst bäcken och ländrygg. Det höga ryggstödet nedre del är format så att man kan sitta med bäckenstöd även om ryggstödet är vinklat bakåt. Högst upp i mitten, mellan skulderbladen, är det inbyggt ett mjukt extra stöd. Anledningen är att man skall kunna sitta uppsträckt och stabilt mot ryggstödet, samtidigt som skuldrorna är fria. Det höga ryggstödet finns även med extra sidokilar.



Ergomedic plus



Ergomedic plus m. sidokil

Eurovema

SitRite

SitRite är designad för att ge extra stöd och komfort. Den stabila sittpositionen ger ökad uthållighet i sittande och optimerad möjlighet att använda armar och huvud. SitRite är anatomiskt formad. SitRite ger ergonomiska fördelar avseende positionering och tryckfördelning.



Forma Komfort & Active

Komfort ger ökat stöd över hela ryggen och kan ställas in efter brukarens ryggkurvatur. Den aktiva ryggen ger ett bra stöd samtidigt som man bibehåller rörligheten i den övre bröstryggen. Ett nackstöd kan även väljas både till aktiv och komfortrygg.



Forma Komfort





Forma Active


HJUL MERCADO

Till Mercado stolarna finns flera alternativ av hjul som man kan byta till som kan vara lämpliga vid olika tillfällen. **Eurovema** har endast standardhjul.

Större Hjul

Artikel.nr	Benämning	Kompletteras med Bromsben	
S-15457	125 mm	Artikel 18202 för fyrkantigt bromsben (äldre stolar) Artikel 39978 för runt bromsben	 Fyrkantigt bromsben
S-38172	150 mm	Artikel 39941 för fyrkantigt bromsben (äldre stolar) Artikel 39979 för runt bromsben	
Övrigt:	Går ej att förskriva i websesam. 15457 kommer som styck och 38172 kommer som sats. OBS! Sitthöjden blir högre med större hjul.		 Runt bromsben

Lättrullade hjul

Artikel.nr	Benämning	
S-03454	Extra lättrullat länkhjul SL 100 mm	 Breda Lättrullade
S-32384	Extra breda länkhjul BXL 100 mm	
Övrigt:	Går ej att beställa i websesam.	
Viktigt:	Sl-hjulet är mycket lättrullat och har dubbla kullager. Det fungerar bäst på hårda golv som till exempel parkett- och betonggolv. bxl-hjulet är ett sl-hjul med en bredare hjulbana. Viktig att tänka på underlaget i första hand. Har patienten kork- eller plastmatta så är risken stor att det ej kommer fungera med andra hjul.	

SKILLNADER MELLAN MERCADO & EUROVEMA

Rygginställningarna

- Eurovema har bara en ryggmekanism så det behöver ej bytas någon sådan om man t.ex önskar byta från låg rygg till hög rygg.
- Eurovema har flera "säkerhets" skruvar för att säkra upp ryggstödet.
- För att byta rygg behöver bara en skruv lossas på Eurovema. På Mercado rör det sig om 2-3 skruvar som måste tas bort för att ryggen ska kunna bytas (ryggmekanismen måste även bytas om bytet är från låg till hög rygg och vice versa).



Eurovema

Mercado

Broms

- På Mercados stolar så är stativet framåtbromsat eller bakåtbromsat, går ej att ändra denna funktion. Det är oftast dock barnstolarna som är bakåtbromsade.
- På Eurovemas stolar så går det att ändra på stolen om man önskar få den framåtbromsad eller bakåtbromsad. Går även att justera vilket läge som bromsspaken önskas vara i.



Armstöd

Om längre/kortare armstöd önskas på en Eurovema arbetsstol så måste även armstödsrören bytas pga annan hålbild på armstöden. Om armstödslängen på en Mercado stol behöver bytas så behöver du inte byta armstödsrör. Armstöden har samma hålbild oavsett längd.



ARTIKEL.NR MERCADO

Sitsmodeller Mercado

Storlek Bredd x Djup	Sesam.nr standard	Sesam.nr Ergomedic plus	Sesam.nr Ergomedic Slow Recovery	Sesam.nr Ergomedic plus Slow Recovery
29x32 cm**	S-18257	S-18229	-	-
33x35 cm*	S-03532	S-14628	S-09983	-
36x39 cm*	S-14450	S-14629	S-09984	-
36x43 cm*	S-14451	S-14630	S-36633	-
40x39 cm	S-03530	S-14631	S-09982	-
40x43 cm	S-03529	S-14632	S-09981	-
40x48 cm	S-18195	S-17681	-	S-36677
44x43 cm	S-01269	S-14633	S-09632	-
44x48 cm	S-03531	S-14634	S-09633	S-35714
44x53 cm	S-38602	-	-	-
48x48 cm	S-08163	S-14635	S-09980	S-18031
48x53 cm	S-37033	-	-	S-41268





**=Kombineras med plus-stativ Mini 43x48 cm






*= Kombineras med plus-stativ 43x53 cm

Ryggmodeller Mercado




Storlek Bredd x Höjd	Sesam.nr standard	Sesam.nr Ergomedic plus	Ergomedic plus m sidokilar	Ergomedic plus Slow Recovery
Låg Rygg				
23x20 cm	S-18230	-	-	-
27x22 cm	S-09353	-	-	-
30x26 cm	S-14311	-	-	-
33x26 cm	S-09998	-	-	-
35x20 cm	-	S-18228	-	-
38x26 cm	S-03536	-	-	S-15563
40x20 cm	-	S-14624	-	-
Hög Rygg				
27x32 cm	S-14313	-	-	-
30x34 cm	S-14312	S-18227	S-17608	-
33x36 cm	S-04428	-	-	-
35x43 cm	-	S-14625	S-17607	-
40x34 cm	S-03537	-	-	S-18497
42x43 cm	S-09909	S-14626	S-17390	S-14886
46x43 cm	S-36793	S-36473	S-18388	-

Benstödsmodeller Mercado

Benstöd till med fotplatta vuxenstativ (48x53)						 Mittmonterad  Hel  Delad
Hel fotplatta B37xD21 cm		Delad fotplatta B18xD21 cm		Hel mittmonterad B29xD24 cm		
Storlek(cm)	Sesam.nr	Storlek(cm)	Sesam.nr	Storlek(cm)	Sesam.nr	
S, 18-24	S-08865	S, 18-24	S-08862	30-38	S-38279	
M, 23-32	S-06568	M, 23-32	S-08863			
L, 28-41	S-08866	L, 28-41	S-08112	37-53	S-35725	
XL, 38-51	S-08867	XL, 38-51	S-08864			
Fäste benstöd Medic vuxen S-32605 Fäste för sitsar som har längre sittdjup än 43 cm.						

Benstöd till Barn-/juniorstativ "Mini" (43x48 & 43x53) med fotplatta						 Mittmonterad  Hel  Delad
Hel fotplatta B25xD18 cm		Delad fotplatta B12xD18 cm		Hel mittmonterad B29xD24 cm		
Storlek(cm)	Sesam.nr	Storlek(cm)	Sesam.nr	Storlek(cm)	Sesam.nr	
S, 18-24	S-33302	S, 18-24	S-33304	30-38	S-38279	
M, 23-32	S-33303	M, 23-32	S-33305			
L, 28-41	S-33308	L, 28-41	S-33306	37-53	S-35725	
XL, 38-51	S-33309	XL, 38-51	S-33307			
Fäste benstöd Medic junior/vuxen S-32604 Fäste för sitsar som har mindre sittdjup än 40 cm.						
Fäste benstöd Medic barn/junior S-36616 Fäste för sitsar där risken annars finns att fotplattorna slår i hjulen i botten.						

Övriga Tillbehör Mercado

<p>Reumatikerkryss S-05179 Monteras på bromsspak. Underlättar för tex. reumatiker att nå och reglera bromsen.</p>	
<p>Bromsspak med ögla S-37891 Alternativ för smidigare bromsfunktion när patienten har svårt att nå med vanliga bromsspaken samt kräver mindre kraft att bromsa och låsa upp. Har mjukt grepp.</p>	
<p>Adapter rullstolsbenstöd S-14703 Höger sida S-14704 Vänster sida Adapter för montering av Rullstolsben från Crossrullstolen.</p>	

<p>Sidostöd (bxh)</p> <p>S-18542, 15x8 cm S-09568, 28x8 cm S-06570, 24x14 cm S-09270, 30x16 cm</p> <p>OBS måste kompletteras med fäste för sidostöd (S-32389).</p>	 <p>S-18542 S-06570</p>
<p>Armstödsrör</p> <p>36637, 21cm höger 36638, 21cm vänster</p> <p>S-32380, 32 cm höger S-32381, 32cm vänster</p> <p>S-32382, 38cm höger S-32383, 38cm vänster</p>	
<p>Armstödsplattor</p> <p>Standard</p> <p>S-07607, 25 cm S-01271, 30 cm S-01270, 35 cm S-32834, 40 cm</p> <p>Comfort</p> <p>S-04133, 30 cm S-04132, 35 cm S-32833, 40 cm</p>	<p>Standard</p>  <p>Comfort</p> 

ARTIKEL.NR EUROVEMA

Sitsmodeller Eurovema

Storlek Bredd x Djup	Sesam.nr standard (Forma)	Sesam.nr SitRite
29x32*	-	S-38429
32x36*	S-38427	S-38430
36x40*	S-38426	S-38431
40x40*	S-38498	S-38432
40x45*	-	S-38433
40x40	S-38459	S-38456
40x45	S-38460	S-38433
45x45	S-38461	S-38457
45x50	-	S-38484
50x50	S-38462	S-38486

*=Passar endast till Barnstativet.

Ryggmodeller Eurovema

Modell	Storlek Bredd x Höjd	Sesam.nr
Forma Rygg		
Låg Rygg	37x23	S-38488
Hög Rygg Comfort	37x44	S-38489
Hög Rygg Aktiv	37x46	S-38490
SitRite Rygg		
Hög Rygg	30x37	S-38445
Hög Rygg	37x43	S-38491
Hög Rygg	42x45	S-38554
Hög Rygg	47x47	S-38493
Junior Rygg		
Låg Rygg	28x20	s-38449
Låg Rygg	32x20	S38453
Hög Rygg	28x33	s-38451
Hög Rygg	32x35	s-38450
Hög Rygg	32x42	s-38452

Övriga Tillbehör Eurovema

<p>Reumatikerkruss</p> <p>S-38454</p> <p>Monteras på bromsspak. Underlättar för tex. reumatiker att nå och reglera bromsen.</p>	 A black metal hand crank with a long handle and a circular grip, designed for easy operation by individuals with arthritis.
<p>Sitsmonteradbroms</p> <p>Grund monteras på stolen (se beställningsformulär)</p> <p>Underlättar för patienten att låsa.</p>	 A black metal brake mechanism with a red circle highlighting the locking lever, designed to be mounted on a wheelchair.
<p>Adapter rullstolsbenstöd</p> <p>S-38526 Höger sida S-38527 Vänster sida</p> <p>OBS! Måste kompletteras med kombifäste benstöd S-38492</p>	 A black metal adapter for wheelchair leg rests, consisting of two separate pieces for the right and left sides.
<p>Fotplatta mittmonterad</p> <p>Junior/barn stolar S-38476, 27-35 cm S-38479, 36-45 cm</p> <p>Vuxen stolar S-38528, 43-52 cm</p> <p>OBS! Måste kompletteras med kombifäste benstöd S-38492</p>	 A black metal footplate with a circular base and a vertical support post, designed for mounting on a wheelchair.
<p>Fotring</p> <p>S-38495</p> <p>Är standard på alla vuxenstolar</p>	 A black metal foot ring with a curved shape and a central pivot point, designed to be attached to a wheelchair's footplate.
<p>Delade fotplattor</p> <p>Junior/barn stolar S-38474, höger 27-35 cm S-38475, Vänster 27-35 cm S-38477, Höger 36-45 cm S-38478, Vänster 36-45 cm</p> <p>OBS! Måste kompletteras med kombifäste benstöd S-38492</p>	 A black metal footplate with a vertical support post and a horizontal footrest, designed for mounting on a wheelchair.