

Hjälpmedelscentrum utbildar

Eldrivna rullstolar med manuell direktstyrning

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent

Karin Hjelte

Tel: 021-174467 karin.hjelte@regionvastmanland.se

Helena Lagerbäck

Tel: 021-174466 helena.lagerback@regionvastmanland.se

Jenny Ridderstolpe

Tel: 021-176661 jenny.ridderstolpe@regionvastmanland.se

Vår 2026



Sterling Elite2 Plus svart
Leverantör: Sunrise Medical

Avtalsstol

Enkelt sittande

Förskrivningsbar i WebSesam

Hindertagning 10 cm

Högsta brukarvikt 175 kg

Hastighet 10 km/h

Stolens vikt 140 kg

Totallängd 139 cm

Totalbredd 65 cm

För att ändra sitthöjd behövs 2 st 17mm nyckel.

Lyft av sitsen rakt upp. Ta bort främre kåpan genom att lossa gummistroppen. Sitsstolpen kan justeras på höjden i 4 lägen. Skruva bort de två skruvarna och muttrarna. Placera dem i önskad position och dra åt muttrarna. Sätt tillbaka främre kåpan och lyft i sitsen.

Anteckningar _____

Elite2 Plus svart

Elite 2 plus svart inkl. korg och säte **S-440 96**

Backspegel för styrmontering Elite2 vänster S-34953

Backspegel styrmontering Elite2 Hö. S-349 54

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Hö S-351 67

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Vä S-351 80

Laddare Elite Impulse 24V 8 A S-43298

Kom ihåg att välja *inställning* när kryckäpphållare eller syrgashållare beställs!

Kryckäpphållare S-349 55

Inställning Kryckäppshållare Hö S-351 61

Inställning Kryckäppshållare Vä S-35 162

Syrgashållare 107 mm inkl. fäste S-169 16

Syrgashållare 119 mm inkl. fäste S-349 57

Inställning Syrgashållare Hö S-351 63

Inställning Syrgashållare Vä S-351 64

För leverans till förskrivares lager välj Kund och Turbil till förskrivare/beställare.

För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till hemadressen.

Patientuppgifter med adress och telefonnummer samt eventuella **uppgifter om kontaktperson** ska vara korrekta, det är viktigt eftersom Leveransplaneraren tar kontakt med patienten dagen innan utleverans. Om HMC inte får kontakt med patient/kontaktperson dagen innan förskjuts leveransen.

I fältet Övrig information ska anteckningar göras om det finns önskemål om att nyckeln ska levereras till annan än patienten, eller tex att en viss sitthöjd ska vara inställd. Ange var elrullstolen ska ställas av transport tex i förråd eller bostaden.

Anteckningar _____



Sterling Elite2 Plus

Leverantör: Sunrise Medical

Äldre modell, kan finnas i lager

Enkelt sittande

Förskrivningsbar i WebSesam

Hindertagning:	10 cm
Högsta brukarvikt:	175 kg
Hastighet	10 km/h
Stolens vikt	140 kg inklusive batterier
Totallängd	139 cm
Totalbredd	65 cm
Sitthöjd	44-54 cm

För att ändra sitthöjd behövs 2 st 17mm nyckel.

Lyft av sitsen rakt upp. Ta bort främre kåpan genom att lossa gummistroppen. Sitsstolpen kan justeras på höjden i 4 lägen. Skruva bort de två skruvarna och muttrarna. Placera dem i önskad position och dra åt muttrarna. Sätt tillbaka främre kåpan och lyft i sitsen.

Anteckningar _____

Elite2 Plus

Elite 2 plus inkl. korg och säte	S-349 48
Elite 2 plus inkl. korg och säte	S-433 36
Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Hö	S-351 67
Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Vä	S-351 80
Laddare TC Switch	S-15 634
Backspegel Hö.	S-349 54
Backspegel Vä.	S-349 53

Kom ihåg att välja *inställning* när kryckkäpphållare eller syrgashållare beställs!

Kryckkäpphållare	S-349 55
Inställning Kryckkäppshållare Hö	S-351 61
Inställning Kryckkäppshållare Vä	S-35 162
Syrgashållare 107 mm inkl. fäste	S-169 16
Syrgashållare 119 mm inkl. fäste	S-349 57
Inställning Syrgashållare Hö	S-351 63
Inställning Syrgashållare Vä	S-351 64

För leverans till förskrivares lager välj Kund och Turbil till förskrivare/beställare.

För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till hemadressen.

Patientuppgifter med adress och telefonnummer samt eventuella **uppgifter om kontaktperson** ska vara korrekta, det är viktigt eftersom Leveransplaneraren tar kontakt med patienten dagen innan utleverans. Om HMC inte får kontakt med patient/kontaktperson dagen innan förskjuts leveransen.

I fältet Övrig information ska anteckningar göras om det finns önskemål om att nyckeln ska levereras till annan än patienten, eller tex att en viss sitthöjd ska vara inställd. Ange var elrullstolen ska ställas av transport tex i förråd eller bostaden.

Anteckningar _____



Sterling Elite2 Mini

Leverantör: Sunrise medical

Avtalsstol

Enkelt sittande

Förskrivningsbar i WebSesam

Högsta brukarvikt	175 kg
Hastighet	10 km/h
Stolens vikt	110 kg inklusive batterier
Totallängd	1285 mm
Totalbredd	595 mm
Sitthöjd	450-520 mm

För att ändra sitthöjd behövs 2 st 17mm nyckel.

Lyft av sitsen rakt upp. Ta bort främre kåpan genom att lossa gummistroppen. Sitsstolpen kan justeras på höjden i 4 lägen. Skruva bort de två skruvarna och muttrarna. Placera dem i önskad position och dra åt muttrarna. Sätt tillbaka främre kåpan och lyft i sitsen.

Anteckningar _____

Elite2 Mini

Elrullstol Elite2 Mini inkl korg och säte.	S- 45969
Backspegel för styrmontering Elite2 vänster	S-34953
Backspegel styrmontering Elite2 Hö.	S-349 54
Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Hö	S-351 67
Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Vä	S-351 80
Laddare Elite Impulse 24V 8 A	S-43298

Kom ihåg att välja *inställning* när kryckkäpphållare eller syrgashållare beställs!

Kryckkäpphållare	S-349 55
Inställning Kryckkäppshållare Hö	S-351 61
Inställning Kryckkäppshållare Vä	S-35 162

Syrgashållare 107 mm inkl. fäste	S-169 16
Syrgashållare 119 mm inkl. fäste	S-349 57
Inställning Syrgashållare Hö	S-351 63
Inställning Syrgashållare Vä	S-351 64

För leverans till förskrivares lager välj Kund och Turbil till förskrivare/beställare.

För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till hemadressen.

Patientuppgifter med adress och telefonnummer samt eventuella **uppgifter om kontaktperson** ska vara korrekta, det är viktigt eftersom Leveransplaneraren tar kontakt med patienten dagen innan utleverans. Om HMC inte får kontakt med patient/kontaktperson dagen innan förskjuts leveransen.

I fältet Övrig information ska anteckningar göras om det finns önskemål om att nyckeln ska levereras till annan än patienten, eller tex att en viss sitthöjd ska vara inställd. Ange var elrullstolen ska ställas av transport tex i förråd eller bostaden.

Anteckningar _____



Mini Crosser X1 3W

Leverantör: Minicrosser AB

Avtalsstol- större modell, avancerat sittande.

Kan utrustas med sitslyft, Ergosäte i olika sittbredder och alterantivt styrsätt

OBS! X1 är inte förskrivningsbar i webSesam. Utprovning sker tillsammans med konsulent.

Finns i sätesbredd 35 - 40 -45 – 50 – 60–70

Hindertagning	11 cm
Högsta brukarvikt	175 kg
Hastighet	10 km/h
Stolens vikt	158,5 kg inklusive batterier
Totallängd	142 cm
Totalbredd	66 cm
Sitthöjd	cm

Anteckningar _____



Minicrosser X1 HD 4W

Leverantör: Minicrosser AB

Avtalsstol för tyngre brukare, avancerat sittande.

Brukarvikt 250 kg

Kan utrustas med sityft, Ergosäte i olika sittbredder och alterantivt styrsätt

OBS! X1 HD 4W är inte förskrivningsbar i webSesam. Utprovning sker tillsammans med konsulent.

Finns i sätesbredd upp till 70 cm

Hindertagning	11 cm
Högsta brukarvikt	250 kg
Hastighet	10 km/h
Stolens vikt	169,5 kg inklusive batterier
Totallängd	148 cm
Totalbredd	68 cm
Sitthöjd	cm

Anteckningar _____

