

Hjälpmiddelsentrum utbildar

Förflyttningshjälpmedel



Ansvarig hjälpmedelskonsulent

Hösten 2024

Vuxen

Britta Johnsson, telefon: 021-174463

hmc.forflyttningshjalpmedel@regionvastmanland.se

Åsa Petterson, telefon: 021-176867

hmc.forflyttningshjalpmedel@regionvastmanland.se

Innehåll

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	3
Glidhjälpmedel	
Glidmattor	4
Blue Motion Slide Soft	4
Ready slide	4
OnewaySlide	4
Segelduk	5
Glidlakan	5
Wendylett komplett med glid- och draglakan	5
Glidörngott WendyLean	6
Topsheet	6
Glidbrädor	7
Easyglide.....	7
Vridplattor och Överflyttningsplattformar	
Vridplattor	8
Vridplatta Rondo	8
Vridplatta Turntable	8
Turner	8
Överflyttningsplattformar	
Molift Raiser	9
Tillbehör Molift	9
ReTurn	10
Tillbehör ReTurn	10
Sara Stedy	11
Övriga Förflyttningshjälpmedel	
FlexiGrip	12
FlexiMove	12
Antislip	13
Fotpall	13
MoveMaster	13
Vårdbälten	
Flexibelt, Hug	14
Easybelt, Hug	14
EasyBelt	15
Flexibelt	15

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda och förhöjningsklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

Glidmattor

Blue Motion Slide Soft



Leverantör:	Human Care	
Funktion:	Tunnelsydd glidmatta i tunt glatt tyg för minskad friktion.	
Art.nr & storlek	436 21, 70x70 cm 436 22, 110x70 cm 436 23, 195x70 cm Försäljningsartikel.	

Ready slide

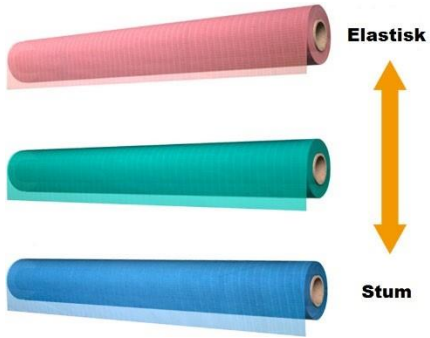
Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Funktion:	Tunnelsydd glidmatta i tunt glatt tyg för minskad friktion.	
Art.nr & storlek	327 30, 70x70 cm 364 51, 110x70 cm 330 42, 195x70 cm Försäljningsartikel.	

OnewaySlide

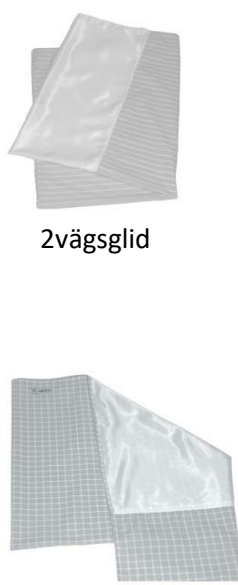
Leverantör:	Direct Healthcare Group	 <p>Tubformad</p>  <p>Öppen med dragband används i rullstol</p>
Funktion:	Används för att lättare komma längre bak i stol/rullstol.	
Art.nr & storlek	Tubformad 184 26, 40x50 cm 123 05, 45x50 cm Öppen med dragband 167 96, 130x40 cm 162 66, 130x45 cm	
Max Brukarvikt:	150 kg	

Segelduk


Leverantör:	Brehms Spilerduk ApS	
Funktion:	Säljs på 10 metersrulle, 1 m bred. Rekvissionsartikel. Bör klippas med tandsax för att inte repa upp sig.	
Art.nr & storlek	399 33, tunnast material (röd) 399 32, mellan (grön) 399 31, tjockast material (blå)	

Glidlakan


Komplett med glid- och draglakan

Leverantör:	Direct Healthcare Group, Etac	 <p>2vägsglid</p> <p>4-vägsglid</p>
Funktion:	Glidlakan finns som 2-vägsglid och 4-vägsglid. Försäljningsartiklar.	
Art.nr & storlek	<p>DHG, Wendylett</p> <p>2-vägsglid, komplett 126 82, L140 x B200 cm, 60 cm glidyta 126 81, L100 x B200 cm, 60 cm glidyta 162 64, L200 x B200 cm, 70 cm glidyta</p> <p>2-vägsglid, komplett, formsydd med resår 172 12 L200 x B90 cm glidlakan 70 cm glidyta L140xB200 draglakan</p> <p>Etac</p> <p>4-vägsglid, komplett med handtag 439 84 L140 x B200 cm glidlakan 60 cm glidyta L140 x B200 draglakan</p> <p>4-vägsglid, komplett utan handtag 440 01 L200 x B200 cm glidlakan L140 x B200 cm draglakan</p>	

Glidörngott WendyLean



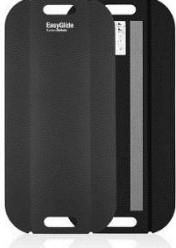
Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Funktion:	2-vägsglid. Försäljningsartikel.	
Art.nr & storlek	143 95, 50x60cm	

Topsheet

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Funktion:	För vändning och/eller skötsel i säng tillsammans med personlyft. Friktionsreducerande undersida. Försäljningsartikel.	
Art.nr & storlek	344 76, 155x140 cm.	
Max Brukarvikt:	250 kg	

Glidbrädor

Easyglide

Leverantör:			
Art.nr	Storlek & form	Max brukarvikt:	
113 84	45x20cm, Rektangulär, ej vikbar	135–150 kg (Avgörs av hur stor yta det är som saknar understöd, max 10 cm)	
113 85	60x25cm, Rektangulär, ej vikbar	Som ovan	
343 44	45x20 cm, oval 2-pack	135 – 300 kg (Avgörs av hur stor yta det är som saknar understöd, max 5cm)	
347 44	85x39 cm, oval 2-pack	Som ovan	
026 92	60x33 cm, rektangulär, vikbar	135–150 kg (Avgörs av hur stor yta det är som saknar understöd, max 10 cm)	
026 93	75x33 cm, rektangulär, vikbar	Som ovan	

VRIDPLATTOR OCH ÖVERFLYTTNINGSPLATTFORMAR

Vridplattor


Vridplatta Rondo

Leverantör:	Kvistberga Group AB	
Funktion:	Vridplattan är lämplig när användaren inte kan flytta med fötterna i samband med låg förflyttning. Försäljningsartikel.	
Art.nr & storlek	018 41, 32 cm 066 52, 38 cm	
Maxbelastning:	1000 kg	

Vridplatta Turntable


Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Funktion:	Används vid förflyttning i och ur bil samt på stol.	
Art.nr & storlek	362 21, 40 cm 330 84, 45 cm	
Max Brukarvikt:	150 kg	

Turner

Leverantör:	ETAC Sverige AB	
Funktion:	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.	
Art.nr & storlek	099 96, höjd 80–120 cm	
Max brukarvikt:	200 kg	

Överflyttningsplattformar

Molift Raiser

Leverantör:	ETAC Sverige AB	 <p>Molift Raiser Molift Raiser Pro</p>
Funktion:	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.	
Art.nr & storlek	Molift Raiser (utgått leverantör) 383 35, höjd 123 cm Molift Raiser Pro 414 10, höjd 120 cm	
Max brukarvikt:	Molift Raiser: 150 kg Molift Raiser Pro: 170 kg	
Övrigt:	Molift Pro är några cm smalare och har lägre instegshöjd (3,5 cm på Pro och 5 cm på Raiser).	



Tillbehör Molift

Trygghetsband med glidhylsa 383 05, stl S/M 383 06, stl L/XL	
Trygghetsband Molift Raiser Belt 444 08, stl S/M	
Ståplatta Molift Raiser Pro 424 24 Plattan är 9 cm hög	
Hälband 424 25	
Uppresningshandtag 429 43	

ReTurn

	Direct Healthcare Group	
Funktion:	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.	
Art.nr & storlek	175 53, 115 cm 351 25, 121 cm	
Max brukarvikt:	175 53, 150 kg 351 25, 205 kg	

Tillbehör ReTurn

<p>Returnbelt Är ett bälte med stöd under stussen för att undvika uppglidning.</p> <p>359 45, stl XXS, 65–80 cm 340 93, stl XS, 75–90 cm 326 11, stl S, 85–105 cm 169 55, stl M, 105–125 cm 173 68, stl L, 120–145 cm 328 07, stl XL, 140–165 cm</p>	
<p>Hälband</p> <p>349 81</p>	


Sara Steady

Leverantör:	Arjo	
Funktion:	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver mer stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning. OBS! Kan förskrivas om annan överflyttningsplattform inte fungerar eller medför risk. Får ej användas i dusch.	
Art.nr	372 64	
Max brukarvikt:	182 kg	


Sele finns som tillbehör, kontakta konsulent vid behov

ÖVRIGA FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL


FlexiGrip

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Art.nr	132 07	
Storlek:	9x175 cm, 8 handtag	
Max brukarvikt:	150 kg	
Användning:	Att underlätta förflyttning liggande till sittande i säng	

FlexiMove

Leverantör:	Direct Healthcare Group	 102x43 cm 20x60 cm
Art.nr & storlek	026 91, 102x43 cm, 4 handtag. 162 63, 150x53 cm, 6 handtag. 126 15, 20x60 cm, insida i nylon. 126 16, 20x60 cm, insida i sammet.	
Max brukarvikt:	150 kg	
Användning:	Används exempelvis vid uppresning från sittande, högre upp i säng.	


Antislip

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Art.nr	174 12	
Storlek:	45x38 cm	
Max brukarvikt:	-	
Användning:	Antihalkmatta för att underlätta vid förflyttning i säng. Försäljningsartikel.	

Fotpall

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Art.nr	184 75	
Storlek:	32x38x10 cm	
Max brukarvikt:	200 kg	
Användning:	Används vid sittande förflyttningar, vid toalettbesök samt vid positionering längre bak i stol/rullstol. Försäljningsartikel.	


MoveMaster

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Art.nr	149 44	
Storlek:	47x120 cm	
Max brukarvikt:	150 kg	
Användning:	Används för överflyttningar mellan säng och rullstol/mobil toastol.	


VÅRDBÄLTEN

Vårdbälten från Direct Healthcare Group finns i fyra varianter, alla har handtag både i vertikal och i horisontell riktning. Max brukarvikt 170 kg

Flexibelt, Hug


Leverantör:	Direct Healthcare Group			
Övrigt:	Sammetsklädd insida Rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren i stället för att glida upp under olika förflyttningssituationer.			
				
Modell	Flexibelt, Hug stl S	Flexibelt, Hug stl M	Flexibelt, Hug stl L	Flexibelt, Hug stl XL
Art.nr	436 25	436 26	436 27	436 28
Antal handtag	5	7	9	11
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm

Easybelt, Hug

Leverantör:	Direct Healthcare Group			
Övrigt:	Avtorkningsbar insida Rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren i stället för att glida upp under olika förflyttningssituationer.			
				
Modell	Easybelt, Hug stl XS	Easybelt, Hug stl S	Easybelt, Hug stl M	Easybelt, Hug stl L
Art.nr	436 29	436 30	436 31	436 32
Antal handtag	5 (3+2 rörliga)	7 (4+3 rörliga)	9 (5+4 rörliga)	11 (6+5 rörliga)
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm


EasyBelt

Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

Leverantör:	Direct Healthcare Group				
Övrigt:	Avtorkningsbar insida				
Modell	EasyBelt stl XS	EasyBelt stl S	EasyBelt stl M	EasyBelt stl L	
Art.nr	110 37	026 94	026 95	026 96	
Antal handtag	5	7	9	11	
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm	

FlexiBelt

Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

Leverantör:	Direct Healthcare Group				
Övrigt:	Sammetsklädd insida				
Modell	FlexiBelt stl S	FlexiBelt stl M	FlexiBelt stl L	FlexiBelt stl XL	
Art.nr	117 08	098 89	117 09	117 07	
Antal handtag	7	9	11	13	
Omkrets	60-100cm	70-120cm	100-160cm	115-175cm	