

Hjälpmiddelsentrum utbildar

# Förflyttningshjälpmedel



**Kursansvarig hjälpmedelskonsulent**

Helena Lagerbäck, telefon: 021-17 44 63

E-post: [helena.lagerback@regionvastmanland.se](mailto:helena.lagerback@regionvastmanland.se)

John Franzén, telefon: 021-17 46 43

E-post: [john.franzen@regionvastmanland.se](mailto:john.franzen@regionvastmanland.se)

Våren 2019

## Innehåll

Förskrivningsregler .....	3
Artikelansvar (tidigare nivåindelning): .....	3
Allmänna Förskrivningsregler .....	4
Glidhjälpmedel .....	4
Glidmattor .....	4
Easyslide .....	4
Readyslide .....	5
OnewaySlide .....	5
Segelduk .....	5
Glidlakan.....	6
Wendylett Komplet .....	6
Glidörngott Wendylean.....	6
Topsheet .....	6
Glidbrädor.....	7
Easyglide.....	7
Glider .....	7
Vridplattor och Överflyttningsskivor .....	8
Vridplattor .....	8
Vridplatta Rondo .....	8
Vridplatta Turntable.....	8
Turner .....	8
Vridsits Autoslide för stol/bil .....	9
Överflyttningsskivor.....	9
Molift Raiser .....	9
Return .....	10
Övriga Förflyttningshjälpmedel .....	10
FlexiGrip .....	10
FlexiMove .....	11
Komfortkudde .....	11
Antislip .....	11
Fotpall.....	12
Movemaster.....	12

## FÖRSKRIVNINGSGREGLER

---

### Artikelansvar (tidigare nivåindelning):

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekviritions hjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda, griptång och sängklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

## Allmänna Förskrivningsregler

Artikel	Kriterier/utprovningrutin	Kommentarer
Glidmattor	Underlätta förflyttningar i t ex säng/rullstol och överförflyttningar mellan t ex säng – rullstol.	Easyslide - hyres Readyslide – köpes Segelduk - Rekvisitionsartikel
Glidlakan	Underlätta vändningar i säng – 2-vägsglid.  Underlätta vändningar samt förflyttningar högre upp (och ner) i säng 4-vägs-glid.	Köpes  Köpes
Glidskivor	Överförflyttning mellan t ex säng-rullstol	Hyres
Vridplattor /överflyttningplattformar	Överförflyttning mellan t ex säng-rullstol	Rondo – köpes Övriga hyres
Övrigt	Repstege Flexi Move  Komfortkudde Fotpall Antislip  Vridsists för bil	Hyres  Köpes  Egenansvar

## GLIDHJÄLPMEDEL

### Glidmattor



#### Easyslide

<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	
<b>Lager:</b>	S-00304 är lagervara, resten är beställningsvaror.	
<b>Funktion:</b>	En glidmatta i täckjackmaterial.  Har 2-vägsglid.	
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	S-09888, 25x60 cm S-00304, 50x60 cm S-06668, 100x70 cm S-02419, 140x90 cm	
<b>Övrigt:</b>	OBS! Har utgått hos oss. Går att förskriva om det finns i lager. Välj Readyslide istället om det inte finns inne.	



### Readyslide

<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	
<b>Lager:</b>	S-32730 är lagervara, resten är beställningsvaror.	
<b>Funktion:</b>	Är en glidmatta i ett tunt glatt tyg. Har flervägsglid.	
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	S-32730, 70x70 cm S-36451, 110x70 cm S-33042, 195x70 cm	

### OnewaySlide


<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	 <p>Tubformad</p>  <p>Öppen med dragband</p>
<b>Lager:</b>	Beställningsvaror förutom S-16266 som är lagervara.	
<b>Funktion:</b>	1-vägsglid Används för att lättare komma längre bak i stol.	
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	Tubformad S-18426, 40x50 cm S-12305, 45x50 cm Öppen med dragband S-16796, 130x40 cm S-16266, 130x45 cm	
<b>Max Brukarvikt:</b>	150 kg	

### Segelduk


<b>Leverantör:</b>	Brehms Spilerdug ApS	 <p>Elastisk</p>  <p>Stum</p>
<b>Lager:</b>	Beställningsvara	
<b>Funktion:</b>	Säljs på 10 metersrulle, 1 m bred (rekvisitions artikel).	
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	S-39933, mjuk (röd) S-39932, mellan (grön) S-39931, standard (blå)	

## Glidlakan


### Wendylett Komplet

<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	 <p>2-vägsglid</p> <p>4-vägsglid</p>
<b>Lager:</b>	Beställningsvaror förutom S-12682, 12681 & 17033 som är lagervara.	
<b>Funktion:</b>	Glidlakan finns i två system, 2-vägsglid och 4-vägsglid. Dessa är försäljningsartiklar.	
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	2-vägsglid, Komplet S-12682, L140xB200 cm, 60 cm glidyta S-12681, L100xB200 cm, 60 cm glidyta S-16264, L200xB200 cm, 70 cm glidyta S-17212, L90xB200 cm, 70 cm glidyta  4-vägsglid, Komplet med hantag S-17033, L140xB200 cm, 60 cm glidyta S-17034, L200xB200 cm, 70 cm glidyta S-17431, B90xL200 cm, 70 cm glidyta, formsydd.	

### Glidörngott Wendylean




<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	
<b>Lager:</b>	Beställingsvara	
<b>Funktion:</b>	2-vägsglid. Är en försäljningsartiklar.	
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	S-14395, 50x60cm	

### Topsheet


<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	 <p>S-17498</p> <p>S-34476</p>
<b>Lager:</b>	Beställningsvara	
<b>Funktion:</b>	För vändning eller vid skötsel i säng tillsammans med tak lyft. Försäljningsartikel och används tillsammans med Wendylett eller Turnsheets.	
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	S-17498, 144x140 cm S-34476, 155x140 cm. Denna har friktionsreducerande underside.	
<b>Max Brukarvikt:</b>	250-300 kg	

## Glidbrädor

### Easyglide

<b>Leverantör:</b>	Handicare AB			
<b>Art.nr</b>	<b>Storlek &amp; Form</b>	<b>Max Brukarvikt:</b>	<b>Lager</b>	
S-11384	45x20cm, Rektangulär, ej vikbar	135-150 kg (Avgörs av hur stor yta det är som saknar understöd, 5- 10 cm)	Beställningsvara	
S-11385	60x25cm, Rektangulär, ej vikbar	Som ovan	Beställningsvara	
S-34344	45x20 cm, Oval	Maxvikt: 135 – 300 kg (Avgörs av hur stor yta det är som saknar understöd, Max 5cm)	Beställningsvara	
S-34744	85x39 cm, Oval	Som ovan	Beställningsvara	
S-02692	60x33 cm, Rektangulär, vikbar	Maxvikt: 135- 150 kg (Avgörs av hur stor yta det är som saknar understöd, 5- 10 cm)	Lagervara	
S-02693	75x33 cm, Rektangulär, vikbar	Som ovan	Lagervara	

### Glider

<b>Leverantör:</b>	Karo Pharma Sverige AB(fd Swereco)			
<b>Art.nr</b>	<b>Storlek &amp; Form</b>	<b>Max Brukarvikt:</b>	<b>Lager</b>	
S-00305	64x35cm inkl. anti-glidband	Maxvikt: 120 kg (max yta utan understöd är 20 cm)	Beställningsvara	

## VRIDPLATTOR OCH ÖVERFLYTTNINGSPLATTFORMAR

### Vridplattor


#### Vridplatta Rondo

<b>Leverantör:</b>	Kvistberga Group AB	
<b>Lager:</b>	Lagervaror	
<b>Funktion:</b>	Vridplattan är lämplig när användaren inte kan flytta med fötterna i samband med sittande förflyttning. Minskar på ett enkelt och effektivt sätt belastningen på knän och fötter vid överflyttning från och till t ex en stol, rullstol, säng.  Försäljningsartikel.	
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	S-01841, 32 cm S-06652, 38 cm	
<b>Max Brukarvikt:</b>	1000 kg	

#### Vridplatta Turntable

<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	
<b>Lager:</b>	S-33084 är Lagervara och S-36221 är beställningsvara.	
<b>Funktion:</b>	Används till sittande förflyttningar i och ur bil, samt på alla stolar.	
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	S-36221, 40 cm S-33084, 45 cm	
<b>Max Brukarvikt:</b>	150 kg	

#### Turner

<b>Leverantör:</b>	ETAC Sverige AB	
<b>Lager:</b>	Lagervara	
<b>Funktion:</b>	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.	
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	S-09996, höjd 80-120 cm	
<b>Max Brukarvikt:</b>	200 kg	




### Vridsits Autoslide för stol/bil


<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	
<b>Lager:</b>	-	
<b>Funktion:</b>	Klassas inte som personligt hjälpmedel utan bekostas av patienten själv. Autoslide finns på HMC för utlåning för att se om hjälpmedlet passar brukaren.	
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	Finns inte upplagd. Storlek: 46x46 cm	
<b>Max Brukarvikt:</b>	160 kg	

### Överflyttningsplattformar

#### Molift Raiser



<b>Leverantör:</b>	ETAC Sverige AB	
<b>Lager:</b>	Lagervara	
<b>Funktion:</b>	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.	
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	Molift Raiser S-38335, höjd 123 cm  Trygghetsband med glidhylsa S-38305, stl S/M S-38306, stl L/XL	
<b>Max Brukarvikt:</b>	150 kg	

## Return

<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	
<b>Lager:</b>	S-17553* är Lagervara och S-35125 är beställningsvara.	
<b>Funktion:</b>	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.	
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	S-17553, 115 cm S-35125, 121 cm	
<b>Max Brukarvikt:</b>	S-17553, 150 kg S-35125, 205 kg	


\*= Har utgått hos oss men finns oftast i lager.

## Tillbehör return

<p><b>Returnbält</b> Är ett bälte med stöd under stussen för att undvika uppglidning.</p> <p>S-35945, stl XXS, 65-80 cm S-34093, stl XS, 75-90 cm S-32611, stl S, 85-105 cm S-16955, stl M, 105-125 cm S-17368, stl L, 120-145 cm S-32807, stl XL, 140-165 cm</p>	
<p><b>Hälband</b></p> <p>S-34981</p>	

## ÖVRIGA FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL


### FlexiGrip

<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	
<b>Sesam.nr</b>	S-13207	
<b>Storlek:</b>	9x175 cm, 8 handtag	
<b>Lager:</b>	Lagervara	
<b>Max brukarvikt:</b>	150 kg	
<b>Användning:</b>	Underlättar förflyttning i säng	


## FlexiMove

<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	 <p>102x43 cm</p> <p>20x60 cm</p>
<b>Sesam.nr &amp; storlek</b>	S-02691, 102x43 cm, 4 handtag. S-16263, 150x53 cm, 6 handtag. S-12615, 20x60 cm, insida i nylon. S-12616, 20x60 cm, insida i sammet.	
<b>Lager:</b>	Beställningsvaror	
<b>Max brukarvikt:</b>	150 kg	
<b>Användning:</b>	Hjälp vid många tillfällen, t ex upprensning från sittande, högre upp i säng eller lyfta ben vid förflyttning i säng.	


## Komfortkudde

<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	
<b>Sesam.nr</b>	S-16956	
<b>Storlek:</b>	45x50 cm	
<b>Lager:</b>	Beställningsvara	
<b>Max brukarvikt:</b>	150 kg	
<b>Användning:</b>	Kudde att placera under benen för att undvika nerglidning vid liggande med höjd huvuddel.	


## Antislip

<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	
<b>Sesam.nr</b>	S-17412	
<b>Storlek:</b>	45x38 cm	
<b>Lager:</b>	Beställningsvara	
<b>Max brukarvikt:</b>	-	
<b>Användning:</b>	Antihalkmatta för att underlätta vid förflyttning i säng.	

## Fotpall

<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	
<b>Sesam.nr</b>	S-18475	
<b>Storlek:</b>	32x38x10 cm Cellplast	
<b>Lager:</b>	Beställningsvara	
<b>Max brukarvikt:</b>	200 kg	
<b>Användning:</b>	Används vid sittande förflyttningar eller högre upp i säng.	

## Movemaster

<b>Leverantör:</b>	Handicare AB	
<b>Sesam.nr</b>	S-14944	
<b>Storlek:</b>	47x120 cm	
<b>Lager:</b>	Beställningsvara	
<b>Max brukarvikt:</b>	150 kg	
<b>Användning:</b>	Används för överflyttningar mellan säng och rullstol/mobil toastol.	