

Hjälpmiddelsentrum utbildar

Gånghjälpmedel

-vuxensortiment



Ansvarig hjälpmedelskonsulent

2026

Britta Johnsson, telefon: 021-174463

hmc.forflyttningshjalpmedel@regionvastmanland.se

Åsa Pettersson, telefon: 021-176867

hmc.forflyttningshjalpmedel@regionvastmanland.se

Innehåll

Gånghjälpmedel	4
Rollatorer aktivt sortiment.....	4
Rebel	4
Carl-Oskar	4
Fellow	7
Topro Troja original.....	8
Rollatorer, utgående sortiment (köps inte in).....	9
Futura	9
Futura med enhandsbroms.....	9
Futura med HP-handtag	9
Futura med tvärhandsgrepp.....	10
Gemino 20	11
Bakåtvända rollatorer till vuxen patient	11
RA-rollatorer	12
RA-rollator Rebel, Staffan och Carl-Oskar	12
Alpha Basic RA.....	13
Gåbord med patientbroms.....	14
Gåbord Rebel, Staffan och Carl-Oskar	14
Alpha Basic GB.....	14
Gåbord Bure.....	15
Bure el, Bure gasfjäderhöjt, Bure double 2.0 samt Bure space .	15
Bure Rise & go.....	18
Övriga Gånghjälpmedel.....	20
Fyrpunktsstöd.....	20
Betastöd	20
RA-kryckor	20
Gånghjälpmedel för tyngre brukare	21
Rollator Carl-Oskar, förstärkt modell.....	21
Server HD	21
Maxi plus.....	22
Gåbord Bure el XL	22
RA-Support	23
Kryckkäpp	24
Fyrpunktsstöd	24
Betastöd	24
Gåstolar (urval)	25
Meywalk 2000.....	25
Meywalk 4 (tidigare MK4)	25
Mustang.....	25
Dynamic Pacer	25
Vårdbälten	26
Modeller	26
Flexibelt Hug	26
Easybelt Hug.....	27

EasyBelt.....	27
Modeller	27
FlexiBelt	28
Modeller	28

GÅNGHJÄLPMEDEL

Rollatorer aktivt sortiment

Vid förskrivning av **rollator nummer två** ska artikel 09547 läggas (låneavgift 500kr). Om det vid utprovning är osäkert om patienten kommer att behålla två rollatorer, ska låneavgiften registreras i samband med uppföljning. **OBS! Kom ihåg att informera patienten om avgiften.**

Rebel

Leverantör www.humancare.se

Standardrollator och ska väljas i första hand för inom- och utomhusbruk.

Rollator markerad med fet stil är standardmodell.

Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
148 85 Rebel 57 Smal	75-93 cm	57 cm	62 cm	37 cm	9,5 kg	140 kg
148 87 Rebel 62 *, **	75-93 cm	62 cm	62 cm	42 cm	9,6 kg	140 kg
419 53 Rebel 62 Låg	68-86 cm	62 cm	54 cm	42 cm	9,4 kg	140 kg
364 58 Rebel 67 Bred	75-93 cm	67 cm	62 cm	47 cm	9,7 kg	140 kg
419 38 Rebel 67 Hög+bred	82-100 cm	67 cm	62 cm	47 cm	9,7 kg	140 kg

* Finns som färdig med enhandsbroms. Artikel.nr 421 01 för höger och 421 02 för vänster.

** Artikelnummer för rollatorer anpassade med hemiplegihandtag/tvärhandtag finns på nästa sida.

Carl-Oskar

Leverantör www.humancare.se

För utomhusbruk.

Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sitsbredd	Vikt	Max brukarvikt
327 68 C-O 57 smal	77-95 cm	57 cm	64 cm	37 cm	11,1 kg	150 kg
105 34 C-O 62 std *, **	77-95 cm	62 cm	64 cm	42 cm	11,3 kg	150 kg
419 54 C-O 62 hög	82-100 cm	62 cm	64 cm	42 cm	11,3 kg	150 kg
105 35 C-O 67	77-95 cm	67 cm	64 cm	47 cm	11,4 kg	150 kg
113 13 C-O 72	77-95 cm	72 cm	64 cm	52 cm	11,5 kg	150 kg









* Finns som färdig med enhandsbroms; höger: 331 02 vänster: 331 03

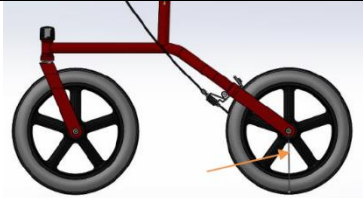


** Artikelnummer för rollatorer anpassade med hemiplegihandtag/tvärhandtag finns på nästa sida.

OBS: Det finns ingen Rollator Carl-Oskar med lägre handtag eller lägre sitthöjd.



Tillbehör Rebel och Carl-Oskar

<p>Ryggband Art.nr 142 01 stl 57, 62, 67 cm Art.nr 454 75 stl 72</p>	
<p>Enhandsbroms Art.nr 151 52</p>	
<p>Syrgashållare Art.nr 117 05</p>	
<p>Släpbroms Art.nr 129 63</p>	
<p>Steghjälp Underlättar att ta sig över trottoarkant etc. Art.nr 327 58</p>	
<p>Underarmsstöd/hemiplegihandag <i>Obs! Får ej monteras på Rebel/ C-O 57 cm bred</i> Art.nr 393 17, Vänster Art.nr 393 18, Höger Färdiga art.nr för rollator med hemiplegihandtag monterat: 462 94 Rebel 62 med hemi hö, enhandsbroms vä 462 95 Rebel 62 med hemi vä, enhandsbroms hö</p>	
<p>Tvärhandtag med enhandsbroms Art.nr: 449 41 bromsas med vänster hand Art.nr: 469 77 bromsas med höger hand <i>Obs passar endast 62 cm bred rollator.</i> Färdiga art.nr för rollator med tvärhandtag monterat: 462 92 Rebel 62 med enhandsbroms hö 462 93 Rebel 62 med enhandsbroms vä 465 76 C-O 62 med enhandsbroms hö 465 77 C-O 62 med enhandsbroms vä <i>Obs att sitsen ej går att sitta på när tvärhandtaget är monterat!</i></p>	
<p>Mjukgrepp (är inte tydligt mjukare än std handtagen) Art.nr 391 78, kommer som styck. Monteras av tekniker (arbetsorder).</p>	

<p>Antistat wire till Carl-Oskar & Rebel</p> <p>Art.nr 406 09</p> <p>Motverkar att patienten får stötar av rollatorn. Arbetsorder till tekniker för montering</p>	
<p>Droppställning</p> <p>Art.nr 427 47</p> <p>Tre motvikter medföljer för montering.</p>	
<p>Luftpumpade Hjul Carl-Oskar</p> <p>OBS! Inget som rekommenderas.</p>	<p>Betalas av brukaren (egenansvar)</p> <p><u>Kostnad (cirkapris)</u></p> <p>1250 kr (montering) + Hjul (490*4)</p> <p>= 3210 kr</p>
<p>Dragögla till ihopfällningsmekanik, reservdel</p> <p>Art.nr 186 49</p> <p>Vid enskilda patientärenden; skriv arbetsorder till tekniker och be att få reservdelen skickad.</p>	
<p>Korg, bricka, väska och kryckkäppshållare</p>	<p>Betalas av brukaren (egenansvar)</p>

Fellow

Leverantör www.humancare.se

Framåtvända handtag. Finns på avtal igen, kan förskrivas om vår standardrollator







Rebel inte fungerar.



Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
327 69 Fellow std	77-95 cm	63 cm	59 cm	44 cm	8 kg	150 kg
327 70 Fellow låg	68-80,5 cm	62 cm	50,5 cm	44 cm	7,7 kg	140 kg
327 71 Fellow hög	82-100 cm	62,5 cm	64 cm	44 cm	8,1 kg	130 kg

Tillbehör Fellow

Ryggband Art.nr 327 53	
Enhandsbroms Art.nr 327 54 Höger Art.nr 327 55 Vänster	
Syrgashållare Art.nr 108 18	
Släpbroms Art.nr 343 95 (par)	
Steghjälp Art.nr 327 52	
Droppställning Art.nr 134 41	
Tvåhandtag med enhandsbroms (bromsas på vänster sida) Art.nr 455 59	
Korg, bricka, väska och kryckkåpphållare	Betalas av brukaren (egenansvar)

Topro Troja original

Leverantör: www.topromobility.se

Lättviktsrollator, kan förskrivas om vår standardrollator Rebel inte fungerar.

Levereras utan korg.



Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
457 63 Troja original X (extra small)	64-79 cm	51 cm	52 cm	36 cm	6,1 kg	130 kg
457 62 Troja Original S	69-86 cm	60 cm	55 cm	45,5 cm	6,6 kg	165 kg
449 85 Troja Original M passar personer med längd 150- 200 cm	78–100 cm	60 cm	62 cm	45,5 cm	6,8 kg	165 kg

Tillbehör Topro:

Enhandsbroms Art.nr: 454 69	
Ryggband Kort, 68 cm: Art.nr: 454 72 Långt, 76 cm: Art.nr: 454 71	
Droppställning Art.nr: 454 68	
Släpbroms Art.nr: 454 70 (par)	
Korg, bricka, väska och kryckkäpphållare	Betalas av brukaren (egenansvar)

Rollatorer, utgående sortiment (köps inte in)

Futura

Leverantör www.invacare.se/sv

Ej längre förskrivningsbar i websesam. Går att förskriva via uppladdningstjänst men med trolig väntetid.



Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
093 89 Futura 45	64-79 cm	60 cm	47,5 cm	42 cm	7,6 kg	150 kg
093 88 Futura 52	71-85 cm	61 cm	54,5 cm	42 cm	7,8 kg	150 kg
093 86 Futura 60	79-93 cm	61 cm	62 cm	42 cm	8 kg	150 kg
093 87 Futura 68	86-101,5 cm	64 cm	70,5 cm	42 cm	8,2 kg	150 kg

Futura med enhandsbroms

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång.

Modell	Art. nr broms vänster sida	Art.nr broms höger sida
Futura 52	364 15	364 14
Futura 60	329 09	329 08
Futura 68	364 33	364 32



Futura med HP-handtag

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång.

Modell	Art.nr HP-handtag vänster sida	Art.nr HP-handtag höger sida
Futura 52	154 53	154 52
Futura 60	120 57	120 56
Futura 68	154 55	154 54



Futura med tvärhandsgrepp

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång.

Modell	Tvärhandsgrepp, bromsas med höger hand, art.nr
Futura 60	329 51
Futura 68	329 53

Modell	Tvärhandsgrepp, bromsas med vänster hand, art.nr
Futura 60	329 50
Futura 68	329 52



Tillbehör Futura:

Ryggband Art.nr 097 92	
Enhandsbroms Art.nr 100 04 Höger Art.nr 100 05 Vänster	
Syrgashållare Art.nr 139 85	
Släpbroms Art.nr 115 41	
Steghjälp Underlättar att ta sig över trottoarkant etc. Art.nr 128 01	
Korg, bricka, väska och kryckkäppshållare	Betalas av brukaren (egenansvar)

Gemino 20

Leverantör www.sunrisemedical.se

Lättviktsrollator. Levereras utan korg

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång.



Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
377 23 Gemino 20, S	65-77 cm	55 cm	48 cm	42 cm	6,6 kg	125 kg
377 22 Gemino 20	78-100 cm	60 cm	62 cm	47 cm	7,1 kg	150 kg
377 24 Gemino 20, M	69-88 cm	60 cm	55 cm	47 cm	7 kg	130 kg

Tillbehör Gemino 20

Enhandsbroms Art.nr 377 25	
Ryggband Art.nr 431 47	
Droppställning Art.nr 432 30	
Korg, bricka, väska och kryckkärphållare	Betalas av brukaren (egenansvar)

Bakåtvända rollatorer till vuxen patient

Kontakta konsulent för sortiment, utprovning och förskrivning.

RA-rollatorer

RA-rollator Rebel, Staffan och Carl-Oskar

Leverantör www.humancare.se



Rebel RA



Rebel RA med sits



Staffan (endast inomhus)



Carl-Oskar

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Vikt	Max brukarvikt
419 37 Rebel RA 67 Låg *	86–104 cm	67 cm	11,3 kg	125 kg
462 77 Rebel RA 67 Låg med sits	86–104 cm	67 cm		125 kg
124 51 Rebel RA 67 std **	106–124 cm	67 cm	11,5 kg	125 kg
462 68 Rebel RA 67 STD med sits	106–124 cm	67 cm		125 kg
106 63 Staffan RA Låg Utgående	86–108 cm	59 cm	10,3 kg	90 kg
419 26 C-O RA 67 låg	95-113 cm	67 cm	13,0 kg	125 kg
462 79 C-O RA 67 låg med sits	95-113 cm	67 cm		125 kg
105 36 C-O RA 67 std ***	107-126 cm	67 cm	13,2 kg	125 kg
462 78 C-O RA 67 std med sits	107-126 cm	67 cm		125 kg
359 73 C-O RA 72	107-126 cm	72 cm	13,3 kg	125 kg

*= Finns som färdig med höger och vänster enhandsbroms, 427 00 & 427 01

**= Finns som färdig med höger och vänster enhandsbroms, 332 04 & 332 05

***= Finns som färdig med höger och vänster enhandsbroms, 344 70 & 344 71

För tillbehör se nästa sida

Tillbehör:

Se tillbehör Rebel och Carl-Oskar

Övriga tillbehör	Kommentar
Armstödsrör kort 67 art.nr 326 32 Armstödsrör kort 72 art.nr 326 38	Sänker min och max höjden med 15 cm. OBS! kommer i styck! Passar ej till låga modeller.
Enhandsbroms artikelnummer 151 53	Förskrivs via uppladdningstjänsten (ange vilken sidan bromsen ska monteras på).
Sits med grind 67 artikelnummer 172 08 Sits med grind 72 artikelnummer 419 09	Förskrivs via uppladdningstjänsten. Kan vara svår att sitta på pga underarmsstöden.

Alpha Basic RA

Leverantör www.invacare.se

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång, ersättningskedja aktiveras om ej finns i lager.



Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
129 61 Alpha Basic*	104-122 cm	66 cm	62 cm	43 cm	11,3 kg	125 kg

* Finns som färdig med höger och vänster enhandsbroms, art.nr 152 82 & 152 81

Tillbehör Alpha Basic RA:

Se tillbehör rollator Futura förutom:

Enhandsbroms vä Art.nr 133 75 Enhandsbroms hö Art.nr 133 74	Skriv arbetsorder till tekniker för montering.
--	--

Gåbord med patientbroms

Gåbord Rebel, Staffan och Carl-Oskar

Leverantör: www.humancare.se



Rebel



Staffan (endast inomhus)



Carl-Oskar

Art.nr	Höjd	Bredd	Vikt	Max brukarvikt
104 88 Staffan låg Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång	86-108 cm	62 cm	11,7 kg	90 kg
419 39 Rebel Låg	86-104 cm	67 cm	12,8 kg	125 kg
124 50 Rebel STD	104-122 cm	67 cm	12,8 kg	125 kg
105 37 C-O 67	107-126 cm	67 cm	14,7 kg	125 kg
367 92 C-O 72	107-126 cm	72 cm	14,8 kg	125 kg

Tillbehör:

Se tillbehör till rollator Rebel & Carl-Oskar och RA-rollator Rebel, Staffan och Carl-Oskar. OBS: sits kan inte sitta på pga gåbordsöverdelen.

Alpha Basic GB

Leverantör: www.invacare.se

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång, ersättningskedja aktiveras om ej finns i lager.

Art.nr	Höjd	Bredd	Vikt	Max brukarvikt
138 24 Alpha basic	99-126 cm	65 cm	12,8 kg	125 kg

Tillbehör:

Se tillbehör Futura & Alpha Basic RA



Gåbord Bure

Leverantör: www.directhealthcaregroup.com

Bure el, Bure gasfjäderhöjt, Bure double 2.0 samt Bure space



Bure el



Bure gasfjäderhöjt



Bure double 2.0






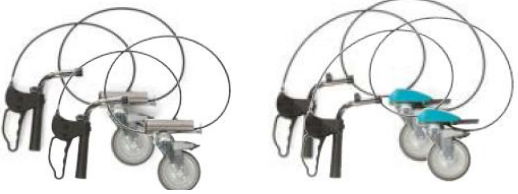
Bure space



Modeller

Art.nr	Höjd	Bredd	Vikt	Max brukarvikt	Golv - underrede
437 54 Bure el Hjul 125 mm	90 - 130 cm	78 cm	25 kg	150 kg	Ca 22 cm
437 81 Bure el Hjul 75 mm	85 - 125 cm	78 cm	25 kg	150 kg	Ca 17 cm
436 71 Bure double 2.0 Hjul 125 mm	90 - 130 cm	64 - 95 cm	29 kg	150 kg	Ca 19 cm
430 82 Bure & double 2.0 Hjul 75 mm	85 - 125 cm	64 - 95 cm	29 kg	150 kg	Ca 14,5 cm
323 46 Bure gasfjäderhöjt Hjul 125 mm	90 - 130 cm	78 cm	19 kg	150 kg	
437 86 Bure el low Hjul 75 mm	70 - 95 cm	78 cm	-	150 kg	Ca 22 cm
354 95 Bure el smal Hjul 125 mm	90 - 130 cm	66 cm	24 kg	150 kg	Ca 22 cm
454 06 Bure space 125 mm hjul Kontakta konsulent	90 - 130 cm	78 cm		150 kg	

OBS: Artikelnummer för färdiga gåbord med handbroms se nästa sida under handbromstillats

Tillbehör

<p>Syrgashållare</p> <p>Art.nr 180 37</p>	
<p>Droppställning</p> <p>Art.nr 364 06</p>	
<p>Höj och sänkreglage i handtaget</p> <p>Kontakta konsulent, finns enstaka exemplar. Utgått leverantör.</p>	
<p>Handbromstillsats Bure manuell/gas/el/smal/XL</p> <p>75 mm hjul: Art.nr 460 94 125 mm hjul: Art.nr 410 35</p> <p>Bure Double 2.0 75 mm hjul: Art.nr 383 43 125 mm hjul: Art.nr 383 44</p> <p>OBS! Alla tillsatser bygger 0,5–1 cm extra i sidled. Kan inte monteras på gåbord med höj- och sänkreglage i handtaget. Passar bara till gåbord som är tillverkade från 2016 och framåt. Kontakt med konsulent krävs.</p> <p>Följande gåbord finns färdiga med handbroms (två händer): Art.nr: 344 35 Bure El 125 mm hjul Art.nr: 361 49, 461 30 Bure smal 125 mm hjul Art.nr: 423 46 Bure Double 2.0 125 mm hjul Art.nr: 431 77 Bure Double 2.0 75 mm hjul</p>	 <p>41035 38344</p>

<p>Ståplatta till Bure Double 2.0 (Rise & Go double)</p> <p>Svängbara hjul Art.nr 382 74 Kort m svängbara hjul Art.nr 382 76 Lång m svängbara hjul</p> <p>Raka hjul (utgående, levereras i mån av tillgång) Art.nr 368 82 Kort m raka hjul Art.nr 368 84 Lång m raka hjul</p>	
<p>Ståplatta till Övriga Bure (Ej XL eller Double 2.0)</p> <p>Svängbara hjul Art.nr 382 75 Kort m svängbara hjul Art.nr 382 77 Lång m svängbara hjul</p> <p>Raka Hjul (utgående, levereras i mån av tillgång) Art.nr 368 83 Kort m raka hjul Art.nr 368 85 Lång m raka hjul</p>	
<p>Hälband till ståplatta</p> <p>Art.nr 405 70</p>	
<p>Gångträningsssele</p> <p>Art.nr 397 49 Gångträningsssele Bure std inkl fästen Passar till: Alla utom Bure El XL</p> <p>Max Brukarvikt: 150 kg</p>	
<p>Sidostöd</p> <p>Art.nr 155 78 Passar till: Alla modeller</p>	
<p>Knästöd</p> <p>Art.nr 393 63 OBS! Passar ej Bure XL</p>	
<p>Hjul</p> <p>Art.nr 376 42, 75 mm Art.nr 180 02, 125 mm</p> <p>Välj i första hand redan färdigt gåbord med önskad storlek på hjul. Hjulen kommer som styck och måste läggas som komponenter för att bli påmonterade.</p>	



Bure Rise & go

Leverantör: www.directhealthcaregroup.com

Komponenter som ingår: Ståplatta art.nr 382 75 (utan benspridning) eller 382 74 (till double) och uppresningssele art.nr 338 60 (strl M). Knästöd ingår alltid och går ej att välja bort.

Modeller

Art.nr	Höjd	Bredd	Max brukarvikt	Golv - underrede
336 26 Ej benspridning 125 mm hjul (Utgående)	97 - 137 cm	77 cm	150 kg	19 cm
437 55 Bure double Rise & Go 75 mm hjul	86 - 126 cm	67 - 106 cm	150 kg	14,5 cm
454 74 Bure double Rise & Go 125 mm hjul	91 - 131 cm	67 - 106 cm	150 kg	19,5 cm

Tillbehör

<p>Uppresningsseklar (strl M ingår, byt till annan v.b):</p> <p>Art.nr 338 61 Storlek S, Midjemått 95–105 cm Art.nr 338 60 Storlek M, Midjemått 105–120 cm Art.nr 338 59 Storlek L, Midjemått 110–140 cm Art.nr 381 68 Storlek XL, Midjemått 130–160 cm</p> <p>Max Brukarvikt: 150 kg</p>	
<p>Gåsele</p> <p>Art.nr 389 86 Gåträningsskit med fästen att fästa på uppresningssele</p> <p>Max Brukarvikt: 150 kg</p>	
<p>Sidostöd</p> <p>Art.nr 155 78 Passar till: Alla modeller</p>	
<p>Syrgashållare</p> <p>Art.nr 180 37</p>	
<p>Droppställning</p> <p>Art.nr 364 06</p>	

<p>Ståplatta till Bure Double 2.0 (Rise & Go double)</p> <p>Svängbara hjul Art.nr 382 74 Kort m svängbara hjul Art.nr 382 76 Lång m svängbara hjul</p> <p>Raka hjul (utgående, levereras i mån av tillgång) Art.nr 368 82 Kort m raka hjul Art.nr 368 84 Lång m raka hjul</p>	
<p>Ståplatta till Övriga Bure (Ej XL eller Double 2.0) (rise & go utan benspridning)</p> <p>Svängbara hjul Art.nr 382 75 Kort m svängbara hjul Art.nr 382 77 Lång m svängbara hjul</p> <p>Raka Hjul (utgående, levereras i mån av tillgång) Art.nr 368 83 Kort m raka hjul Art.nr 368 85 Lång m raka hjul</p>	
<p>Hälband till ståplatta</p> <p>Art.nr 405 70</p>	
<p>Hjul</p> <p>Art.nr 376 42, 75 mm Art.nr 180 02, 125 mm (standard)</p> <p>Välj i första hand redan färdigt gåbord med önskad storlek på hjul. Hjulen kommer som styck och måste läggas som komponenter för att bli påmonterade.</p>	
<p>Handbromstillsats</p> <p>Art.nr 410 36 Handbromstillsats Bure Rise & Go (ej benspridning) 125 mm hjul Art.nr 410 39 Handbromstillsats Bure Rise & Go double 125 mm hjul</p> <p>Art.nr 441 87 Handbromstillsats Bure Rise & Go double 75 mm hjul</p> <p>OBS! Passar bara till gåbord som är tillverkade från 2016 och framåt. Kontakt med konsulent krävs.</p>	

ÖVRIGA GÅNGHJÄLPMEDEL

Fyrpunktsstöd

Leverantör: www.swereco.se

Nya doppskor går att få från HMC.

Modeller

Art.nr	Höjd	Vikt	Max brukarvikt
036 36 Vuxen	77–97 cm	1,1 kg	120 kg
065 37 Junior	63–74 cm	1,0 kg	120 kg
104 47 Barn	48,5–58,5 cm	0,7 kg	50 kg



Betastöd

Leverantör: www.swereco.se

OBS: Får inte användas på blött underlag (dusch).

Nya doppskor går att få från HMC.

Modeller

Art.nr	Höjd	Bred	Djup	Vikt	Max brukarvikt
001 23 Vuxen	85–97 cm	60 cm	48 cm	1,7 kg	120 kg
001 24 Junior	73–85 cm	60 cm	51 cm	1,6 kg	120 kg
383 66 Barn	60–72 cm	51 cm	47 cm	1,5 kg	70 kg



Axillarkryckor

Leverantör: www.swereco.se

Nya doppskor går att få från HMC.

Art.nr	Höjd	Max brukarvikt
410 46	115–135 cm	120 kg
405 52 lång	134,5–154,5 cm	120 kg



RA-kryckor

Leverantör: www.swereco.se

Nya doppskor går att få från HMC.

Art.nr	Höjd	Max brukarvikt
001 09	95–118 cm	140 kg



Gånghjälpmedel för tyngre brukare

Rollator Carl-Oskar, förstärkt modell

Leverantör: www.humancare.se



Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
171 85 C-O 62 förstärkt	77–95 cm	62 cm	64 cm	42 cm	13,2 kg	275 kg
109 35 C-O 67 förstärkt	77–95 cm	67 cm	64 cm	47 cm	13,3 kg	275 kg
164 82 C-O 72 förstärkt	77–95 cm	72 cm	64 cm	52 cm	13,4 kg	275 kg

Tillbehör

Se tillbehör Carl-Oskar.

Server HD

Leverantör: www.wihlbackamobility.se



	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
458 46 Large	75–102 cm	68 cm	62 cm	48 cm	7,4 kg	200 kg
Medium	67-85 cm	68 cm	53 cm	48 cm	7,1 kg	200 kg

Maxi plus

Leverantör: www.invacare.se

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång, ersättningskedja aktiveras om ej finns i lager.



Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
151 98 Maxi + 55	72–89,5 cm	70 cm	55 cm	52 cm	9,8 kg	200 kg
151 99 Maxi + 65	81-98,5 cm	70 cm	65 cm	52 cm	10,3 kg	200 kg

Tillbehör:

Samma tillbehör som till Futura förutom:

Ryggband Art.nr 125 42	
Enhandsbroms Art.nr 077 03 Höger Art.nr 079 01 Vänster	

Gåbord Bure el XL

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Max brukarvikt	Golv - underrede
419 19 Bure El XL 125 mm hjul	91-131 cm	88 cm	240 kg	Ca 22 cm
75mm hjul Kontakta konsulent	86-126 cm	88 cm	240	Ca 17 cm



Tillbehör

Handbromstillsats Art.nr 410 35 Bure XL 125 mm hjul Art.nr 460 94 Bure XL 75 mm hjul OBS! Alla tillsatser bygger 0,5–1 cm extra i sidled. Kan inte monteras på gåbord med höj- och sänkreklage i handtaget Passar bara till gåbord som är tillverkade från 2016 och framåt. Kontakt med konsulent krävs.	
---	--

Syrgashållare Art.nr 180 37	
Ståplatta till Bure XL Utgått leverantör, kan beställas i mån av tillgång Art.nr 347 28	
Sidostöd Art.nr 155 78	
Hjul Art.nr 376 42, 75 mm Art.nr 180 02, 125 mm (standard) Hjulen kommer som styck och måste läggas som komponenter för att bli påmonterade.	

RA-Support

Leverantör: www.superiorsweden.com

RA-rollator, levereras utan korg.

Obs! Underarmsstöden går ej att flytta in.



Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
399 58 RA Support 71	100-130 cm	71 cm	50 cm	50,8 cm	17 kg	200 kg

Kryckkäpp

Leverantör: www.superiorsweden.com

Nya doppskor går att få från HMC

Art.nr	Höjd	Max brukarvikt
346 70 Kryckkäpp Superior vänster	68–110 cm	325 kg
346 69 Kryckkäpp Superior höger	-"-	-"-



Fyrpunktsstöd

Nya doppskor går att få från HMC

Art.nr	Höjd	Vikt	Max brukarvikt
396 01	71–93 cm	0,9 kg	270 kg



Betastöd

Nya doppskor går att få från HMC

Art.nr	Höjd	Bredd		Vikt	Max brukarvikt
338 86	76–101 cm	71 cm	-	3 kg	270 kg



Gåstolar (urval)

Förskrivs i samråd med konsulent

För komplett sortiment och mer information om storlekar och tillbehör finns i förskrivarmaterial "Gång- och ståhjälpmedel barn".

Meywalk 2000

Utgående artikel, köps inte in.

Leverantör: www.maydayaid.se

Standardutrustning: antitippstöd, uppåtböjd bålstödsring, fjädrar, sadel och rumpstopp.



Meywalk 4 (tidigare MK4)

Leverantör: www.maydayaid.se

Standardutrustning: antitippstöd, bålstödsring, fjädrar, sadel, rumpstopp, riktningsspärr, parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.



Mustang

Leverantör: www.etac.se

Standardutrustning är bålstöd och sits.



Dynamic Pacer

Leverantör: www.schuchmann.se

Standardutrustning: 140 mm länkhjul med parkeringsbroms, släpbroms, backspärr och riktningsspärr.

Standard: För användning inom- och begränsad utomhusmiljö (plant underlag).

Kombi: För inom- och utomhusbruk (större hjul).



VÅRDBÄLTEN


Leverantör: www.directhealthcaregroup.com

Modeller

Finns i fyra varianter, alla med handtag i vertikal och i horisontell riktning. **Max brukarvikt 170 kg.**


Flexibelt Hug

Rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren i stället för att glida upp under olika förflyttningssituationer.

Leverantör:	Direct Healthcare Group			
Övrigt:	Sammetklädd insida Rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren i stället för att glida upp under olika förflyttningssituationer.			
				
Modell	Flexibelt, Hug stl S	Flexibelt, Hug stl M	Flexibelt, Hug stl L	Flexibelt, Hug stl XL
Art.nr	436 25	436 26	436 27	436 28
Antal handtag	7 (4+3 rörliga)	9 (5+4 rörliga)	11 (6+5 rörliga)	13 (7+6 rörliga)
Omcrets	60-100cm	70-120cm	100-160cm	115-175cm

Easybelt Hug


Rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren i stället för att glida upp under olika förflyttningssituationer.

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Övrigt:	Avtorkningsbar insida	

Modell	Easybelt, Hug stl XS	Easybelt, Hug stl S	Easybelt, Hug stl M	Easybelt, Hug stl L
Art.nr	436 29	436 30	436 31	436 32
Antal handtag	5 (3+2 rörliga)	7 (4+3 rörliga)	9 (5+4 rörliga)	11 (6+5 rörliga)
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm

EasyBelt

Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Övrigt:	Avtorkningsbar insida	


Modeller

Modell	EasyBelt stl XS	FlexiBelt stl S	FlexiBelt stl M	FlexiBelt stl L
Art.nr	110 37	026 94	026 95	026 96
Antal handtag	5	7	9	11
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm

FlexiBelt

Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

Sammetsklädd insida.

Leverantör	Direct health care group	
Övrigt:	Sammetsklädd insida	

Modeller

	FlexiBelt stl S	FlexiBelt stl M	FlexiBelt stl L	FlexiBelt stl XL
Art.nr	117 08	098 89	117 09	117 07
Antal handtag	7	9	11	13
Omkrets	60-100 cm	70-120 cm	100-160 cm	115-175 cm