


Hjälpmedelscentrum utbildar
Område Kommunikation-Kognition

GPS-larm

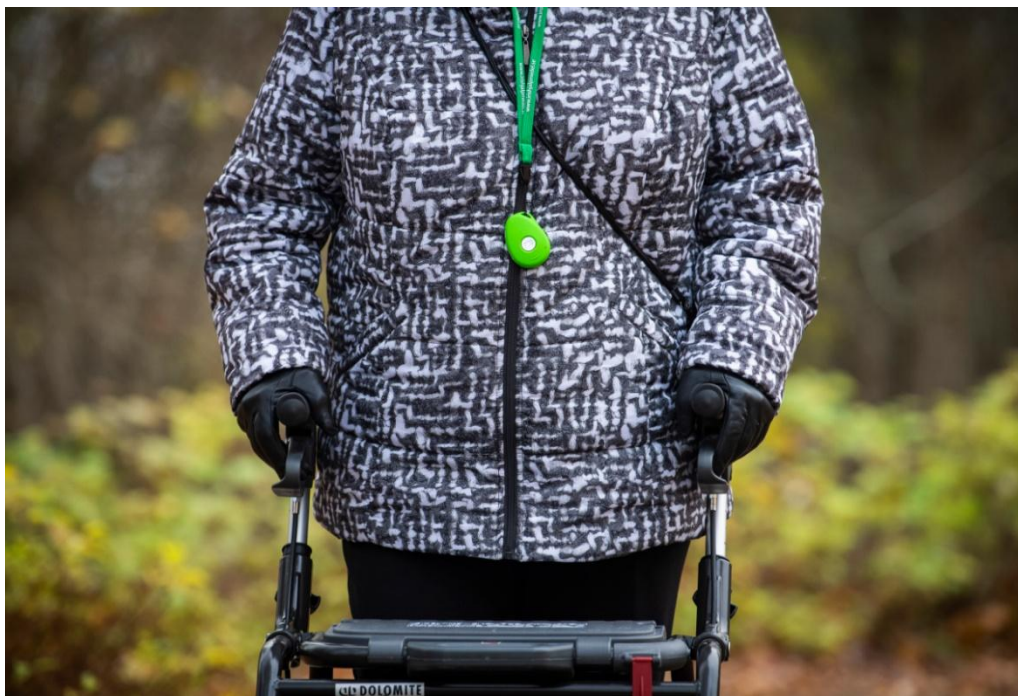

HJÄLPMEDELSCENTRUM

Hjälpmedelscentrum
Signalistgatan 2
721 31 Västerås
Kundtjänst: 021-17 30 48
regionvastmanland.se/hmc

Ulrika Eriksson Hjälpmedelskonsulent ulrika.eriksson@regionvastmanland.se	Telefon: 021 -17 49 19
Frida Foborg Hjälpmedelskonsulent frida.foborg@regionvastmanland.se	Telefon: 021 -17 57 09
Michael Larsson Rehabingenjör michael.larsson@regionvastmanland.se	Telefon: 021 - 17 30 48
Juha Goman Hjälpmedelstekniker juha.goman@regionvastmanland.se	Telefon: 021 - 17 30 48

Innehåll

Hjälpmedelshandboken Kriterier för förskrivning	4
Konsumentprodukt	5
Förskrivning och utprovning	5
Information inför och vid förskrivning av GPS-larm.....	5
Sortiment.....	6
Posifon Minifinder Pico Pro	7
Posifon Minifinder Nano 4G	7
Posifon Active.....	8
GPS SmartSole.....	9
Posifon Zembro	9

Hjälpmedelshandboken Kriterier för förskrivning

Mobilt GPS-larm ISO-kod 22 27 24

GPS-larm kan förskrivas till patienter med kognitiv funktionsnedsättning som medför aktivitetsbegränsningar. GPS-larm syftar till att öka tryggheten hos patient och närstående samt bibehålla aktivitetsförmåga då patient på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning känner oro att vistas utanför hemmet.

Hjälpmedel kan förskrivas till patient:

- i eget boende när närstående är larmmottagare och ansvarar för eftersök
- i eget boende utan egen larmmottagare, under förutsättning att ansvaret för larmmottagning och eftersök har klargjorts
- på särskilt boende med vårdpersonal på det särskilda boendet som ansvarar för larmmottagning och eftersök
- som gett sitt samtycke till användning enligt gällande bestämmelser om tvångs- och skyddsåtgärder.

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska som genomgått utbildning kring GPS-larm i Hjälpmedelscentrums regi.

Kostnadsansvar

Nivå 2 – hyreshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Avgifter

Abonnemangsavgift 200 kr/månad för patient i eget boende.

OBS! för korttidsboende gäller eget boende-principen.

För boende i särskilt boende ansvarar kommunen/särskilda boendet för abonnemangsavgiften.

Tänk på – information till förskrivaren

- GPS-larm kan förskrivas när patienten gett sitt samtycke till användningen enligt bestämmelser om tvångs- och skyddsåtgärder.
- Tänk på att dokumentera samtycket i patientjournalen.
- Utprovning görs alltid i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Konsumentprodukt

GPS-larm är en konsumentprodukt och därmed inte klassad som en medicinteknisk produkt. Lagstiftningen fungerar på ett annat sätt när en konsumentprodukt förskrivs. Det medför ett betydligt större ansvar på den enskilde personen som får GPS-larm som hjälpmedel om ett tillbud med personskada skulle inträffa. Förskrivare ansvarar för att informera patienten om att hjälpmedlet är en konsumentprodukt och vad som gäller vid en eventuell skada orsakad av hjälpmedlet. Informationen och patientens ställningstagande om att ta emot hjälpmedlet ska dokumenteras.

Förskrivning och utprovning

Förskrivning sker alltid i samråd med hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker. Blankett Underlag för Utprovning av GPS-larm ska fyllas i och inkomma till HMC innan utprovning. Skickas in via websesam-arbetsorder-3 A-utprovning med bifogat utprovningsunderlag.

Utprovning omfattar två tillfällen, ett för kompletterande kartläggning och val av modell och ett för utleverans av det förskrivna GPS-larmet. Första tillfället kan ske på Hjälpmedelscentrum om patienten klarar det, vid ett hembesök, på särskilt boende eller digitalt. Utleverans görs i patientens hem när funktioner behöver testas på plats, i det särskilda boendet eller på Hjälpmedelscentrum. Vid båda tillfällena bör förutom förskrivare de personer som ska ansvara för positionering, larmmottagande samt uppsök vara med. Förskrivaren stöttar patient och närstående i att träna in hjälpmedlet och följer upp användandet.

Information inför och vid förskrivning av GPS-larm

- GPS-larm är ett hjälpmedel och inte en garanti för säkerhet
- Brukaren behöver enligt gällande rekommendationer ge sitt medgivande till tillsyn/ trygghetsteknik/ övervakning. Det kan innebära ett visst integritetstrång att bära ett GPS-larm
- Fungerar enbart fullt ut utomhus i öppen terräng och det krävs att det är laddat.
- Larmmottagare behöver för de flesta larmen ha tillgång till och kunskap att hantera en surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling för att kunna nyttja/spåra GPS-larmet
- GPS-larm med telefonfunktion ska antingen bäras på brukarens arm eller på annat sätt utanpå kläderna så att inkommande samtal kan höras av brukaren
- Larmet behöver sitta på/ bäras av brukaren för att personen ska kunna spåras

Sortiment

Sortimentet är upphandlat i Västmanland tillsammans med 7-klöver och därför riskanalyserats. Vissa krav på säkerhet har ställts i upphandlingen, andra risker ska patienten informeras om. Patientens behov styr vilket larm som förskrivs. Om flera modeller uppfyller behovet väljs produkt med lägst pris.

Huvudfunktionen med GPS-larm är positionering varför alla larm i sortimentet kan positioneras.

Det finns två olika huvudtyper av larm; aktiva och passiva.

De aktiva larmen ger hjälpmedelsanvändaren möjlighet att larma vid behov.

De passiva larmen erbjuder larmfunktion som inte behöver aktiveras av hjälpmedelsanvändaren. Larmen aktiveras när man rör sig utanför en angiven geografisk zon.

De aktiva larmen kan även användas som enbart passiva larm.

Samtliga larm i sortiment just nu är kopplade till larmportalen Posifoncare.

Posifon Minifinder Pico Pro

Kan bäras i band runt halsen, med armband, fästas på en nyckelknippa, karbinhake eller i bältesclips. Kan användas som både aktivt och passivt larm. Samtalsfunktionalitet. IP klass 55. Laddställ ingår.

Leverantör: Posifon

S-42973 MiniFinder Pico pro svart

S-44254 MiniFinder Pico pro grön

Tillbehör

S- 41138 Karbinhake

S- 44986 Armband

S- 40027 Halsrem

S- 43555 Clipper bältesclips



Posifon Minifinder Nano 4G

Kan användas som både aktivt och passivt larm. Samtalsfunktionalitet. Kan fås med låsbart spänne. .IP klass 67

Leverantör: Posifon

Laddkabel ingår

S- 44404



Tillbehör

Låsbart spänne till Nano

S- 41728



Posifon Active

Kan användas som både aktivt och passivt larm.

Smartklocka med larmknapp och samtalsfunktionalitet.

Anpassningsbar urtavla med flera olika alternativ.

Laddkabel ingår.

Leverantör: Posifon

S- 45874



Tillbehör:

Låsbart spänne

S- 41728



S- 45875

Hemmafyr WiFi TP-Link



GPS SmartSole

Passivt larm som placeras i skorna. Det är högra sulan som är GPS-larmet. Induktionsladdare. Den högra sulan tas ur skon och placeras på laddaren. IP 67

Tillbehör som ingår: Laddare samt startkit

Leverantör: Posifon

S- 40631 Smartsole S storlek 35-40

S- 37719 Smartsole M storlek 41-43

S- 37718 Smartsole L storlek 44-48



Posifon Zembro

En passiv enhet utan samtalsfunktion. Det finns dock en larmknapp. Enheten har en stor och tydlig display som lyser upp när handleden vinklas för att visa tiden. Digital tid med tydliga siffror, batterinivå och mobiltäckning visas på displayen.

Leverantör: Posifon

Laddkabel ingår.

S-44701

Går att få med låsbart armband S- 44705



Med enheten följer det med 4 inomhusfyrar som kan placeras ut i användarens bostad. Fyrarna har blåtandskoppling och drivs med batteri.



	Pico Pro S-42973 (svart) S-44254 (grön)		Nano 4G S-44404		Zembro S-44701		SmartSole S-40631 (S) S-37719 (M) S-37718 (L)		Active S-45874	
Tillbehör som ingår	Laddställ	Laddare	Laddare	Laddare	Laddare	Laddare	Laddare	Laddare	Laddare	Laddare
Storlek	60 x 41 x 16 mm	d41 x 16 mm	d41 x 16 mm	53 x 45 x 13 mm	53 x 45 x 13 mm	Stl S 35–40 Stl M 41-43 Stl L 44–48	Stl S 35–40 Stl M 41-43 Stl L 44–48	D43 x 12,8 mm		
Hur bära	Bältesclips, armband, halsband, karbinhake	Runt armen, runt halsen, låsbart spänne finns	Runt armen, låsbart armband	Runt armen, låsbart armband	Runt armen, låsbart armband	Ett par sulor placeras i lämpliga skor.	Ett par sulor placeras i lämpliga skor.	Runt armen, låsbart spänne finns		
Tål vatten	IP 55	IP 67	IP 68	IP 68	IP 67	IP 67	IP 67	IP67		
Laddning	Laddstation	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Induktionsladdare. Den högra sulan tas ur skon och placeras på laddaren.	Induktionsladdare. Den högra sulan tas ur skon och placeras på laddaren.	Kabel		
Laddningstid 0-100%	3 timmar	2 timmar	3 timmar	3 timmar	3 timmar	4 timmar	4 timmar	6 timmar		
Batteritid med trygghetsområde	1-10 dygn	1-5 dygn	1-2dygn	1-2dygn	1-2dygn	1-7 dygn	1-7 dygn	1-5 dygn		
Teknik för larmmottagning	Smartphone eller Surfplatta med mobilt internet	Smartphone eller Surfplatta med mobilt internet	Smartphone eller Surfplatta med mobilt internet	Smartphone eller Surfplatta med mobilt internet	Smartphone eller Surfplatta med mobilt internet	Smartphone eller Surfplatta med mobilt internet	Smartphone eller Surfplatta med mobilt internet	Smartphone eller Surfplatta med mobilt internet		
Positionerings-system	GPS, mobilnät och WiFi	GPS, mobilnät och WiFi	GPS, mobilnät och WiFi	GPS, mobilnät och blåtand	GPS, mobilnät och blåtand	GPS och WiFi	GPS och WiFi	GPS, mobilnät och WiFi		
Uppdat intervall std (minsta)	3 min (0,5)	3 min (0,5)	2 min (0,5)	3 min (2)	3 min (2)	3 min (0,5)	3 min (0,5)	3 min (0,5)		
Trygghetszon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
Positionering	Via appen PosifonCare/ hemsida	Via appen PosifonCare/ hemsida	Via appen PosifonCare/ hemsida	Via appen PosifonCare/ hemsida	Via appen PosifonCare/ hemsida	Via appen PosifonCare/ hemsida	Via appen PosifonCare/ hemsida	Via appen PosifonCare/ hemsida		
Larmknappens funktion	Telefonsamtal i kedja, SMS eller larm via PosifonCare	Telefonsamtal i kedja, SMS eller larm via PosifonCare	Telefonsamtal i kedja, SMS eller larm via PosifonCare	-	-	-	-	Telefonsamtal i kedja, SMS eller larm via PosifonCare		
Återkoppling larm	Vibration i knapp	Ljud	-	-	-	-	-	Ljud, vibration		
Telefonfunktion	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja		
Abonnemang	200 kr inkl moms	200 kr inkl moms	200 kr inkl moms	200 kr inkl moms	200 kr inkl moms	200 kr inkl moms	200 kr inkl moms	200kr inkl moms		
Hyreskostnad 2025	177kr/månad	272kr/mån	449kr/månad	355kr/månad + 2367kr	106kr/månad	106kr/månad	106kr/månad	106kr/månad		