

Hjälpmiddelsentrum utbildar

Manöverkontakter och stativ



Kursansvarig hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker

Inger Åckander
Juha Goman
Michael Larsson
John Franzén

HJÄLPMEDELSCENTRUM

Hjälpmedelshuset
Signalistgatan 2
721 31 Västerås
Kundtjänst: 021-17 30 48

Inger Åckander
Hjälpmedelskonsulent/arbetsterapeut

Telefon: 021 - 17 49 19
Fax: 021 - 17 43 11

John Franzén
Hjälpmedelskonsulent/fysioterapeut

Telefon: 021 - 17 46 43
Fax: 021 - 17 43 11

Michael Larsson
Rehabingenjör
Område: Köping, Arboga, Kungsör,
Hallstahammar, Surahammar,
västra Västerås

Telefon: 021 - 17 30 48
Fax: 021 - 17 43 11

Juha Goman
Hjälpmedelstekniker
Område: Fagersta, Sala, Surahammar,
östra Västerås

Telefon: 021 - 17 30 48
Fax: 021 - 17 43 11

<u>ALLMÄNT</u>	4
24 09 18 Omkopplare	4
24 18 12 Stativ	4
<u>Sortiment</u>	4
MANÖVERKONTAKTER	4
Adapter 6,3mm telepropp – 3,5mm hylsa S-35365 *	4
Adapter 3,5mm telepropp – 6,3mm hylsa S-35366 *	4
Förgreningskabel AK95 6,3mm telepropp till 2x6,3mm hylsa S-35394.....	4
Kontakt Specs.....	5
Manöverkontakt JellyBean Twist 4 färger S- 37062	5
.....	5
Hållare frigolit till Jelly Bean.....	
Manöverkontakt BigRed Twist 4 färger S-37063.....	6
Ersätter Kontakt BigRed alla färger, ersättningskedja är gjord från de gamla sesamnumren.	6
Kontakt FingerButton S-17455	6
Kontakt 1 Funktion FK-1H S-03017.....	6
Kontakt Clickswitch Justerbart tryck S-13312	6
Kontakt Micro Light 1 Funktion S-02826	6
Kontakt Kuddkontakt S-03576.....	7
Kontakt Red Plate Touch S-02824.....	7
Kontakt Vipp	7
Kontakt PingPong.....	7
Manöverkontakt trådlös Blue2 switchS-36070.....	8
Kontakt Läges Tip S-02825	8
Kontakt Muskelbrytare S-11601	8
Kontakt Ögon TC S-17699	8
Kontakt Blåskontakt Puh S- 12538	9
.....	9
Kontakt Sug och Blås	9
Kontakt sändare Röslarm Voice S-33915	
Kontakt sändare röst/ljudkontakt Rehatek S-06347.....	9
Larm kontaktlist för sänggrind.....	10
Larmmatta 40x70 inkl ledning* S-36102	10
FÄSTE/MONTERINGSarm/stativ	11
Fäste Monteringskit för sänggavel S-18546	11
Monteringsarm Universal m vred S-17987.....	11
Monteringsarm Universal m spak S-06947.....	11
Monteringsarm Flexiarm S-34172, S-34173.....	12
Rullstolsfäste Daessy S-18311 och Positioneringsfäste Daessy S-33160	12
Golvstativ Daessy med vinkelställbart fäste S-18555, S-32706.....	13
Bordsstativ Daessy S-18723.....	13
Fäste Daessy Vinkelställbart med rotation S-32360	
Tillbehör Picomed Monteringsarm Daessy mini snabbfäste S-35273.....	13
Tillbehör iPad Air Otterbox Daessy mini S-35296.....	14
Tillbehör Picomed justerbar hållare surfplatta med Daessy fästpl. S-36220.....	14
Tillbehör kan förskrivas till förskriven eller egenägd plattform.....	15

ALLMÄNT

Kan förskrivas som en anpassning till samtalsapparater, strömbrytare/ manöverkontakter, larm, inmatningsenheter till datorer, handdator med kalenderprogramvara, bärbara datorer, fjärrstyrsystem samt till brukares/ patients egenägda produkter inom kommunikation- och informationsområdet som fungerar som hjälpmedel men som på grund av sjukdom, skada, funktionshinder inte kan hanteras. Sortimentet är rörligt, dvs vad som finns att tillgå för tillfället och vi hittar alternativ efter behov.

24 09 18 Omkopplare

Avser manöverkontakter för att sätta på eller av strömkretsar.

Förskrivare: Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut

Nivå: 2

Kriterier: Kan förskrivas till personer som på grund av sitt funktionshinder inte klarar små knappar/vred till dator, telefon, radio, larm med mera.

24 18 12 Stativ

Fristående hållare som håller ett föremål i ett stadigt läge. Här ingår monteringsarmar.

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/fysioterapeut

Nivå: 2

SORTIMENT

MANÖVERKONTAKTER

Alla kontakter har en kabel om ca 1,5 m med en 3,5 mm stickpropp, denna kan anpassas med en adapter till en 6,3 mm stickpropp, direkt in i befintligt larmuttag på de flesta särskilda boenden och vårdavdelningar, Om de har ett uttag på 6,3 mm.

Adapter 6,3mm telepropp – 3,5mm hylsa S-35365 *



Adapter 3,5mm telepropp – 6,3mm hylsa S-35366 *



Förgreningskabel AK95 6,3mm telepropp till 2x6,3mm hylsa S-35394

För att ansluta två olika kontakter i ett befintligt larm med 6,3 mm hål i väggen behövs:



Kontakt Specs

Manöverkontakt med en funktion som finns i flera färger. Samma kraft behövs över hela tryckytan, ger ett tydligt klickljud vid aktivering. Mått; 3,5 cm i diameter. Enkel att montera med t ex dubbelhäftande kardborrband eller med hjälp av bottenplatta som har färdiga skruvhål eller bottenplatta med möjlighet att fästa kardborreband. Tillverkad i tålig plast
Leverantör: Rehabcenter AB

S- 09689 röd
S-09692 grön
S-09691 blå
S-09690 gul
S-09693 svart



Rehabcenters kontakter och samtalsapparater har fått nya artikelnummer. Ej Specs
De levereras nu alltid med 5 lock i 4 olika färger och ett genomskinligt, så du behöver inte längre ange vilken färg du ska ha.
De lock som du inte använder kan du antingen spara eller skicka tillbaka till rekonden på HMC.

Manöverkontakt PicoButton röd S-34681

Mått 3,5 cm. Passar bra till montering på Mini-arm S-33472, skruvas direkt på den.



Manöverkontakt JellyBean Twist 4 färger S- 37062

Ersätter Kontakt JellyBean alla färger, ersättningskedja är gjord från de gamla sesamnumren.
Manöverkontakt med en funktion som har fyra utbytbara lock och ett genomskinligt snaplock.
Ger ett tydligt klickljud vid aktivering. Kan te x monteras med kardborrband eller med hjälp av färdiga skruvhål. Tillverkad i tålig plast. 3,5 mm stickpropp.
Mått: 6 cm i diameter.
Leverantör: Rehabcenter AB



Manöverkontakt BigRed Twist 4 färger S-37063

Ersätter Kontakt BigRed alla färger, ersättningskedja är gjord från de gamla sesamnumren. Manöverkontakt med en funktion som har fyra utbytbara lock och ett genomsnittligt snaplock. Ger ett tydligt klickljud vid aktivering. Enkel att montera med t ex dubbelhäftande kardborrband eller genom färdiga skruvhål. Tillverkad i tålig plast.

Mått: 12 cm i diameter

Leverantör: Rehabcenter AB



Kontakt FingerButton S-17455

Lättryckt kontakt med en funktion insydd i ett kardborrband som fästs runt fingret. Vikt 35 g.

Leverantör: Abilia AB



Kontakt 1 Funktion FK-1H S-03017

Lättryckt kontakt med en funktion. Nedsänkt röd knapp 3 cm i diameter, i en låda 12x6 cm stor. Auditiv feedback vid aktivering.

Leverantör: Abilia AB



Kontakt Clickswitch Justerbart tryck S-13312

Lättryckt kontakt med en funktion. Med möjlighet att ställa in tryckkänsligheten. Knottig yta på trycksidan för taktill feedback. Storlek 6x3 cm.

Leverantör: Abilia AB



Kontakt Micro Light 1 Funktion S-02826

Mycket lättryckt kontakt med en funktion. Ger ett klickljud vid tryck för auditiv feedback. Storlek 2x4,5 cm.

Leverantör: Permobil



Kontakt Kuddkontakt S-03576

Lättryckt kontakt med en funktion innesluten i en tygpåse som är avtag- och tvättbar. Ger en auditiv feedback vid aktivering.

Storlek 10,5x60 cm. Vikt 50 g.

Leverantör: Rehabcenter AB



Kontakt Red Plate Touch S-02824

Kontakt med en funktion som aktiveras genom en touch mot den färgade cirkeln i mitten.

Storlek 8,5x8,5 cm cirkeln 5,5 cm i diameter. Vikt 50 g.

Leverantör: Permobil AB



Kontakt Vipp

Kontakt som aktiveras genom en vippbar tunga. Fästs på lämpligt ställe på t ex en fästarm. Har en 1,50 m lång kabel. Vipp CM-2 har en 10,5 cm lång tunga, Vipp CM-7 har en 6 cm lång tunga.

Leverantör: Abilia AB

S-03023 Kontakt Vipp CM-2

S-03027 Kontakt Vipp CM-7



Kontakt PingPong

Lättryckt pingpongbollkontakt med en funktion som sitter på en flexiarm. Kontakten som är rund gör det lätt att trycka från olika vinklar, behöver inte tryckas mitt på. Flexiarmen har en klämma som går att fästa på runda rör men även på t ex en bordskant. Finns med 30 och 52 cm lång arm. Ger ett klickljud vid aktivering.

Leverantör: KomiKapp Rehatek

S-15185 30cm

S-14725 52cm



Manöverkontakt Grasp med klämfunktion S-02829

En lätttryckt klämkontakt med utbytbart skumgummiöverdrag.

Storlek: 3,5 diam x 14 cm

Leverantör: Picomed



Manöverkontakt trådlös Blue2 switchS-36070

Enkel trådlös kontaktstyrning till surfplattor, smarta telefoner och datorer.

Blue 2 ansluts via Bluetooth på din enhet. Kontakten aktiveras med ett lätt tryck, flera driftlägen för kompatibilitet till alla appar.

Leverantör: Picomed



Kontakt Läges Tip S-02825

En liten kvicksilverkontakt som aktiveras genom att man vinklar den -5 grader från horisontal position. Lämplig att montera på ett handleds- eller pannband. Kräver mycket liten rörelseförmåga för att ge utslag. Har ingen auditiv feedback. Storlek: 2,2x0,6x0,6 cm.

Leverantör: Permobil



Kontakt Muskelbrytare S-11601

Är en muskelsensor som genom att fästas på en muskel kan registrera spänningar. Fästs på aktuell kroppsdel med ett elastiskt band. En huvudenhet hör till där känsligheten för sensorn ställs in.

Leverantör: Abilia AB



Kontakt Ögon TC S-17699

Ögonkontakt med en funktion som aktiveras genom blink med ögat. Kontakten monteras på en glasögonbåge som medföljer. Justerbar känslighet för hur länge brukaren håller ögat stängt innan kontakten aktiveras, detta för att undvika oönskad aktivering vid naturlig blinkning.

Auditiv feedback. Levereras med laddare, strömförsörjning och fäste

Leverantör: Abilia AB




Kontakt Blåskontakt Puh S- 12538

Kontakt med en funktion som kan aktiveras genom en mycket svag blåsning, ett ”puh” i ett munstycke som inte behöver sättas i munnen. Avståndet mellan blåskontakten och munnen kan vara upp till 10 cm, vid svagare ”puh” minskar man avståndet. Kontakten sitter på ett bordsstativ med en bordstving. Kan regleras via ett höj-, sänk- och vinkelställbart fäste samt en flexiarm.

Leverantör: Rehatek



Kontakt Sug och Blås

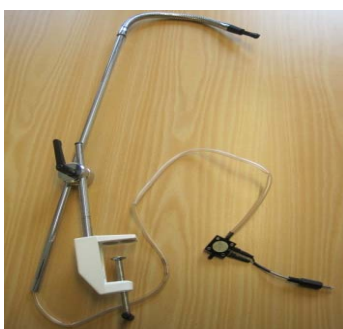

Kontakt sändare röst/ljudkontakt Rehatek S-06347

Används för att registrera och indikera ljud, så det går ett larm. Den har ett mycket stort känslighetsområde och kan ställas in så att också svaga ljud indikeras. Även ljudets varaktighet kan ställas in. Dessa två inställningsmöjligheter gör att det går att utesluta normala ljud som snarkningar mm. Kan användas både som manöverkontakt och larm.

Leverantör: Knop



Larm kontaktlist för sänggrind

Används för att uppmärksamma personal eller anhörig om att en patient/brukare är på väg att kliva ur sängen. Kan även användas som manöverkontakt och styra befintligt larm eller kopplas till INKA. Listen monteras enkelt med dubbelhäftande tejp ovanpå en uppfälld sänggrind och kopplas lätt in i det befintliga larmsystemet. Man kan även koppla kontaktlisten till en sändare som trådlöst sänder ett larm till personalen. När patienten kommer i kontakt med listen, t.ex. lägger ett ben på grinden för att klättra över skickas ett larm. Kontaktlisten är helt tät vilket gör den enkel att rengöra och desinficera.

Leverantör: PhoniroSystems

S-34550 Larm kontaktlist för sänggrind 160cm

S-34551 Larm kontaktlist för sänggrind 80cm

Tillbehör:

S-34552 Dubbelhäftande tejp*



Larmmatta 40x70 inkl ledning* S-36102

Larmmatta används för att indikera om en person t.ex. stiger upp ur sängen eller passerar en dörr. Kan även användas som manöverkontakt och styra befintligt larm eller kopplas till INKA. Placera mattan under en golvmatta eller i en skyddsmatta. Larmmattan kan kopplas till befintligt larmsystem eller till en trådlös sändare TX-2004 eller en Inka. Den kan också användas som strömbrytare/manöverkontakt. Som tillbehör finns en skyddsmatta, rekommenderas.

Både larmmattan och skyddsmattan är försäljningsvaror och ska inte återlämnas till Hjälpmedelscentrum.

Leverantör: Zafe

Tillbehör:

S-14310 Larmmatta skyddsmatta *

Om personen ska larma trådlöst in i befintligt larm behövs:

S-32677 Larmmottagare Link

S-32679 Anslutningskabel AK20 6,3 mm – Link

Om personen ska larma till en separat mottagare(Home) behövs

S – 32673 Universalsändare Inka för kontaktstyrning

S – 32680 Anslutningskabel AK91 6,3 mm – Inka, lagervara



FÄSTE/MONTERINGSARM/STATIV

Fäste Monteringsplatta för sänggrind/gavel S-18546

Fästplatta i plexiglas som på ett smidigt sätt kan placeras/hängas på en sänggavel med en eller flera kontakter monterade på. Mått 10x15 cm.

Leverantör: Zafe System Care AB



Fäste Monteringsplatta för vägg S- 32666

Fästplatta i plexiglas med plats att montera på en eller flera kontakter eller dyl. Mått 20x21 cm. Behöver skruvas med endast en skruv i väggen.

Leverantör: Zafe System Care AB



Monteringsarm Universal m vred S-17987

Hållare för kontakter, sändare o dyl. Kraftig och lättjusterad monteringsarm som är lätt att hantera med en gemensam låsning för de tre justerbara lederna. Har ett vred för låsning. Kan fästas på både rör och bordsskivor. Kan bli upp till 0,5 m lång. Kan belastas upp till 2 kg. Stor triangulär fästplatta ingår, 12,5 cm. Specialanpassning vid montering på rullstol eller säng.

Leverantör: Rehabcenter AB



Monteringsarm Universal m spak S-06947

Funktion som ovan men med spak som låsning.

Leverantör: Rehabcenter AB



Monteringsarm Miniarm S-33472

Smidig och flexibel monteringsarm som passar för t ex manöverkontakter med M 6 gänga. Adapter för M 4 gänga ingår. Total längd 40 cm , låsvred på 22 cm höjd som låser alla leder.

Tillbehör:

S-34549 200mm förlängning

Leverantör: Abilia AB



Monteringsarm Flexiarm S-34172, S-34173

Böjbar, lätt att ställa in till rätt läge.



S-34172 Monteringsarm Flexiarm 30 cm

S-34173 Monteringsarm Flexiarm 60cm

Rullstolsfäste Daessy S-18311 och Positioneringsfäste Daessy S-33160

Monteringsarm att fästa på rullstolen.

Gör det möjligt att få med sig utrustning på rullstol tex telefon, samtalsapparat el annat hjälpmedel.

Till detta behövs en fästplatta som monteras på rullstolen och hjälpmedlet, de är olika i utförande beroende på rullstolsmodell och vad som ska fästas.

Kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning.

Leverantör: Permobil



Golvstativ Daessy med vinkelställbart fäste S-18555(utgått), S-32706
Höj-och sänkbart. Har ett vinkelställbart fäste för ögonstyrningsdatorn.

leverantör Tobii och Abilia



Golvstativ RehAdapt med vinkelställbart fäste S-34195
Höj-och sänkbart. Har ett vinkelställbart fäste för ögonstyrningsdatorn.

leverantör Tobii



Bordsstativ Daessy S-18723

Leverantör: Abilia AB



Tillbehör Picomed Monteringsarm Daessy mini snabbfäste S-35273

Monteringsarmen har Daessy snabbfäste mini som passar för att montera S-35296 och S-36220.

Passar även för att montera lättare samtalsapparater som har daessy fästplatta.

Längd: 48 cm

Leverantör: Picomed



Tillbehör iPad Air Otterbox Daessy mini S-35296

Kan ställas in i horisontellt och vertikalt läge. Ipad placeras i boxen som ger ett tåligt skydd runt om och med ett skyddsglas som skyddar skärmen. Passar till alla Daessyfästen.

Leverantör: Picomed



Tillbehör Picomed justerbar hållare surfplatta med Daessy fästpl. S-36220

En justerbar hållare som passar till surfplattor. Säker fastsättning av plattan och enkelt att ta loss den ur hållaren. Fullständig åtkomst till alla portar.

Hållaren passar att montera på Monteringsarm S- S-35273.

Passar till följande dimensioner:

Bredd: max 20,6 cm

Höjd: 21,6 - 26,7 cm

Djup: max 2,8 cm

Leverantör: Picomed



Tillbehör Picomed iPadhållare X-grip S-36712

Passar på Monteringsarm Universal m vred S-17987 och S-06947. Håller surfplattor såsom iPad 2,3,4 och Air mfl större plattor, även med skal.

Passar till följande dimensioner:

Min bredd: 15,88 cm

Max bredd: 20,57 cm

Max Djup: 2,22 cm



Tillbehör kan även förskrivas till förskriven eller egenägd plattform

Kontakta Hjälpmedelskonsulent så gör vi en kartläggning av behov.
Exempel på förskrivningsbara tillbehör:

