



Hjälpmiddelsentrum utbildar

Omvårdnadshjälpmedel

Innehållsförteckning

Kontaktuppgifter/information	1
Omvårdnadshjälpmedel	2
Hjälpmedelshandboken	2
Duschstolar med eller utan hjul	3
Att tänka på vid förskrivning av hygienstolar på hjul.....	4
Hygienstolar på hjul.....	5
Swift Mobil 2.....	5
Swift Mobil Tilt 2.....	5
Ocean 2	6
Ocean VIP.....	6
Clean	7
Hygienstolar på hjul för tyngre användare	8
M2 200 kg	8
Tango XL.....	9
Combistol bred	10
Tillbehör till privata sängar.....	11
Hjälpmedelshandboken	11
Fristående lyftbågar.....	11
Ställbara ryggstöd, elektriska	11
Stödhandtag för sängar utan sänggram/sarg	12
Uppresningsstöd EVA	12
Fristående lyftbågar	13
Lyftbåge Human Care	13
Lyftbåge MerryRise.....	13
Ställbara ryggstöd, elektriska	14
Elyggstöd Comfortabel Side	14
Elyggstöd Comfortabel Compact.....	14
Vårdsängar	15
Hjälpmedelshandboken	15
Sängar och lösa sängbottnar, elektrisk reglering	15

Scanbed 755.....	17
Lågsäng Etude	19
Sängar för tyngre användare	20
Qvintett large.....	20
Basmadrasser för tyngre användare	21
Fallskyddsmattor	22
Hjälpmedelshandboken	22
Fallskyddsmatta	23

Kontaktuppgifter/information

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent

Eva Scharin

Telefon: 021-17 58 57

E-post: eva.scharin@regionvastmanland.se

Sofie Söderbäck

Telefon: 021-17 68 34

E-post: sofie.soderback@regionvastmanland.se

Omvårdnadsärenden kan skickas till vår gemensamma e-post:

hmc.omvardnad@regionvastmanland.se

Vid brådskande ärenden, ring ovanstående hjälpmedelskonsulenter eller Kundtjänst via telefon 021-17 30 48.

Senaste versionen av förskrivarmaterialet hittar du på Vårdgivarwebben:

<https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/omvardnad/>

Omvårdnadshjälpmedel

Hjälpmedelshandboken

Utdrag från vårdgivarwebben:

<https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelshandboken/>

Omvårdnadshjälpmedel är hjälpmedel som behövs för en patients omvårdnad, till exempel personlyft, dusch- och toalettstol på hjul och antidecubitusmadrass. Det är ibland samma typ av hjälpmedel som är arbetstekniska hjälpmedel. Omvårdnadshjälpmedel är ansvar 4-hjälpmedel som kommunerna har kostnadsansvaret för i särskilt boende och regionen i ordinärt boende.

Artikelansvar

- **Ansvar 1** – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
- **Ansvar 2** – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
- **Ansvar 3** – Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda och sängklossar.
- **Ansvar 4** – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

Duschstolar med eller utan hjul

ISO-kod 09 33 07

Kriterier för förskrivning

Dusch- och toalettstolar på hjul kan förskrivas till patient som inte kan förflytta sig på annat sätt till och från toaletterum eller duschplats.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Reseduschstol finns för korttidsuthyrning vid resor. För mer information kontakta kundtjänst.

Att tänka på vid förskrivning av hygienstolar på hjul

Patienten:

- Längd, vikt, kroppsbyggnad?
- Funktionshinder, diagnos?
- Sitta länge? Smärta? Sår?
- Körd av vårdare eller köra själv m drivhjul?
- Förflyttningssätt till stolen? Låg förflyttning el personlyft?
- En eller flera användare?

Hur/var ska stolen användas?

- Över toalett och i dusch? Höjd på toaletten (utan sittring)?
- Enbart i duschen? Hel sits utan hål?
- Trångt? Dörröppning, runt toalett, i duschen?
- Köra långt m stolen? Över trösklar?

Säkerhetstips

Parkera alltid hygienstolen med länkhjulen framåtriktade, det minskar tipprisken framåt!

Barriär/tvärslå är ett tillbehör som enbart används för att den som sitter i ska ha någonting att hålla i och känna sig lite säkrare. Får ej ersätta tillsyn av personal och förhindrar inte fall/urglidning!

Tippstolar skall köras i upprätt läge och tippas först när hjulen är bromsade. Om man av till exempel medicinska skäl är tvungen att köra stolen tippad, bör man vara extra försiktig. Vid körning över trösklar rekommenderas att man backar.

Extra försiktighet bör även iakttas vid körning av tunga, tonusökade eller amputerade personer.

Hygienstolar på hjul



Swift Mobil 2

S-41507 Swift Mobil 2 (lagervara)

Sitshöjd: Ställbar 45-60 cm

Totalbredd: 58 cm

Brukarvikt: Max 160 kg

Leverantör: Etac
www.etac.se



Swift Mobil Tilt 2

S-41508 Swift Mobil Tilt 2 (lagervara)

Sitshöjd: Ställbar 50-60 cm

Totalbredd: 58 cm

Brukarvikt: Max 160 kg

Leverantör: Etac
www.etac.se

Beskrivning:

Armstöd ställbara i bredd och höjd. Ställbar ryggklädsel. Sits med öppning bakåt. Swift Mobil Tilt 2 är tiltbar och nackstöd ingår.

Tillbehör som passar bägge hygienstolar:

S-41509 Ben/vadstöd

S-42724 Benstöd korta (10 cm kortare än standard benstöd)

S-42728 Benstöd snäv vinkel (4 cm närmare sitsen än standard benstöd)

S-44277 Benstöd vid vinkel (5 cm längre från sitsen än standard benstöd)

S-32098 Bäckén/ uppsamlingskärl utan lock

S-41600 Bäckén/ uppsamlingskärl med lock

S-41653 Höft/brösthälte mjukt

S-41510 Mjuksits höjd 2 cm

S-41511 Mjuksits höjd 4 cm

S-01805 Tvärslå/barriär 60,5 cm



Ocean 2

S-34039 Ocean 2 (utgående)

Sitshöjd: Ställbar 47,5-60 cm

Totalbredd: 56 cm

Brukarvikt: Max 150 kg

Leverantör: Invacare
www.invacare.se

Tillbehör till Ocean 2:

S-13966 Mjuksits standard
S-14297 Drivhjul 24 "

Tillbehör som passar bägge hygienstolar:

S-15140 Barriär/tvärslå
S-16433 Breddningssats armstöd
S-18564 Bröstmålte
S-18078 Höftbälte
S-16370 Mjuksits ovalt hål
S-34593 Mjuksits extra mjuk
S-15223 Ryggkudde m sidostöd
S-11082 Uppsamlingskärl med lock



Ocean VIP

S-16431 Ocean VIP (utgående)

Sitshöjd: Ställbar 51-61 cm

Totalbredd: 59,5 cm

Brukarvikt: Max 150 kg

Leverantör: Invacare
www.invacare.se

Tillbehör till Ocean VIP:

S-17919 Mjuksits standard



Clean

S-41572 Clean, sitthöjd 55cm (beställning)

S-41839 Clean, sitthöjd 49cm (beställning)

S-41838 Clean, sitthöjd 44cm (beställning)

Sitshöjd: Finns i tre olika höjder, 55, 49 och 44 cm.

Totalbredd: 50 cm

Brukarvikt: Max 130 kg

Leverantör: Etac
www.etac.se

Tillbehör:

S-17227 Barriär/tvärslå

S-32098 Bäckén/ uppsamlingskärl utan lock

S-41600 Bäckén/ uppsamlingskärl med lock

S-17313 Mjukrygg

S-17380 Mjuksits

Hygienstolar på hjul för tyngre användare



M2 200 kg

S-41901 M2 200 kg (beställning)

Sitshöjd: Ställbar 48-56,5 cm

Totalbredd: 68 cm

Sittbredd: 56 cm

Bredd mellan armstöd: 56 cm

Sittdjup: 44 cm

Brukarvikt: Max 200 kg

Leverantör: HMN
www.hmn.dk/se

Tillbehör:

S-37514 Uppsamlingskärl/bäcken



Tango XL

S-45009 Tango XL (beställning)

Sitshöjd: 53 cm

Totalbredd: 66 cm

Sittbredd: 56 cm

Bredd mellan armstöd: 56 cm

Sittdjup: 48 cm

Brukarvikt: Max 250 kg

Leverantör: Now Boarding/Northern Care
northerncare.se

Tillbehör:

S-45114 Uppsamlingskärl/bäcken



Combistol bred

S-33073 Combistol (utgående)

Sitshöjd: Ställbar 50,5-63 cm

Totalbredd: 64 cm

Sittbredd: 51 cm

Bredd mellan armstöd: 50 cm

Sittdjup: 43,5 cm

Brukarvikt: Max 200 kg

Leverantör: Direct Health Group
www.directhealthcaregroup.com/sv

Tillbehör:

S-34661 Uppsamlingskärl hink

S-37698 Uppsamlingskärl nyckelhålsform

Tillbehör till privata sängar

Hjälpmedelshandboken

Fristående lyftbågar

ISO-kod 12 31 09

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast och distriktssköterska

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Ställbara ryggstöd, elektriska

ISO-kod 18 12 24

Kriterier för förskrivning

- Göra det möjligt för patient att självständigt ta sig i och ur säng, eller för att underlätta för vårdare.
- Underlätta andningen för svårt hjärt- och lungsjuka.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Stödhandtag för sängar utan sänggram/sarg



Uppresningsstöd EVA

S-36515, höjd 85cm (lagervara)

S-36516, höjd 100cm (lagervara)

Höjd: Finns i två olika höjder, 85 cm och 100 cm

Brukarvikt: Max 150 kg

Leverantör: Swereco
www.swereco.com

Beskrivning:

Passar sängar där avstånd från golv till undersida säng är minst 6 cm. Kanten under sängbotten ska vara 2,5-6 cm bred.

Obs! Sängar med alltför mjuk botten/madrass, samt ställbara sängar, är inte lämpliga att montera EVA-stödet på.

Obs! En noggrann kartläggning över hela situationen, dvs patientens fysiska och kognitiva funktion samt sängens konstruktion och kvalitet, ska göras innan montering av EVA-stöd.

Fristående lyftbågar

Lyftbåge Human Care

S-06564 (utgående)

Max belastning: beror på handtagshylsans placering på röret och om sänglåsningstaget används.

Med sänglåsning: Inifrån och ut: 70 kg, i mitten 65 kg, längst ut 60 kg.

Utän sänglåsning: Inifrån och ut: 50, 45, 40 kg.

Leverantör: Human Care
www.humancaregroup.se



Lyftbåge MerryRise

S-43243 (lagervara)

Brukarvikt: Max 120 kg

Leverantör: Swereco
www.swereco.com



Ställbara ryggstöd, elektriska

Elryggstöd Comfortabel Side

S-35491, bredd 80 cm (utgående)

S-16280, bredd 90 cm (lagervara)

S-16281, bredd 105 cm (lagervara)

Leverantör: ComfortSystem
www.comfortsystem.se

Beskrivning: Motorn monteras på höger eller vänster sida, ange önskad sida vid förskrivning. Byter du själv sida på motorn så var noga med att avsluta med att vrida motorn nedåt.



Elryggstöd Comfortabel Compact

S-44128, bredd 80 cm (beställning)

S-43236, bredd 90 cm (lagervara)

S-43237, bredd 105 cm (beställning)

Leverantör: ComfortSystem
www.comfortsystem.se

Beskrivning: Motorn är placerad i mitten, under rygghuden.



Tillbehör:

S-33206 Stödhandtag

S-43408 Fästplåt

S-16315 Sittlås

OBS! Vid montering av stödhandtag på Elryggstöd Comfortabel Compact behövs en fästplåt (liten metallplatta).



Vårdsängar

Hjälpmedelshandboken

Sängar och lösa sängbottnar, elektrisk reglering

ISO-kod 18 12 10

Kriterier för förskrivning

- Göra det möjligt för patient att självständigt ta sig i och ur sängen.
- Göra det möjligt för patient med svåra funktionsnedsättningar, som vistas stor del av dagen i sängen, att självständigt kunna göra lägesändringar.
- Underlätta andningen för svårt hjärt- och lungsjuka.
- Underlätta för vårdaren när patienten vårdas helt eller delvis i sängen.
- Underlätta för föräldrar med funktionsnedsättning att kunna sköta sitt barn (barnsäng).

En undermålig säng, eller avsaknad av egen säng, är inte skäl för förskrivning, om patienten i övrigt inte uppfyller något av kriterierna.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar

Innan vårdsäng levereras ska befintlig säng, och annat som kan vara i vägen, flyttas undan.

Standardmadrass till förskriven säng är ett egenansvar för patienten. Rekommenderat madrassmått är 90x200x12 cm. Standardmadrass till säng kan köpas i öppna handeln eller på Hjälpmedelscentrum.

Undantag

Standardmadrass med hygienöverdrag kan förskrivas till patienter som vårdas i livets slutskede.

Madrass till vårsäng för barn ingår och förskrivs i samband med säng. Storlek på madrass beror på om grindsskydd ska användas eller inte.

Standardmadrass 105 eller 120 cm bred kan förskrivas i samband med förskrivning av bredare vårsäng.

Viktig information

Innan säng förskrivs ska möjlighet att anpassa egen befintlig säng med till exempel manuellt eller elektriskt ryggstöd, förhöjningsklossar, dävert eller andra uppresningshjälpmedel undersökas.

Standardsängarna som kan förskrivas är 90 cm breda. Bredare säng kan förskrivas då patienten inte får plats i standardsäng eller på grund av vändningssvårigheter och/eller tung patient.

Standardmadrass för privat köp kan efter överenskommelse med patient beställas och levereras i samband med förskrivning av vårsäng. Vid registrering av order används S-nr 36279. Faktura skickas hem till patienten. Vid vård i livets slutskede kan standardmadrass med hygienöverdrag förskrivas.

Vid förskrivning av vårsäng är det viktigt att ange rätt leveransadress och telefonnummer till kontaktperson som kan kontaktas för bokning av leverans.



2

Scanbed 755

S-32618 ScanBed 755 90 cm bred (utgående)

S-43746 ScanBed 755 90 cm bred, årsmodell 2023 (lagervara)

S-33621 ScanBed 755 105 cm bred (utgående)

S-43747 ScanBed 755 105 cm bred, årsmodell 2023 (lagervara)

Brukarvikt: Max 200 kg

Leverantör: Invacare
www.invacare.se

Beskrivning:

Årsmodell 2023 har ett nytt utseende på handkontrollen/manöverdosan, i övrigt är sängarnas funktion och utseende helt oförändrat.

Sängarna har en 4-delad liggyta, integrerade gavlar/grindar och centralbroms som standard.

Grindhöjden är 40 cm från liggytan, rekommenderad madrasshöjd max 18 cm.

Liggytan har inbyggd förlängning. Om extra lång säng önskas, förskrivs extra långa grindar via Uppladdningstjänsten eller pappersförskrivning. Ange om sängen ska förlängas 10 eller 20 cm. Vid 10 cm förlängning, ange om sängen ska förlängas i huvud- eller fotänden.

Tillbehör:

S-34563 Förlängningsbar grind Line (+10 eller 20 cm)

S-33986 Förlängningsdel madrass 15 cm, **Utgående** (kan användas för att förlänga madrassen vid förlängning av säng med 10 eller 20 cm)

S-44534 Förlängningsdel madrass 10 cm

S-44473 Förlängningsdel madrass 20 cm

S-13847 Lyftbåge fast

S-15846 Lyftbåge svängbar

S-16157 Stödhandtag 25x30 cm

S-16158 Stödhandtag 40x30 cm

S-16412 Stödhandtag 40x50 cm

Grindskydd finns i två olika material, galon och nät. Galon-materialet är polstrat och väljs när patienten sparkar mot grinden. Nät-materialet väljs till patienter som sticker ut fötterna men inte sparkar. Nät är också ett luftigare material som ger en mindre instängd känsla i sängen.

S-34843 Grindskydd galon

S-34786 Grindskydd galon extra långt till grind Line förlängningsbar

S-36439 Grindskydd galon extra polstring

S-34859 Grindskydd nät

Ovanstående grindskydd passar till **grindar med tre ribbor** som är standard på Scanbed 755. Äldre modeller av Scanbed 755 och 750 kan ha **grindar med två ribbor**. Till dessa grindar passar följande:

S-16357 Grindskydd galon

S-18693 Grindskydd galon extra långt till förlängd grind

S-33489 Grindskydd galon extra polstring

S-16354 Grindskydd nät

Tillbehör registreras som komponenter på vårdsängen.

Tillbehör som enbart går att förskriva i undantagsfall:

OBS Standardmadrass till förskriven säng är ett egenansvar för patienten.

Undantag görs för patienter som vårdas i livets slutskede, barn och madrass till bredare vårdsäng.

S-12604 Standardmadrass med hygiensöverdrag 90x200 cm kan förskrivas till patienter som vårdas i livets slutskede. Madrasshöjd 12 eller 14 cm. Placeras direkt på sängbotten. Max brukarvikt 130 kg.

S-12604 kan även hyras av särskilt boende i samband med beställning av vårdsäng.

Madrassen registreras som en komponent på vårdsängen.



Lågsäng Etude

S-34799 Etude 90 cm bred (beställning)

Brukarvikt: Max 165 kg

Leverantör: Invacare
www.invacare.se

Beskrivning:

Liggytan går att ställa i två olika höjder. Lägsta höjd 20 alt 27 cm, högsta höjd 60, alt 67 cm. Monteras vid leverans i önskat läge, ange lägsta höjd vid förskrivning.

Integrerade grindar, individuellt bromsade hjul.

Obs viktigt att inte ställa grindarna snett. De är inte konstruerade för det och går lätt sönder.

Tillbehör: samma som ScanBed.

Vid förlängning behövs en förlängningsdel, S-35995 (10 cm) eller S-42516 (20 cm).

Sängar för tyngre användare



Qvintett large

S-35946 Qvintett large 105 cm bred (utgående)

S-45289 Qvintett large 105 cm bred, årsmodell 2021 (beställning)

Brukarvikt: Max 250 kg

Leverantör: ComfortSystem
www.comfortsystem.se


Beskrivning:

Bredare säng som klarar hög användarvikt. Integrerade grindar och centralbroms.

Årsmodell 2021 har samma funktion och utseende som tidigare version.

Säng Qvintett large finns även med bredden 120 cm, Sesam-nr 35954. För att förskrivning av denna krävs en kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Basmadrasser för tyngre användare

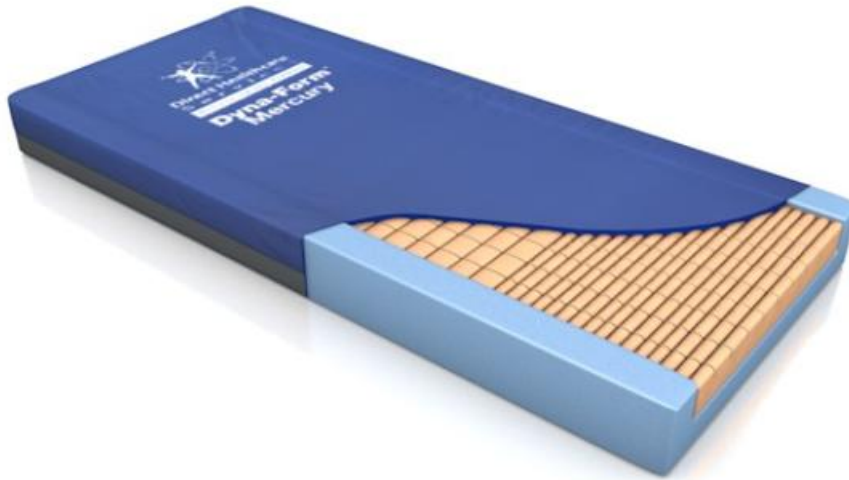

DHG (Direct Healthcare group)

S-45767 Dyna-Form Mercury 105x200x15 cm (lagervara)

Kategori: Förebyggande

Brukarvikt: Max 254 kg

Leverantör: DHG, www.directhealthcaregroup.com/sv/

Care of Sweden

S-35953 Optimal 5zon plus 105x200x15 cm (utgående)

S-33673 Optimal Maxx 105x200x15 cm (utgående)

S-43593 Optimal 5zon 105x200x15 cm (utgående)

Kategori: Förebyggande

Brukarvikt: Optimal 5zon plus, max 300 kg

Optimal Maxx Max och Optimal 5zon, max 180 kg

Leverantör: Care of Sweden, www.careofsweden.se

Beskrivning:

Basmadrasser i skum med hygiensöverdrag. Placeras direkt på sängbotten.

Kan förskrivas i samband med bredare vårdäng.

Madrasserna finns även i bredden 120 cm. För förskrivning av dessa krävs en kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Fallskyddsmattor

Hjälpmedelshandboken

Fallskyddsmatta

ISO-kod 18 33 90

Kriterier för förskrivning

Fallskyddsmatta används vid säng för att minska risk för skada i samband med fall.

Fallskyddsmatta kan förskrivas till patient med nedsatt gång-och/eller kognitiv förmåga, som trots att fallpreventiva åtgärder vidtagits, riskerar att falla ur eller vid säng/vårdsäng.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Fallskyddsmatta kombineras med fördel med en extra låg vårdsäng och rörelse- eller sänglarm, till motoriskt oroliga patienter.

Observera att viss snubbelrisk kan förekomma vid användning av gånghjälpmedel på fallskyddsmatta

Fallskyddsmatta



Fallskyddsmatta

S-43430 (lagervara)

Längd: 180 cm

Bredd: 101,5 cm

Leverantör: Salubrius
www.salubrious.se

Beskrivning:

Placeras på golv bredvid säng. Transportväska ingår.