

Hjälpmiddelsentrum utbildar

Omvårdnadshjälpmedel



Kursansvarig hjälpmedelskonsulent

Eva Scharin

Telefon: 021-17 58 57

E-post: eva.scharin@regionvastmanland.se

Våren 2019

Saxat ur Hjälpmedelshandboken:

Finns på vårdgivar-weben;

<https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelshandboken/>

Omvårdnadshjälpmedel

Omvårdnadshjälpmedel är hjälpmedel som behövs för en patients omvårdnad, till exempel personlyft, dusch- och toalettstol på hjul och antidecubitussmadrass. Det är ibland samma typ av hjälpmedel som är arbetstekniska hjälpmedel. Omvårdnadshjälpmedel är ansvar 4-hjälpmedel som kommunerna har kostnadsansvaret för i särskilt boende och regionen i ordinärt boende.

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):

- **Ansvar 1** – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
- **Ansvar 2** – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
- **Ansvar 3** – Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda, griptång och sängklossar.
- **Ansvar 4** – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

Duschstolar med eller utan hjul

ISO-kod 09 33 07

Kriterier för förskrivning

Dusch- och toalettstolar på hjul kan förskrivas till patient som inte kan förflytta sig på annat sätt till och från toalettrum eller duschplats.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Nivå 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på:

Reseduschstol finns för korttidsuthyrning vid resor. För mer information kontakta kundtjänst.

Förskrivning av hygienstol på hjul – att tänka på:

Brukaren:

- Längd, vikt, kroppsbyggnad?
- Funktionshinder, diagnos?
- Smärta, sår, sitta länge?
- Köra själv, bli körd av vårdare?
- Förflyttningssätt till stolen? Låg förflyttning el personlyft?
- Flera användare?

Hur/var ska stolen användas?

- Över toalett och i dusch? Höjd på toaletten (utan sittring)?
- Enbart i duschen? Duschsits?
- Trångt? Dörröppning, runt toalett, i duschen?
- Köra långt m stolen? Över trösklar?

Exempel på tillbehör:

- Mjuksitsar
- Bäckben + bäckengejder
- Barriär/tvärslå
- Mjukrygg
- Amp.benstöd

Säkerhetstips:

Parkera alltid hygienstolen med länkhjulen framåtriktade, det minskar tipprisken framåt!

Barriär/tvärslå är ett tillbehör som enbart används för att brukaren ska ha någonting att hålla i och känna sig lite säkrare. Får ej ersätta tillsyn av personal och förhindrar inte fall/urglidning!

Tippstolar skall köras i upprätt läge och tippas först när hjulen är bromsade. Om man av t.ex. medicinska skäl är tvungen att köra stolen tippad, bör man vara extra försiktig. Vid körning över trösklar rekommenderas att man backar.

Extra försiktighet bör även iakttas vid körning av tunga brukare, spastiker och amputerade.

Produktinformation: Hygienstolar på hjul

OCEAN Invacare



Ocean 2 S-nr 34039

Max brukarvikt: 150 kg

Ocean 2 XL S-nr 34672

Max brukarvikt: 150 kg
(bredare ryggdel)

Ocean S-nr 13962

(äldre modell)
Max brukarvikt: 130 kg

Ocean XL S-nr 14710

(äldre modell)
Max brukarvikt: 150 kg
(utböckade armstöd)

Tillbehör/komponenter i urval:

Mjuksits std S-nr 13966

Mjuksits oval hål S-nr 16370

Uppsamlingskärl S-nr 11082

Barriär S-nr 15140

Drivhjul 24" S-nr 14297

Gejder (ingår alltid) S-nr 14183

Mjuksits extra mjuk S-nr 34593

(Obs! Passar enbart Ocean 2, Ocean Vip)

Ryggkudde m sidostöd S-nr 15223

Ocean och Ocean 2 är ställbara i sitthöjd: 47,5-60 cm. Totalbredd 56 cm.

OBS! Äldre modellerna Ocean och Ocean XL förskrivs endast vid tillgång på lagret.

CLEAN Etac



S-nr: 17312

Ställbar i höjd 47,5 – 60 cm

Brukarvikt: 130 kg

Tillbehör i urval: S-nr 10567 Bäck
S-nr 17227 Barriär/tvärslå
S-nr 17380 Mjuksits
S-nr 17313 Mjukrygg

Obs! Förskrivs vid tillgång på lager, eller köps in i särskilda fall.

S-nr 34599 Clean med drivhjul

Sitthöjd 55 cm. Totalbredd 69 cm.

Beställningsvara, i särskilda fall.

OCEAN VIP Invacare



Ocean Vip

S-nr: 16431

Ställbar i sitthöjd 51-61 cm

Totalbredd: 59,5cm

Max brukarvikt: 150 kg

Tillbehör i urval:

Mjuksits std öppn S-nr 17919

Uppsamlingskärl S-nr 11082

Gejder (ingår alltid) S-nr 16575

Barriär S-nr 15140

Mjuksits extra mjuk S-nr 34593

Höftbälte S-nr 18078

Brösthälte S-nr 18564

Lagervara.

SWIFT MOBIL
TIPP
Etac



Obs! Utgången, förskrivs vid tillgång på lagret. Kan köpas in särskilda fall.

S-nr: 18771

Ställbar i sitthöjd 50,0-65,0 cm

Totalbredd: 58cm

Max brukarvikt: 135 kg

Bäckengejder och nackstöd ingår alltid.

Övriga tillbehör i urval:

Komfortdyna (läggs ovanpå bef sits)

Tvärslå/barriär

Bäcken

S-nr 32097

S-nr 01805

S-nr 02098

OBS! Vid inställning av höjd, följ noga instruktion som följer med stolen.

**COMBISTOL
BRED
Handicare**



Hygienstol för tyngre brukare

S-nr: 33073

Max brukarvikt: 200 kg

Sittbredd 51 cm. 53 cm mellan armstöd. Ställbar i höjd 50,5-63 cm.

Tillbehör:

S-nr 34661 Uppsamlingskärl hink

S-nr 37698 Uppsamlingskärl nyckelhålsform

Beställningsvara.

Sängar

ISO-kod 18 12 10

Sängar med motoriserad reglering av sängbotten

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut

Nivå: 4

Kriterier:

- Göra det möjligt för brukare att självständigt ta sig i och ur sängen.
- Göra det möjligt för svårt funktionshindrade, som vistas stor del av dagen i sängen, att självständigt kunna göra lägesändringar.
- För att underlätta andningen för svårt hjärt- och lungsjuka.
- Att underlätta för vårdaren när brukaren vårdas helt eller delvis i sängen.
- För funktionshindrade föräldrar att kunna sköta sitt barn (barnsäng).

Utprovning:

Innan säng förskrivs ska möjlighet att anpassa egen befintlig säng med till exempel manuellt eller elektriskt ryggstöd, förhöjningsklossar, dävert eller andra upprensningshjälpmedel undersökas.

Standardsängarna som finns för uthyrning är 90cm breda. Vårdsäng är ett hjälpmedel avsett att användas av en person. Standardsängarna som finns för uthyrning är 90cm breda. Bredare säng kan förskrivas då patienten själv ej får plats i standardsäng. Skäl kan vara vändningssvårigheter och/eller tung patient.

Standardmadrass till förskriven vårdsäng bekostas av patienten. Rekommenderat madrassmått är 90x200x12cm. Undantag är vid vård i livets slutskede då kan standardmadrass med hygienöverdrag förskrivas.

Standardmadrass till vårdsäng kan köpas i öppna handeln eller på Hjälpmedelscentrum.

En undermålig säng, eller avsaknad av egen säng, är inte skäl för förskrivning, om brukaren i övrigt inte uppfyller något av kriterierna.

18 12 24 Ställbara rygg- och benstöd

Ställbara ryggstöd, manuella

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast och Distriktsköterska

Nivå: 3

Ställbara ryggstöd, elektriska

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast

Nivå: 4

Kriterier: Göra det möjligt för brukare att självständigt ta sig i och ur säng, eller för att underlätta för vårdare.

För att underlätta andningen för svårt hjärt- och lungsjuka.

18 12 27 Sänggrindar och lyftbågar

Sänggrindar

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast

Nivå: 4

Kriterier: För att förhindra fall ur sängen eller som hjälp vid förflyttning.

Lyftbågar (dävert)

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast

Nivå: 4

För fristående lyftbågar se 12 30 09

Att tänka på vid utprovning/förskrivning av säng

1. Kan den egna sängen anpassas för att underlätta för brukaren?
Prova t ex förhöjningsklossar, manuellt ryggstöd, fristående lyftbåge, stödhandtag eller uppresningsstöd.
2. Har brukaren uppresningssvårigheter från liggande till sittande kan elektriskt ryggstöd provas.
Tänk då på att ange **motorsida** på ordinationen.
3. Kvarstår problemen efter ovanstående åtgärder kan förskrivning av en hemsjukvårdssäng bli aktuellt.

Ev. tillbehör registreras som **komponenter**.

Glöm inte att ange brukarens adress som leveransadress!

Var också noga med att ange **telefonnummer** till ev. anhörig eller annan person som ska finnas på plats för att ta emot sängen!


Nämn gärna också vid förskrivningen, om det är trappor eller hiss upp till bostaden.

OBS! Madrass ingår inte! Glöm inte att informera brukaren om detta!
Rekommenderat madrass-mått: 90x200x12cm.

Undantag görs vid vård i livets slutskede, då kan en madrass med hygienöverdrag förskrivas, S-nr 12604.

TILLBEHÖR PRIVATA SÄNGAR I URVAL:

BEDMEDIC

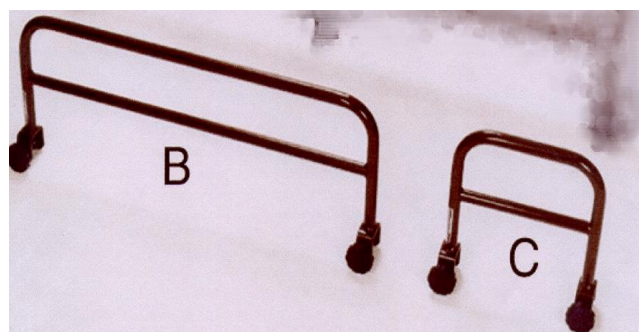

Stödhandtag för sängar med sängram/sarg

Obs! Slutade tillverkas 2017. Kan endast förskrivas vid tillgång av återlämnat på lagret.

Res-, stöd- och vändhandtag som skruvas fast i sängramen eller sängsidan med rattskruvar.

Öppningen på fästbyglarna är 35mm och passar de flesta sängar.

Handtag A

Sesamnr: 03218

Längd: 300mm

Höjd: 400mm

Handtag B

Sesamnr: 05836

Längd: 800mm

Höjd: 250mm

Handtag C


Sesamnr: 05837

Längd: 300mm

Höjd 250mm

Stödhandtag för sängar utan sänggram/sarg.

Uppresningstöd EVA Karo Pharma/Swereco

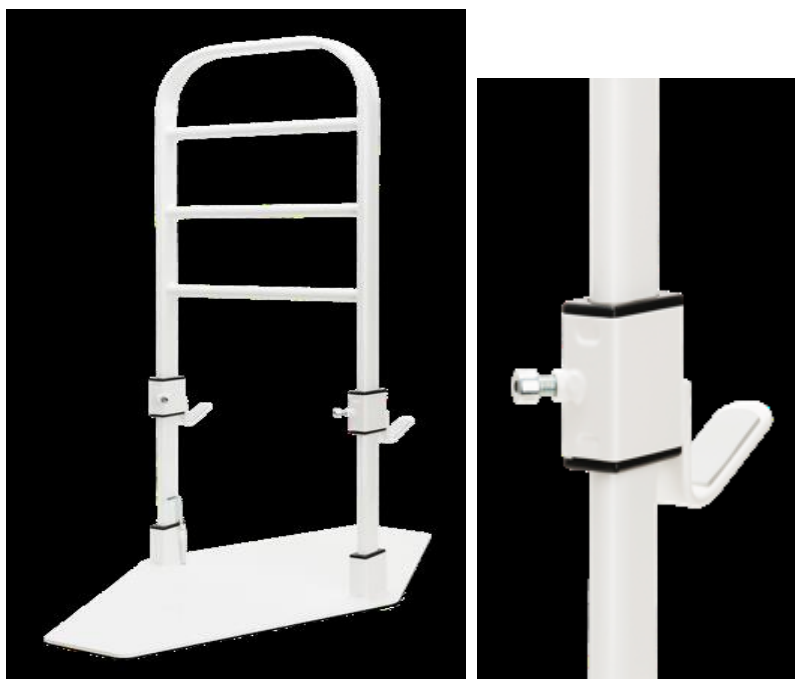

**S-nr 36515 Uppresningsstöd Eva std inkl golvplatta höjd 85 cm
(lagervara)**

**S-nr 36516 Uppresningsstöd Eva förhöjt inkl golvplatta höjd 100 cm
(lagervara)**

Max brukarvikt 150 kg

Med nytt fäste (se bild): Passar till sängar där avstånd golv-undersida säng är minst 6 cm och har 2 – 5,5 cm bred kant under sängbotten.

Med gamla fästet: Avstånd golv-undersida säng ska vara minst 14 cm, max 4 cm bredd på kanten under sängbotten.

OBS! Vid förskrivning: HMC tillhandahåller Eva-stöd med både gamla och nya fästen.

Ange vid förskrivning på en kommentarsrad till lagerpersonalen, om det är viktigt att få ett stöd med de nya fästena.

PARNELL Euforia



OBS! Utgången modell, förskrivs enbart vid tillgång på lagret.

S-nr 34693 Parnell uppresningsstöd

Max brukarvikt 115 kg

Passar till sängar där avstånd golv-undersida säng är ca 5 cm – 35 cm och som har en max 3 cm bred kant under sängbotten.

Höjd 81 cm, bredd 28 cm.

Parnell för tyngre brukare:

S-nr 35395 Max brukarvikt 165 kg

Höjd: 92 cm, bredd 28 cm.

REKO Swereco



Resningsstöd REKO (komplett)

S-nr: 00994

Sänggrind REKO

S-nr: 00995

Sängbygel REKO

S-nr: 00996

Komplettera med något av följande:

Mellanrör	S-nr 32073
Ändfäste högt 22.5-44.0 cm	S-nr 32165
Ändfäste lågt 14.5-27.0 cm	S-nr 32164
Golvfäste högt 22.5-44.0 cm	S-nr 32163
Golvfäste lågt 14.5-27.0 cm	S-nr 32162

OBS! Förskrivs endast då varken Eva-stödet eller Parnell-stödet passar.

Vid hembesök mäts avståndet golv - undersida säng, för att avgöra vilken höjd på fästen som krävs. Kontrollera också att sängbotten har en tråkant på ett par cm. Sänggrinden och sängbygeln passar även de flesta modeller av elektriskt reglerbara sängar.

Kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning, innan förskrivning.

Monteras av HMC:s hjälpmedelstekniker.

Elryggstöd

COMFORTABEL
ComfortSystem



Elryggstöd Comfortabel 90 cm S-nr 16280 (lagervara)

Elryggstöd Comfortabel 105 cm S-nr 16281 (beställningsvara)

Glöm inte att ange motorsida på ordinationen! Byter du själv sida på motorn så var noga med att avsluta med att vrida motorn nedåt!

Sängar

SCANBED 750/755 Invacare



S-nr 32618 ScanBed 755 (SB755) senaste modellen, upphandlad lagervara.

S-nr 16230 ScanBed 750 (SB750) äldre modell, kan endast förskrivas i mån av tillgång på lagret.

ScanBed-sängarna har 90x200 som bäddmått, 4-delad liggyta, integrerade grindar och centralbroms som standard. Rek.madrassmått: 85/90x200x12cm.
Lyftomfång: 35-83 cm.

Grindhöjder:

SB 755 = 40 cm fr liggytan, rek madrasshöjd max 18 cm.

SB 750 = 34 cm fr liggytan, rek madrasshöjd max 12 cm.

Brukarvikt:

SB 750: 185 kg

SB 755: 200 kg

Tillbehör vanligast förekommande:

Stödhandtag 25x30 S-nr 16157

Stödhandtag 40x30 S-nr 16158

Stödhandtag 40x50 S-nr 16412

Lyftbåge S-nr 13847

Grindförhöjdn ribba S-nr 35914 (+15cm)

PROBED Proton Caretec



Obs! Utgången modell, tillverkas inte längre. Kan enbart förskrivas vid tillgång på lagret.

Probed säng komplett

S-nr: 14573
Lyftomfång 31-88 cm
Innermått 90x209 cm
Yttermått 98x213 cm

Tillbehör

Dävert	S-nr:10336
Sidostöd	S-nr:12790
Uppresningsstöd	S-nr:12791

Centralbroms.

Rekommenderat madrassmått 200x90x12 cm

Max brukarvikt: 200 kg

EZZ Proton Caretec



Obs! Utgången modell, tillverkas inte längre. Kan enbart förskrivas vid tillgång på lagret.

Ezz, säng komplett

S-nr: 12789

Lyftomfång 35-80 cm

Innermått 90x209 cm

Ytermått 100x214 cm

Centralbroms.

Rekommenderat madrassmått 200x90x12 cm

Max brukarvikt: 165 kg

Tillbehör

Dävert S-nr:10336

Sidostöd S-nr:12790

Uppresningsstöd S-nr:12791

EVABED Proton Caretec



Obs! Utgången modell, tillverkas inte längre. Kan enbart förskrivas vid tillgång på lagret.

EVABed komplett säng
S-nr: 10334

Har lyftomfång 35-80cm = 47 cm
100mm hjul
Innermått 90x200cm
Yttermått 100x215cm

Individuellt bromsade hjul.

Rekommenderat madrassmått 200x90x12cm

OBS! Max brukarvikt: **135 kg**

Tillbehör

Dävert	S-nr 10336
Stödhandtag 17 cm	S-nr:10338
Stödhandtag 48 cm	S-nr 12070
Uppresningsstöd vä	S-nr:10337
Uppresningsstöd hö	S-nr:10595

Undantag, som kräver **förskrivning på pappersblankett**:

Extra lång säng:

Samtliga sängmodeller utom S-10334 EVABed, har inbyggd förlängning av liggytan, som kan dras ut då längre säng önskas. Byte till **förlängda grindar** behöver då göras, se art nr nedan.

Scanbed:

S-nr 15877 Förlängda grindar till Scanbed 750.

S-nr 34563 Förlängda (teleskoperande) grindar till Scanbed 755.

Ezz och Probed:

S-nr 12072 Förlängda grindar

Madrassförlängningsdel 15 cm (S-33986) kan förskrivas (komponent), för att slippa byte av basmadrass.

Högre grind:

S-nr 35914 Grindförhöjningsribba, passar Scanbed-sängarna med grind Britt III (3) och grind Britt V (5). Ger 15 cm högre grind.

S-nr 39682 Grindförhöjningsribba, passar Scanbed-sängar med förlängningsbar grind Line. Ger 15 cm högre grind.

Extra låg säng:

S-nr 34799 Etude Plus Låg. Beställningsvara.

Liggytan kan ställas i två höjder, 20 eller 27 cm, ange önskad höjd på förskrivningsblanketten. (Obs! Lägg till madrassens höjd, vid beräkning av liggytans totala höjd.)

Extra bred säng (105 cm bred):

S-nr 12548 ScanBed 750 (äldsta modellen) Brukarvikt 185 kg. Utgången.

S-nr 16227 ScanBed 750 (äldre modell) Brukarvikt 185 kg. Utgången.

S-nr 33621 ScanBed 755 (vid nyinköp) Brukarvikt 200 kg. Beställningsvara.

Sängar för tunga brukare

Qvintett large br 105 cm: S-nr 35946. Bäddmått 105x200 cm.

Brukarvikt: 250 kg

Beställningsvara.

Qvintett large br 120 cm: S-nr 35954. Bäddmått 120x200 cm.

Brukarvikt: 250 kg

Beställningsvara.

Octave br 116 cm: S-nr 35954. Bäddmått 115x200 cm.

Brukarvikt: 350 kg

Beställningsvara.

Produktinformation Antidecubitusmadrasser (Utdrag ur Hjälpmedelshandboken)

04 33 Antidecubitushjälpmedel

04 33 06 Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention

Förskrivare för madrass i förebyggande och behandlande syfte:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut och Sjuksköterska

Nivå 4.

Kriterier: Förskrivs för att förebygga eller behandla trycksår.

Madrass i förebyggande syfte:

Madrass för att användas i förebyggande syfte bör vara förstahandsval innan eventuellt sår uppkommit. (sårgrad 1, 2)

Madrass i behandlande syfte:

Madrass i behandlande syfte:
Behandlande madrass kan förskrivas då trycksår uppstått eller då risken är hög (sårgrad 2, 3, 4)

Utprovning:

Vid förskrivning av avancerad antidecubitusmadrass (sårgrad 4) krävs bedömning/god motivering till behovet.

Utprovning sker i samråd medhjälpmedelskonsulent.
Kontinuerlig uppföljning ska ske.

**FIBERMADRASS
3-DELAD
Care of Sweden**



S-nr: 15222

Material: Silikoniserade fibrer.

Brukarvikt: 90 kg (tveksamt över 70 kg, HMC:s erfarenhet)

Kategori: Förebyggande, spec för magra, lätta brukare.

OBS! Försäljningsvara, **skall ej återlämnas till HMC.**

Personförskrivs inte, beställs via rekvisitionslistan i WebSesam.

**OPTIMAL
5-ZON BM
Care of Sweden**



S-nr: **34420**

Optimal 5zon är en bäddmadrass, läggs ovanpå befintlig basmadrass.

Kategori: Förebyggande och behandlande t o m sårkategori 2.

Material: Skumkärna med vätsketätt överdrag.

Brukarvikt: 130 kg

Lagervara. Hyresartikel.

S-nr: 34673 Optimal 5zon 105 cm bred.

Beställningsvara. Hyresartikel.

CuroCell SAM Care of Sweden



Ny i sortiment fr o m 160901.

S-nr: 37509 (madrass inkl kompressor)

Mått: 90x200x10 cm

Kategori: Statisk madrass. Behandlande upp t.o.m. sårgrad 2.

Brukarvikt: 200 kg

S-nr 37511 CuroCell SAM 105 cm bred (beställningsvara).

SofCare Gate Rehab



Obs! Ej upphandlad men köps in i särskilda fall. Förskrivs på pappersordination.

SofCare är en **statisk madrass**, dvs den växlar inte luft, men är ändå kopplad till en kompressor som ser till att rätt luftmängd bibehålls.

Kategori: Förebyggande och behandlande madrass för brukare som har konstaterade sår, upp t.o.m. sårgrad 2-3.

Brukarvikt: 300 kg

Material: Polyurethan/PVC

S-nr: 14902 (inkl kompressor/pump)

CuroCell 3 CX 13 Care of Sweden



Upphandlad lagervara.

S-nr: 34513 (madrass inkl kompressor)

Mått: 90x200x13

Kategori: Växeltrycksmadrass. Behandlande upp t.o.m. sårgrad 3.

Brukarvikt: 160 kg

Finns även i 105 cm bredd, S-nr 34518 (beställningsvara).

CuroCell 4 Pro Care of Sweden



Upphandlad lagervara.

S-nr: 34659 (madrass inkl kompressor)

Mått: 90x200x21 cm

Kategori: Växeltrycksmadrass. Behandlande upp t.o.m. sårgrad 4.

Brukarvikt: 200 kg

OBS! Lägg **direkt på sängbotten!** Ingen basmadrass under behövs.

Roho/StarMatt

Etac



S-nr: 16589 Roho (svart) ersätts vid nyinköp av:

S-nr: 38109 Star Matt (gul)

Kategori: Statisk madrass med luftfyllda celler. Madrassdelarna pumpas upp individuellt, med hjälp av medföljande handpump. Behandlande upp t.o.m. sårgrad 4.

Mått: 86x49x8,5 cm/del

Brukarvikt: Obegränsad.

Förskrivs på pappersblankett.

UTGÅNGNA MADRASSMODELLER

CuroCell Nova
Care of Sweden



OBS! Utgången modell, tillverkas inte längre. Kan endast förskrivas vid tillgång på lager.

Kategori: Växeltrycksmadrass. Behandlande madrass upp t.o.m. sårgrad 2.

S-nr: 34512 (madrass inkl kompressor)

Mått: 90x200x13

Brukarvikt: 150 kg

S-nr 34519 CuroCell Nova CX13 105 cm bred. Förskrivs endast vid tillgång på lager.

Prevento Bas

Parir AB



OBS! Utgången modell, tillverkas inte längre. Kan enbart förskrivas vid tillgång på lagret.

Kategori: Växeltrycksmadrass. Behandlande madrass upp t.o.m. sårgrad 2.

Material: Polyurethan

Brukarvikt: 30-120 kg

S-nr: 17300 (kompressor ingår)

Prevento Plus Parir AB



OBS! Utgången modell, tillverkas inte längre. Kan endast förskrivas vid tillgång på lagret.

Kategori: Behandlande växeltrycksmadrass för brukare som har konstaterade sår, upp t.o.m. sårgrad 3.

Material: Polyurethan

Brukarvikt: 140 kg

S-nr: 17301 (inkl kompressor)

Ställs in efter brukarvikt.

