

Hjälpmedelscentrum utbildar

Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:

Helena Persson

Tel: 021-174461 helena.k.persson@regionvastmanland.se

Annika Widaeus

Tel: 021-174466 annika.widaeus@regionvastmanland.se

Jenny Ridderstolpe

Tel: 021-176661 jenny.ridderstolpe@regionvastmanland.se

Våren 2019

Förskrivningsprocessen för eldrivna rullstolar

Förskrivning av 3-hjulig elrullstol/ manuell styrning utan hjälpmedelskonsulent Ex. Fortress Calypso, Sterling Elite 2 plus	Förskrivning av elrullstol med avancerat sittande eller styrsätt. Utprovning sker tillsammans med hjälpmedelskonsulent
Ärendet startar när förskrivarens bedömning styrker patientens behov av elrullstol och att patienten uppfyller kriterierna för elrullstol enligt <i>Hjälpmedelshandboken</i> .	
Förskrivaren går tillsammans med patienten igenom <i>Underlag för utprovning av elrullstol, Information när du får låna elrullstol</i> samt <i>Lånevillkor</i> och <i>Blankett för körträning</i> . Förskrivaren bedömer om godkänd förvaring finns alt. startar ärende för BAP. Förskrivaren bedömer om tveksamheter föreligger för patienten att framföra elrullstolen på ett säkert sätt och kan begära in <i>Medicinsk bedömning för elektrisk rullstol av patientansvarig läkare</i> .	
Förskrivaren kontakter kundtjänst och bokar aktuell elrullstol som finns i utställningen. Nyckel hämtas i kundtjänst. Rum bokas vid behov. Patient och förskrivare träffas på Hjälpmedelscentrum för utprovning, det är ett krav innan förskrivning.	Ladda ner blankett <i>Underlag för utprovning av elrullstol</i> från webSesam – Allmän info eller Vårdgivarwebben. Fyll i efterfrågade uppgifter. I webSesam bifogas underlaget till arbetsorder-utprovning elrullstol. Se Sesaminstruktion Arbetsorder, Utprovning och Specialanpassning länk nedan
Förskrivaren går igenom <i>Information när du får låna elrullstol och lånevillkor</i> med patienten, där förskrivaren fyllt i elrullstolens värde. Patient skriver under lånevillkor och en kopia skickas till Hjälpmedelscentrum. Förskrivaren lägger elrullstolsordination i webSesam, med ev. komponenter. För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till hemadressen. Se till att uppgift om telefonnummer och ev. kontaktperson är korrekt. Alternativt välj Kund och Turbil till förskrivare/beställare. I fältet Övrig information fyll i om önskemål av viss sitthöjd önskas eller om nyckel skall levereras till annan än patient.	Hjälpmedelskonsulenten kontakter förskrivaren och bokar en utprovningstid på Hjälpmedelscentrum eller i patientens hemmiljö. Vid utprovningen går förskrivaren igenom <i>Information när du får låna elrullstol och lånevillkor</i> , där hjälpmedelskonsulent fyller i elrullstolens värde. Efter utprovning lägger hjälpmedelskonsulent beställning på överenskommen elrullstol. Ordinerad elrullstol är rekonditionerad/begagnad elrullstol eller nybeställd beroende på behov och tillgång. Ytterligare utprovningstillfällen kan vara nödvändiga. Hjälpmedelskonsulent beställer transport av elrullstol enligt förskrivarens önskemål.
Utleverans av elrullstol kan inte ske innan godkänd förvaringsplats finns tillgänglig.	
Förskrivaren ansvarar för körträning med patienten i dess närmiljö till dess att förskrivaren bedömer att patienten klarar av att framföra elrullstolen på ett säkert sätt för sig själv och andra.	
Förskrivaren ansvarar för löpande uppföljning av patientens användande av elrullstol. Blankett <i>Uppföljning av elrullstol</i> finns att tillgå. Elrullstolen ska användas kontinuerligt under hela året och behovet ska motsvara en körtid på minst 50h/år .	

<https://websesam.regionvastmanland.se/e-sesam/webSESAMdokument/Arbetsorder%20Utprovning%20och%20Specialanpassning%20i%20webSesam.pdf>

Klassindelning av elrullstolar enligt upphandling

A: Ren inomhus-elrullstol. (Pronto M41, Real Mobil 6100 plus, Fleximobil i6, Miniflex)

B1: Inomhus/begränsad utomhus. Enkel sittkomfort. Ev. för vårdarstyrning.
(iChair mcFront)

B2: Utomhus/begränsad inomhus. Enkel sittkomfort (iChair mc 3)

B3: Inomhus/begränsad utomhus. Behov av sittanpassning/Avancerad sittkomfort.
(F3 Corpus, M3 Corpus, C400 3G, C400 vs)

B4: Utomhus/begränsad Inomhus. Behov av sittanpassning/Avancerad sittkomfort.
(F5 Corpus, F5 vs, C500 3G)

B5: Begränsad utomhusanvändning. Enkel sittkomfort. (Fortress Calypso)

C1: Ren utomhusanvändning. Enkel sittkomfort. (X850 3G, Optimus2, Minirosser M-Joy)

C2: Utomhusanvändning. Enkel sittkomfort. (Elite2 Plus, Minicrosser M1)

C3: Utomhusanvändning. Avancerad sittkomfort. (Minicrosser M2 med Ergosäte)



Real 6100 plus

Firma: Mercado Medic AB
Avtalsstol

Klass A: ren inomhus elrullstol

- Hindertagning: 4 cm
- Högsta brukarvikt: 135 kg
- Körsträcka: ca 15 km
- Hastighet: 4,5 km/h
- Stolens vikt, inklusive batterier: 76 kg
- Totallängd: 79,5 cm
- Totalbredd: 57 cm
- Sittbredd: 29-48 cm
- Sittdjup: 32-48 cm
- Sitthöjd: 38-58, 46-74 och beroende av sittdyna +6 cm

Anteckningar: _____



Real Mobil 6100

Firma: Mercado Medic AB

Ej avtalsstol- ej nyinköp

Klass A: Ren inomhus elrullstol

- Hindertagning: 4 cm
- Högsta brukarvikt: < 55, 55-90, 90-130
- Körsträcka: 8 timmar
- Hastighet: 4,5 km/h
- Stolens vikt: 74,5 kg inkl. batterier
- Totallängd: 80 cm
- Totalbredd: 65 cm

Anteckningar: _____



Pronto M41

Firma: Invacare
Avtalsstol

Klass A1 För inomhusanvändning pga **kort körsträcka och utan belysning**

- Hindertagning 5cm
- Högsta brukarvikt 136 kg
- Körsträcka 20 km
- Hastighet 6km/h
- Stolens vikt 112-128kg beroende på utrustning
- Totallängd 103 cm
- Totalbredd 61 cm
- Sittbredd: 38-53 cm
- Sittdjup: 41-56 cm
- Sitthöjd: 42-72 cm

Anteckningar: _____



Flexmobil i6 med arbetsstolsstolsits eller komfortsits

Firma: Eurovema
Avtalsstol

Klass A1: Ren inomhusrullstol

- Hindertagning: max 3 cm
- Högsta brukarvikt: 150 kg
- Körsträcka: 8,5 tim
- Hastighet: 4 km/h
- Stolens vikt: 98 kg inkl. batterier
- Totallängd: 80 cm
- Totalbredd: 57 cm
- Sittbredd: 36-54 cm
- Sittdjup: 29-54 cm
- Sitthöjd: 42-67 cm alt. 50-90 cm till sitsens ovansida

Anteckningar: _____



Miniflex med arbetsstolssits eller komfortsits

Firma: Eurovema

Avtalsstol

Klass A: ren inomhus elrullstol

- Hindertagning: max 3 cm
- Högsta brukarvikt: 125 kg
- Körsträcka: 8,5 tim
- Hastighet: 4 km/h
- Stolens vikt: 85 kg inkl. batterier
- Totallängd: 73 cm
- Totalbredd: 59 cm
- Sittbredd 40, 45,53 cm
- Sittdjup: 40-61 cm
- Sitthöjd: 45-63 cm alt. 50-75 cm till sitsens ovasida

Anteckningar: _____



iChair mc Front

Firma: LB Medical

Avtalsstol

Klass B1: Inomhus/begränsad utomhus enkel sittkomfort

- Hindertagning : 7 cm
- Högsta brukarvikt : 160 kg + 10 kg last
- Körsträcka: 32 km
- Hastighet: 10 km/h
- Stolens vikt: 124 kg
- Totallängd: 113 cm
- Totalbredd: 62 cm
- Sittdjup: 40-56 cm
- Sittbredd: 38-65 cm
- Sitthöjd: 42, 46 el. 49 cm utan sittdyna

Anteckningar: _____



iChair mc3

Firma: LB Medical
Avtalsstol

Klass B2: Utomhus/begränsad inomhus

- Hindertagning : 8,0 cm
- Högsta brukarvikt : 160 kg
- Körsträcka: 30 km
- Hastighet: 10 km/h
- Stolens vikt: 94/118 kg
- Totallängd: 113 cm
- Totalbredd: 59 cm
- Sittdjup: 40-56 cm
- Sittbredd: 38-65 cm
- Sitthöjd: 43-60 cm utan sittdyna

Anteckningar: _____



F3 Corpus

Firma: Permobil
Avtalsstol

Klass: B3 inomhus begränsad utomhus, avancerad sittkomfort

- Hindertagning: 6-7 cm
- Högsta brukarvikt: 150 kg
- Körsträcka: 25-30 km
- Hastighet: 10 km/h
- Stolens vikt: 184 kg inklusive batterier
- Totallängd: 114 cm
- Totalbredd: 61 cm
- Sittbredd 42-52 cm i 5 cm steg
- Sitsdjup: 37-57 cm 2,5 cm steg
- Sitthöjd: 45 cm utan dyna

Anteckningar: _____



M3 Corpus

Firma: Permobil

Avtalsstol

Klass: B3 inomhus begränsad utomhus, avancerad sittkomfort

- Hindertagning: 5 cm
- Högsta brukarvikt: 150 kg
- Körsträcka: 25-30 km
- Hastighet: 10km/h
- Stolens vikt: 183 kg inklusive batterier
- Totallängd: 108 cm
- Totalbredd: 61,5 cm
- Sittbredd: 42-57 cm
- Sitsdjup: 37-57 cm
- Sitshöjd: 45 cm

Anteckningar: _____



C400 3G

Firma: Permobil

Ej avtalsstol-ej nyinköp

Avancerad sittkomfort.

Klass B3- Inomhus/Begränsad utomhus, avancerad sittkomfort

- Hindertagning: 6 cm
- Högsta brukarvikt: 136 kg
- Körsträcka: 30km
- Hastighet: 7,5 km
- Totallängd:113 cm
- Stolens vikt:175 kg inklusive batterier
- Totalbredd: 62cm
- Sittbredd 42-57 cm
- Sitsdjup: 37-57 cm
- Sitthöjd: 48 cm utan dyna

Anteckningar: _____



K300 Psjr

Firma: Permobil
Avtalsstol

Klass B3- Inomhus/Begränsad utomhus, avancerad sittkomfort

- Hindertagning: 7 cm
- Högsta brukarvikt: 76 kg
- Körsträcka: 30km
- Hastighet: 7 km/h
- Totallängd:108 cm
- Stolens vikt:120 kg inklusive batterier
- Totalbredd: 62cm
- Sittbredd 27,5-40 cm
- Sitsdjup: 25-45 cm
- Sitthöjd: 42-62 cm utan dyna

Anteckningar: _____



F5 Corpus

Firma: Permobil

Avtalsstol

Klass: B4 Utomhus/begränsad inomhus, avancerad sittkomfort

- Hindertagning: 7-8 cm
- Högsta brukarvikt: 150 kg
- Körsträcka: 25-35 km
- Hastighet: 12 km/h
- Stolens vikt: 186 kg inklusive batterier
- Totallängd: 114 cm
- Totalbredd: 65 cm
- Sittbredd 42-52 cm i 5 cm steg
- Sitsdjup: 37-57 cm 2,5 cm steg
- Sitthöjd: 45 cm utan dyna

Anteckningar: _____



C500 3G

Firma: Permobil

Ej avtalsstol – ej nyinköp

Klass B4- Utomhus/begränsad inomhus, avancerad sittkomfort.

- Hindertagning: 6 cm
- Högsta brukarvikt: 136 kg
- Körsträcka: 30 km
- Hastighet: 7,5 km/h
- Stolens vikt: 181 kg inklusive batterier
- Totallängd: 122,5 cm
- Totalbredd: 67,5 cm
- Sittbredd 42-57 cm
- Sitsdjup: 37-57 cm
- Sitthöjd: 48 cm utan dyna

Anteckningar: _____



X 850 3G

Firma: Permobil
Avtalsstol

Klass C1 Ren utomhusanvändning, enkel sittkomfort.

- Hindertagning: 11 cm
- Högsta brukarvikt: 136 kg
- Körsträcka: 35-45 km
- Hastighet: ~15 km/h
- Stolens vikt inklusive batterier: 190 kg
- Totallängd: 126-146 cm
- Totalbredd: 72 cm
- Sitsdjup: 36-56 cm
- Sittbredd: 43-48 cm
- Sitthöjd: 56 cm

Anteckningar: _____



Optimus 2

Firma: LB-Medical
Avtalsstol

Klass: C1 Ren utomhusanvändning, enkel sittkomfort.

- Hindertagning: 11cm
- Högsta brukarvikt: 150 kg + 10 kg last
- Körsträcka: ca. 40 km
- Hastighet: 10km/h
- Stolens vikt inkl. batterier: 150 kg
- Totallängd inkl benstöd: 116 cm
- Chassibredd: 68 cm
- Sitsbredd: 38-56 cm, std. 43 cm
- Sitsdjup: 45-49 cm, std. 49 cm
- Sitthöjd: 56 cm

Anteckningar: _____



Mini Crosser M-Joy

Firma Minicrosser AB

Avtalsstol

Klass: C1 Ren utomhusanvändning, enkel sittkomfort

- Hindertagning: 11 cm
- Högsta brukarvikt: 175 kg
- Körsträcka: ca 55 km
- Hastighet: max 10 km/h
- Stolens vikt, inklusive batterier: 168 kg
- Totallängd: 145 cm
- Totalbredd: 67 cm
- Sittbredd: 40,45,50 cm
- Sitsdjup: 32-52 cm
- Sitthöjd: 45-55 cm

Anteckningar: _____
