

Hjälpmedelscentrum utbildar

Eldrivna rullstolar med manuell styrning

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent

Helena Persson

Tel: 021-174461 helena.k.persson@regionvastmanland.se

Annika Widaeus

Tel: 021-174466 annika.widaeus@regionvastmanland.se

Jenny Ridderstolpe

Tel: 021-176661 jenny.ridderstolpe@regionvastmanland.se

Våren 2019

Förskrivningsprocessen när förskrivaren själv gör utprovning av eldrivna rullstolar med manuell styrning

Ärende startas när förskrivarens bedömning styrker patientens behov av elrullstol och att patienten uppfyller kriterierna för elrullstol enligt *Hjälpmedelshandboken*.

1. Förskrivaren går tillsammans med patienten igenom *Underlag för elrullstolsutprovning, Information när du får låna elrullstol* inkl *Lånevillkor* och *Blankett för körträning*. Förskrivaren bedömer om godkänd förvaring finns, alt startar ärende för BAP. Förskrivaren bedömer om tveksamheter föreligger för patienten att framföra elrullstol på ett säkert sätt och kan begära in *Medicinsk bedömning för elektrisk rullstol av patientansvarig läkare*.

Om patienten har behov av komponenter som ej är förskrivningsbara via webSESAM (t ex. sityft eller dubbelkommando), sker utprovning tillsammans med elrullstolskonsulent. *Underlag för elrullstolsutprovning* skickas då in till Hjälpmedelscentrum och tid bokas för en utprovning.

2. Förskrivaren kontaktar kundtjänst och bokar aktuell elrullstol som finns i publika ytan. Nyckel hämtas i kundtjänst. Vid behov bokas även ett rum. Patient och förskrivare träffas på Hjälpmedelscentrum för utprovning, det är ett krav innan förskrivning.

Om förskrivning av elrullstol blir aktuell, fyller förskrivaren i lånevillkoren och prisuppgifter som hämtas i webSESAM. Lånevillkoren läses igenom och undertecknas av patienten, ett exemplar lämnas till Hjälpmedelscentrum. Om *Restriktioner* behövs, upprättas dessa skriftligt mellan förskrivare och patient.

3. Elrullstol med tillbehör förskrivs i webSESAM. Se stolsbeskrivning med tillhörande förskrivningsbara komponenter och tjänst artiklar för inställningar i ***Utbildningsmaterial för elrullstol med manuell styrning***. Förskrivaren får information om leveransdatum redan vid orderläggning i webSESAM.

Utleverans av elrullstol kan inte ske innan godkänd förvaringsplats finns tillgänglig.

Hjälpmedelcentrums ambition är att dessa elrullstolar ska kunna levereras med nästkommande turbil om lagersaldo finns. För leverans till förskrivare väljs Kund och Turbil till förskrivare/beställare. För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till hemadressen. Patientuppgifter med adress och telefonnummer samt eventuella **uppgifter om kontaktperson** ska vara korrekta, det är viktigt eftersom leveransplaneraren tar kontakt med patienten dagen innan utleverans.

Om HMC inte får kontakt med patient/kontaktperson dagen innan förskjuts leveransen.

I fältet **Övrig information** ska anteckningar göras om det finns önskemål om att nyckeln ska levereras till annan än patienten eller tex att en viss sitthöjd ska vara inställd.

4. Förskrivaren ansvarar för körträning med patienten i dess närmiljö till dess att förskrivaren bedömer att patienten klarar av att framföra elrullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

5. Förskrivaren ansvarar för löpande uppföljning av patientens användande av elrullstol, till det kan blankett *Uppföljning av elrullstol* användas. Elrullstolen ska användas kontinuerligt under hela året och behovet ska motsvara en körtid på minst 25 timmar per år.



Fortress Calypso

Firma: Sunrise medical
Avtalsstol

Klass: B5 Begränsad utomhusanvändning, enkel sittkomfort

Hindertagning	7,5 cm
Högsta brukarvikt	125 kg
Körsträcka	30 km
Hastighet	10 km/h,
Stolens vikt	100 kg inklusive batterier
Totallängd	121 cm
Totalbredd	63 cm
Sitthöjd	43-49 cm (3 nivåer)

För att ändra sitthöjd behövs 13mm nyckel och 6 mm insexnyckel.

Lyft bort sitsen rakt upp. Lossa främre kåpan som sitter fast med kardborrband. Lossa skruven på bakre kåpan. Lossa bakre kåpan som sitter med kardborrband. Lossa muttern på sittstolpen och dra ur bulten. Välj sitthöjd, sätt i bulten och dra åt muttern. Sätt på bakre kåpan. Sätt tillbaka skruven i bakre kåpan. Sätt på främre kåpan. Lyft i sitsen.

Anteckningar: _____

Fortress Calypso

Firma: Sunrise medical

Sesamnummer:

Elrullstol Calypso inkl korg och säte. S-324 38

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Hö sida S-351 78

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Vä sida S-351 79

Laddare TC Switch S-15634

Backspegel Vä S-324 40

Backspegel Hö S-324 41

Kom ihåg att välja *inställning* när kryckkäpphållare eller syrgashållare beställs!

Kryckkäpphållare S-324 39

Inställning Kryckkäpphållare Hö S-351 74

Inställning Kryckkäpphållare Vä S-351 75

Syrgashållare S-329 62

Inställning Syrgashållare Hö S-351 76

Inställning Syrgashållare Vä S-351 77

För leverans till förskrivares lager välj Kund och Turbil till förskrivare/beställare.

För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till hemadressen.

Patientuppgifter med adress och telefonnummer samt eventuell **uppgifter om kontaktperson** ska vara korrekta, det är viktigt eftersom Leveransplaneraren tar kontakt med patienten dagen innan utleverans. Om HMC inte får kontakt med patient/kontaktperson dagen innan förskjuts leveransen.

I fältet Övrig information ska anteckningar göras om det finns önskemål om att nyckeln ska levereras till annan än patienten, eller tex att en viss sitthöjd ska vara inställd.

Anteckningar: _____



Elite2 Plus

Firma: Sunrise Medical
Avtalsstol

Klass: C2 Utomhusanvändning, enkel sittkomfort

Hindertagning:	10 cm
Högsta brukarvikt:	175 kg
Körsträcka	30 km
Hastighet	15 km/h
Stolens vikt	140 kg inklusive batterier
Totallängd	139 cm
Totalbredd	65 cm
Sitthöjd	44-54 cm

För att ändra sitthöjd behövs 2 st 17mm nyckel.

Lyft av sitsen rakt upp. Ta bort främre kåpan genom att lossa gummistroppen. Sitsstolpen kan justeras på höjden i 4 lägen. Skruva bort de två skruvarna och muttrarna. Placera dem i önskad position och dra åt muttrarna. Sätt tillbaka främre kåpan och lyft i sitsen.

Anteckningar: _____

Elite2 Plus

Firma: Sunrise Medical

Sesamnummer:

Elite 2 plus inkl. korg och säte	S-349 48
Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Hö	S-351 67
Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Vä	S-351 80
Inställning hastighet 10 km/h	S-36297
Inställning hastighet 15 km/h	S-36298
Laddare TC Switch	S-15634
Backspegel Hö.	S-349 54
Backspegel Vä.	S-349 53

Kom ihåg att välja *inställning* när kryckkäpphållare eller syrgashållare beställs!

Kryckkäpphållare	S-349 55
Inställning Kryckkäppshållare Hö	S-351 61
Inställning Kryckkäppshållare Vä	S-35162

Syrgashållare 107 mm inkl. fäste	S-169 16
Syrgashållare 119 mm inkl. fäste	S-349 57
Inställning Syrgashållare Hö	S-351 63
Inställning Syrgashållare Vä	S-351 64

För leverans till förskrivares lager välj Kund och Turbil till förskrivare/beställare.

För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till hemadressen.

Patientuppgifter med adress och telefonnummer samt eventuell **uppgifter om kontaktperson** ska vara korrekta, det är viktigt eftersom Leveransplaneraren tar kontakt med patienten dagen innan utleverans. Om HMC inte får kontakt med patient/kontaktperson dagen innan förskjuts leveransen.

I fältet Övrig information ska anteckningar göras om det finns önskemål om att nyckeln ska levereras till annan än patienten, eller tex att en viss sitthöjd ska vara inställd.

Anteckningar: _____



Mini Crosser M1

Firma: Minicrosser

Ej avtalsstol- ej nyinköp

I ersättningskedja för Elite2 Plus

Klass: C2 Utomhusanvändning, enkel sittkomfort.

Hindertagning	12,0 cm
Högsta brukarvikt	175 kg
Körsträcka	30 km
Hastighet	15 km/h
Stolens vikt	151 kg inklusive batterier
Totallängd	135 cm
Totalbredd	66 cm
Sitthöjd	52-62 cm

Ändra sitthöjd, inga verktyg behövs, finns 5 lägen.

Lyft av sätet rätt upp. På stolpen finns en spärr med svart hatt. Tryck in spärren så att den fjädrar ut. Reglera stolpen till önskad höjd. Tryck in spärren i botten. Lyft tillbaka sätet i stolpen.

Anteckningar: _____

Mini Crosser M1

Firma: Minicrosser

Sesamnummer: Minicrosser M1 inkl. korg S-323 66 OBS! exkl. säte

Eblo säte S-347 65

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Hö S-351 72

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Vä S-351 73

Inställning hastighet 10 km/h S-36297

Inställning hastighet 15 km/h S-36298

Laddare TC Switch S-15634

Backspegel höger S-323 69

Backspegel vänster S-323 70

Kom ihåg att välja *inställning* när kryckkäpphållare eller syrgashållare beställs!

Kryckkäppshållare dubbel S-323 71

Inställning Kryckkäppshållare Hö S-351 68

Inställning Kryckkäppshållare Vä S-351 69

Syrgashållare S-329 63

Inställning Syrgashållare Hö S-351 70

Inställning Syrgashållare Vä S-351 71

För leverans till förskrivares lager välj Kund och Turbil till förskrivare/beställare.

För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till hemadressen.

Patientuppgifter med adress och telefonnummer samt eventuell **uppgifter om kontaktperson** ska vara korrekta, det är viktigt eftersom Leveransplaneraren tar kontakt med patienten dagen innan utleverans. Om HMC inte får kontakt med patient/kontaktperson dagen innan förskjuts leveransen.

I fältet Övrig information ska anteckningar göras om det finns önskemål om att nyckeln ska levereras till annan än patienten, eller tex att en viss sitthöjd ska vara inställd.

Anteckningar: _____



Mini Crosser M2

Firma: Minicrosser

Avtalsstol- större modell, avancerat sittande med Ergosäte i olika sittbredder.

Kan också utrustas med sitslyft.

Klass C3 Utomhusanvändning, avancerad sittkomfort

OBS! M2 är EJ förskrivningsbar via webSesam. Utprovning sker tillsammans med konsulent. Befintlig M2 kan kompletteras med tillbehör via webförskrivning.

Hindertagning	11,0 cm
Högsta brukarvikt	175 kg
Körsträcka	30 km
Hastighet	15 km/h
Stolens vikt	151 kg inklusive batterier
Totallängd	135 cm
Totalbredd	68 cm
Sitthöjd	52-62 cm

Anteckningar: _____

Mini Crosser M2

Firma: Minicrosser

Sesamnummer:

Minicrosser M2 inkl. korg. Finns i sittbredd: 40, 45, 50 och 55cm.

Backspegel Hö S-323 69

Backspegel Vä S-323 70

Kryckäppshållare dubbel S-323 71

Inställning Kryckäppshållare Hö S-351 68

Inställning Kryckäppshållare Vä S-351 69

Syrgashållare S-329 63

Inställning Syrgashållare Hö S-351 70

Inställning Syrgashållare Vä S-351 71

Anteckningar: _____
