


# Sitthöjdstabell Cross 5

## Bakre sitthöjdstabell

Cross 5  
Cross 5 XL


### Drivhjulposition höjd

Sitshöjd bak

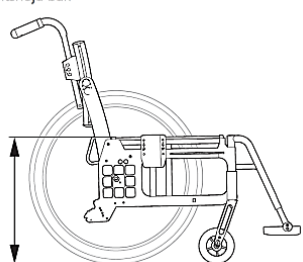



Bak

Fram

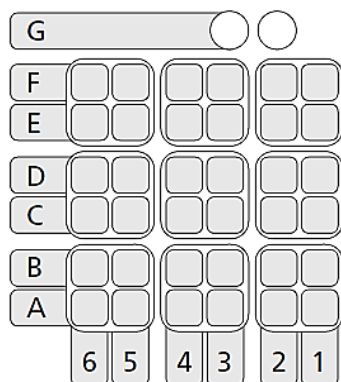

Avstånd drivhjul till sits

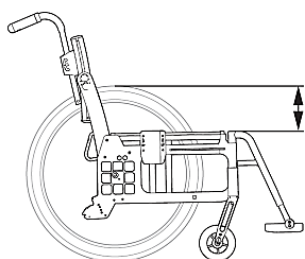

		Drivhjul	Sitshöjd	Avstånd		
Position A	20"	46 cm	4,5 cm	●	●	
	22"	48,5 cm	7,0 cm	●	●	
	24"	51 cm	9,5 cm	●	●	
	26"	53 cm	12 cm	●	●	
Position B	20"	44 cm	6,5 cm	●	●	
	22"	46,5 cm	9,0 cm	●	●	
	24"	49 cm	11,5 cm	●	●	
	26"	51 cm	14 cm	●	●	
Position C	20"	42 cm	8,5 cm	●	●	
	22"	44,5 cm	11,0 cm	●	●	
	24"	47 cm	13,5 cm	●	●	
	26"	49 cm	16 cm	●	●	
Position D	20"	40 cm	10,5 cm	●	●	
	22"	42,5 cm	13,0 cm	●	●	
	24"	45 cm	15,5 cm	●	●	
	26"	47 cm	18 cm	●	●	
Position E	20"	38 cm	12,5 cm	●	●	
	22"	40,5 cm	15,0 cm	●	●	
	24"	43 cm	17,5 cm	●	●	
	26"	45 cm	20 cm	●	●	
Position F	20"	36 cm	14,5 cm	●	●	
	22"	38,5 cm	17,0 cm	●	●	
	24"	41 cm	19,5 cm	●	●	
	26"	43 cm	22 cm	●	●	
Position G	20"	34 cm	16,5 cm	●	●	
	22"	36,5 cm	19,0 cm	●	●	
	24"	39 cm	21,5 cm	●	●	
	26"	-	-			

Drivhjul Cross 5 massiva 20" utan drivring

S-35426

Drivhjul Cross 5 massiva 22" utan drivring

S-35425

Drivhjul Cross 5 massiva 24" utan drivring

S-35424

Drivring metall 17"

S-07062

Drivring metall 19"

S-03503

Drivring metall 21"

S-05578

## Främre sitthöjdstabell

Sitthöjdsjustering genom byte av framgaffel/länkhjul

Främre sitthöjdstabell															Cross 5		Cross 5 XL		
		Länkhjulposition (cm)																	
				Gaffel extra kort			Gaffel Kort			Gaffel Medium			Gaffel Lång						
		Drivhjul-position	Länkhjul	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
Lågt breddat länkhjulsfäste	G	4"*	-	34-38	35,5-39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
Lågt breddat länkhjulsfäste	A-F	5"***	-	-	-	36-40	37,5-41,5	39-43	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
		6½"	-	-	-	-	-	41-45	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
Std länkhjulsfäste	A-F	5"***	-	-	-	37,5-41,5	39-43	40,5-44,5	43-46	45-48	46-49	-	-	-	●	●			
		6½"	-	-	-	-	41-45	42,5-46,5	46-48	47-49	48-51	50,5-52,5	51,5-53,5	52,5-55,5	●	●			
	A-C	8"***	-	-	-	-	-	-	-	48-51	49-52	-	52,5-54,5	53,5-56,5	●	●			

\*Max brukarvikt 100 kg

För korrekt inställning av framgaffelfästet: Max bakåtvinkling 6 cm högre fram än bak (9°), max framåtvinkling 2 cm lägre fram än bak (3°).

\*\*Fungerar i balansering 4-6 med 3° bakåtvinkel och Std benstöd. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. För länkhjul 8x2", använd gaffel Transit (ger sitthöjd 47-51 cm).

\*\*\*Med Cross 5 XL max brukarvikt 135 kg.

Länkhjul Cross 5 massivt 5" (\*\*\*) S-11154

Länkhjul Cross 5 massivt 6,5" S-02841

Framgaffel Cross 5 kort S-01123

Framgaffel Cross 5 medium S-01124

Framgaffel Cross 5 XL kort S-36702

Framgaffel Cross 5 XL medium S-36703

Vid behov av extra låg eller extra hög sitthöjd (4" eller 8" länkhjul) – kontakta hjälpmedelskonsulent.