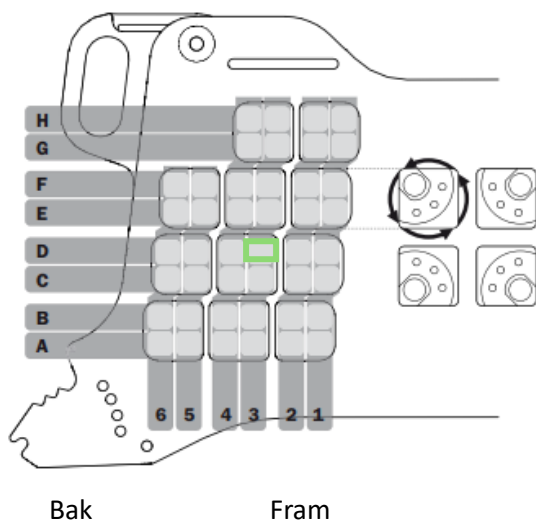


Sitthöjdstabell Cross 6-2025

Bakre sitthöjdstabell

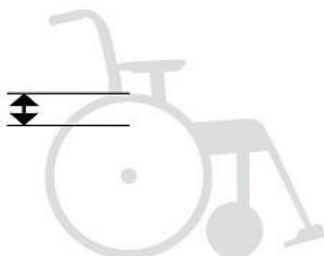


Bak

Fram



Sitshöjd



Drivhjul

Avstånd sits-drivhjul

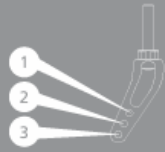
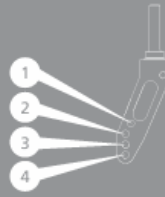
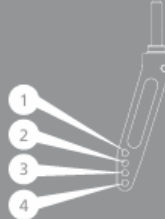
	Drivhjul	Sitshöjd cm	Avstånd cm sits-drivhjul
Position A	20"	46	4.5
	22"	48.5	7.0
	24"	51	9.5
	25"	52,5	11
Position B	20"	44	6.5
	22"	46.5	9.0
	24"	49	11.5
	25" Maxx	50,5	13
Position C	20"	42	8.5
	22"	44.5	11.0
	24"	47	13.5
	25" Maxx	48,5	15
Position D	20"	40	10.5
	22"	42.5	13
	24"	45	15.5
	25" Maxx	46,5	17
Position E	20"	38	12.5
	22"	40.5	15
	24"	43	17.5
	25" Maxx	44,5	19
Position F	20"	36	14.5
	22"	38.5	17
	24"	41	19.5
	25" Maxx	42,5	21
Position G	20"	34	16.5
	22"	36.5	19
	24"	39	21.5
	25" Maxx	40,5	23
Position H	20"	32	18.5
	22"	34.5	21
	24"	37	23.5
	25" Maxx	38,5	25

Grön markering anger standardinställning

Drivhjul 20t Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025 qr massivt utan drivring 6 fästpunkter	S-45446
Drivhjul 22t Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025 qr massivt utan drivring 6 fästpunkter	S-45445
Drivhjul 24t Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025 qr massivt utan drivring 6 fästpunkter	S-45444
Drivring 17t Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025 metall 6 fästpunkter	S-46475
Drivring 19t Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025 metall 6 fästpunkter	S-46474
Drivring 21t Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025 metall 6 fästpunkter	S-46473
Drivhjul 20t Cross 5/Cross 6 qr för vårdarbroms, alu-drivring	S-36447
Drivhjul 22t Cross 5/Cross 6 qr för vårdarbroms, rfr-drivring	S-35930
Drivhjul 24t Cross 5/Cross 6 qr för vårdarbroms, rfr-drivring	S-17325

Främre sitthöjdstabell

Sitthöjdsjustering genom byte av framgaffel/länkhjul

Främre sitthöjdstabell 45 mm länkhjulsnav													
													
		Länkhjulsposition											
		Gaffel XS (alu)			Gaffel S (stål)				Gaffel M (stål)				
Framgaffelfäste	Länkhjul	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	
Lågt breddat	4" *	320-360	335-375	345-385									
	5"					360-400							
Standard/ Breddat	5"				375-415	385-425	395-435	410-450	425-465	435-475	445-485	460-500	
	6"					395-435	410-450	425-465	435-475	445-485	460-500	475-515	
	8" **							450-490	465-500	475-515	495-525	500-540	
Högt	8"										500-565	500-575	

Mått i millimeter.

* Max brukarvikt 100 kg.

För korrekt inställning av framgaffelfästet: Max bakåtvinkling 6 cm högre fram än bak (9°), max framåtvinkling 2 cm lägre fram än bak (3°).
Fler kombinationer än ovanstående kan vara möjliga.

** Fungerar i balansering 4-6 med 3° bakåtvinkel och Std benstöd. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare.

Länkhjul 5t Cross6-2025/Cross5XL-2025 125x34

S-46476

Länkhjul 6t Cross6-2025/Cross5XL-2025/Prio-2025/Xact 150x34

S-44953

Framgaffel kort Cross6-2025/Cross5XL-2025/Prio-2025

S-45397

Framgaffel medium Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025/Transit-2025

S-45399

Vid behov av extra låg eller extra hög sitthöjd (4t eller 8t länkhjul) – kontakta hjälpmedelskonsulent.