

Produktinformation

Inhalatorer



Hjälpmedelskonsulent

Åsa Pettersson, telefon 021-17 68 67

E-post hmc.mbh@regionvastmanland.se

Elin Strandman, telefon 021-17 34 92

E-post hmc.mbh@regionvastmanland.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Föreskrivningsregler.....	3
Artikelansvar	3
Allmänna föreskrivningsregler	3
Stationära Inhalatorer.....	4
Inhalator Pari TurboBOY SX	4
Inhalator PariBOY Classic.....	4
Tillbehör Pari.....	5
Inhalator Microlife NEB Pro	6
Tillbehör NEB pro	6
Portabla Inhalatorer.....	7
Inhalator Pari Velox.....	7
Tillbehör Velox.....	7
Inhalator Eflow Rapid	8
Tillbehör Eflow	8
Inhalator till ventilatorkrets.....	9
Aerogen Solo	9
Tillbehör Solo.....	9
Tidigare sortiment	10
Inhalator Albatross	10
Inhalator Inspiration Elite Dolema	11
Inhalator InnoSpire Deluxe SideStream	12
Inhalator Aeronex Go.....	13
Inhalator Pari Boy Mobil S.....	13

FÖRSKRIVNINGSGREGLER

Artikelansvar

Artikelansvar	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa. Här ingår även inhalatorer, slem suger, PEP och TENS.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekvisitions hjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda, griptång och sängklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.
Klinikhjälpmedel	Gemensamt för klinikhjälpmedel är att de huvudsakligen förskrivs från den specialiserade vården. För klinikhjälpmedel utgår normalt kostnadsansvaret från beställande vårdenhet, det vill säga förskrivarens arbetsplats betalar för hjälpmedlet. Kostnadsansvaret kan också ligga hos fastställd vårdenhet/klinik oavsett beställare. Exempel på hjälpmedel är CPAP, hostmaskin och diabeteshjälpmedel.

Allmänna förskrivningsregler

Artikel	Kriterier/utprovningrutin	Kommentarer
Inhalator	<p>Förskrivning kan ske av alla läkare i Västmanland.</p> <p>Fysioterapeut eller sjuksköterska kan ansvara för beställning och utprovning av inhalator. Förskrivning sker via WebSesam eller blankett i Uppladdningstjänsten.</p> <p>Förskrivaren ansvarar för att instruktion ges till patient kring hantering av läkemedlet och inhalationsteknik. Rengöringsinstruktioner för de olika inhalatorerna finns på Vårdgivarwebben under fliken inhalatorer. Stationär inhalator förskrivs i första hand.</p>	<p>Patienter med cystisk fibros och andra infektionskänsliga tillstånd kan få flera årskit på en gång. Detta eftersom de slits ut snabbare då de rengörs (kokas) oftare.</p> <p>Max två inhalatorer per patient (en portabel och en stationär).</p>

STATIONÄRA INHALATORER

Inhalator Pari TurboBOY SX

S-16692


Pari TurboBOY SX och PariBOY Classic är likvärdiga inhalatorer och leverans baseras på lagertillgång. De har samma tillbehör. Levereras med ett årsförbrukningsset inkl munstycke, eventuell mask förskrivs separat.

Leverantör	Mediplast AB	
Kokningsbara delar	Ja (masker samt årsförbrukningsset förutom slangen)	
Vikt	1,7 kg	
Rekommenderad fyllningsvolym	2-8 ml	
Nebuliseringskapacitet	0,6 ml/min	
Restvolym	<0,5 ml	
Inhalationslösningar	Inhalatorn kan användas med samtliga på marknaden förekommande inhalationslösningar, <u>inklusive antibiotika.</u> OBS! Då antibiotika ska inhaleras krävs även en filterhållare med skorsten (S-40073) och filterpads (S-41405)	









Inhalator PariBOY Classic

S-44869

Pari TurboBOY SX och PariBOY Classic är likvärdiga inhalatorer och leverans baseras på lagertillgång. De har samma tillbehör. Levereras med ett årsförbrukningsset inkl munstycke, eventuell mask förskrivs separat.

Leverantör	Mediplast AB	
Kokningsbara delar	Ja (masker samt årsförbrukningsset förutom slangen)	
Vikt	1,7 kg	
Rekommenderad fyllningsvolym	2-8 ml	
Nebuliseringskapacitet	0,6 ml/min	
Restvolym	<0,5 ml	
Inhalationslösningar	Inhalatorn kan användas med samtliga på marknaden förekommande inhalationslösningar, <u>inklusive antibiotika.</u> OBS! Då antibiotika ska inhaleras krävs även en filterhållare med skorsten (S-40073) och filterpads (S-41405).	


Tillbehör Pari

<p>Årsförbrukningsset</p> <p>S-16616</p> <p>Årssetet innehåller nebulisator PARI LC Sprint, munstycke, slang och filter till inhalatorn.</p>	
<p>Årsförbrukningsset barn</p> <p>S-41400, Barn 0-4 år (gul)</p> <p>Detta set har andra dysor som ger en mindre partikelstorlek. Innehåller i övrigt samma delar som vanliga årsförbrukningssetet</p>	
<p>Mask polypropylen</p> <p>S-17829 Barn S-17445 Vuxen</p>	
<p>Smartmask</p> <p>S-13671 Vuxen S-42259 Barn S-42258 Baby (0-2 år)</p> <p>S-42273 Vinkelrör 45° (Ingår till vuxenmasken)</p>	 <p>S-13671 S-42259 S-42258</p>
<p>Mask i silikon med vinkel</p> <p>S-10658 Nr 1, 0-1 år S-10659 Nr 2, 1-3år S-10660 Nr 3, från ca 3år</p>	
<p>Tracheo set</p> <p>S-39140 Tracheo Set Pari</p>	
<p>Tillbehör vid inhalation av antibiotika</p> <p>S-40073 Filterhållare med utandningsventil (skorsten)</p> <p>S-41405 Filterpads till utandningsventil. Byts efter varje inhalation. Beställs som förpackning á 100 st.</p> <p>Detta tillbehör bör användas vid inhalation av antibiotika eller läkemedel, där det är viktigt att inget ska gå ut i omgivande luft.</p>	
<p>Avbrottsfunktion</p> <p>S-39042</p> <p>Levererar bara läkemedel när knappen är intryckt. Genom att vrida knappen låses den i intryckt läge.</p>	





Inhalator Microlife NEB Pro

P957010-1

Upphandlad, men inte lagervara

Leverantör	Medidyne AB	
Kokningsbara delar	Ja, dock inte slang och mask	
Vikt	1,765 kg	
Rekommenderad fyllningsvolym	2-8 ml	
Nebuliseringskapacitet	0,37 ml/min	
Restvolym	0,8 ml	
Inhalationslösningar	Inhalatorn kan användas med samtliga på marknaden förekommande inhalationslösningar, <u>exklusive antibiotika.</u>	

Tillbehör NEB pro

Årsförbrukningsset s995002-2	
Litet set = nebuliseringskammare med ventil samt munstycke med ventil s995001-2	
Mask vuxen s995100-1 Mask barn s995101-1	 <p>Vuxen Barn</p>
Luftslang flergångs s995102-0 Kompressorfilter s995103-0	

PORTABLA INHALATORER





Inhalator Pari Velox

S-42246

Levereras med ett årsförbrukningsset inkl munstycke. Eventuell mask förskrivs separat.

Leverantör	Mediplast	
Kokningsbara delar	Ja (masker samt årsförbrukningsset)	
Vikt	Cirka 110 g (exkl batterier)	
Max drifttid	Ca 4 timmar beroende på behandling	
Rekommenderad fyllningsvolym	Max. 6 ml Min. 2 ml	
Nebuliseringskapacitet	0,497 ml /min	
Restvolym	1 ml	
Inhalationslösningar	Samtliga på marknaden mest förekommande inhalationslösningar, förutom antibiotika. Inte godkänd till track	


Tillbehör Velox

Årsförbrukningsset S-42248 Innehåller medicinkopp och munstycke	
Polypropylen Mask S-17829 Barn S-17445 Vuxen	
Smartmask Pari S-13671 Vuxen S-42259 Barn S-42258 Baby (0-2 år) S-42273 Vinkelrör 45° (Ingår till vuxenmasken)	 S-13671 S-42259 S-42258
Mask i silikon med vinkel S-10658 Nr 1, 0-1 år S-10659 Nr 2, 1-3år S-10660 Nr 3, från ca 3år	



Inhalator Eflow Rapid

S-45431 (ersätter äldre modell S-16698 som utgått)

Ej förskrivningsbar i WebSesam. Förskrivs på blankett via Uppladdningstjänsten.
Förskrivs oftast till patienter med cystisk fibros.

Leverantör	Mediplast	
Kokningsbara delar	Ja	
Vikt	55 g (300 g med styrningsmodul och batterier)	
Rekommenderad fyllningsvolym	Max 6 ml	
Restvolym	Ca 0,2 ml	
Inhalationslösningar	Samtliga på marknaden mest förekommande inhalationslösningar, <u>inklusive antibiotika</u> Inte godkänd till track	

Tillbehör Eflow

Årsförbrukningsset S-16740 Innehåller 1 st nebulisator och 1 st aerosolgenerator. Förskriv en extra aerosolgenerator (S-16741) då dessa ska bytas (minst) var 6:e månad.	 S-16740 S-16741
Tillbehör vid inhalation av antibiotika S-40073 Filterhållare med utandningsventil (skorsten) S-41405 Filterpads till utandningsventil. Byts efter varje inhalation. Beställs som förpackning á 100 st. Detta tillbehör bör användas vid inhalation av antibiotika eller läkemedel, där det är viktigt att inget ska gå ut i omgivande luft.	

INHALATOR TILL VENTILATORKRETS

Aerogen Solo


S-45920 (ersätter äldre modeller S-37322 och S-39604 som utgått)

Tyst batteridrivna inhalator som kan kopplas på ventilatorer där övriga inhalatorer inte är kompatibla.

Kan endast förskrivas av Barnkliniken och Lungkliniken efter kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Följande ingår: Styreneheten Aeroneb Pro-X, nätadapter, universalfäste för stolpe/säng.

Årsförbrukningsset (nebuliseringsdelar) och T-stycken beställs separat.

Leverantör	Bröderna Berner AB	
Kokningsbara delar	Nej	
Vikt	13,5 g	
Rekommenderad fyllningsvolym	Max 6 ml	
Nebuliseringskapacitet	0,34-0,47 ml/min	
Restvolym ml	<0,1 ml	
Inhalationslösningar	Inhalatorn kan användas med samtliga på marknaden förekommande inhalationslösningar.	
Max drifttid	45 min. Har nätadapter.	
Drift funktion	30 min/kontinuerlig drift	

Tillbehör Solo

Årsförbrukningsset S-39579 Ett set innehåller 10 st nebulisatorer. Varje håller ca 28 dagar vid användning 4 gånger om dagen eller mindre. Vid mer frekvent användning rekommenderas att växla mellan två nebulisatorer. Vid kontinuerlig drift håller nebulisatorn 7 dagar.	
T-stycke En förpackning innehåller 10 st Byts samtidigt som nebulisatorn S-39578 passar slangsystem 15M, 15F (Barn) S-40400 passar slangsystem 22M, 22F (Vuxen)	

TIDIGARE SORTIMENT

Inhalator Albatross



S-10882 Utgående artikel, går att förskriva i mån av tillgång

Leverantör	Infucare	
Kokningsbara delar	Ja	
Vikt	3,5 kg	
Rekommenderad Fyllningsvolym	Max. ca 8 ml Min. 2 ml.	
Nebuliseringskapacitet	0,7 ml/min	
Restvolym ml	0,5 ml	
Inhalationslösningar	Inhalatorn kan användas med samtliga på marknaden förekommande inhalationslösningar. OBS! Då antibiotika ska inhaleras krävs även ett Aerosolfilter (S-11422).	
Årsförbrukningsset S-11627 Nebulisator S-11130 Filter		  S-11627 S-11130
Skorsten S-02139 Flexanslutning skorsten Obs, ej kokbar S-11421 Adapter aerosolfilter/skorsten		  S-11421 S-02139
Tracheo set S-32648 För spontanandning Ta bort pluggen i toppen av T-stycket För ventilatorberoende patienter Pluggen ska sitta i toppen på T-stycket		
Prematur & Spädbarns Mask S-08215 Mask Nr 0 Prematur S-08216 Mask Nr 1 Spädbarn S-02140 Adapter till mask stl 0 och 1 Masken är helt rund, inte formad för näsan. OBS! Denna mask har ingen utandningsventil och kan därför endast användas tillsammans med nebulisatorer som har utandningsventil.		  S-02140

<p>Barn & Vuxen Mask S-17786 Mask Nr 3 Barn S-11645 Mask Nr 4 Barn/Vuxen S-14922 Mask Nr 5 Vuxen</p> <p>Masken är formad för att passa över näsa och mun. OBS! Denna mask har ingen utandningsventil och kan därför endast användas tillsammans med nebulisatorer som har utandningsventil</p>	
<p>Aerosolfilter kit S-11422</p> <p>Detta tillbehör bör användas vid inhalation av antibiotika eller läkemedel, där det är viktigt att inget ska gå ut i den omgivande luft.</p> <p>Kitet innehåller filterbehållare, 5 st filter plus en adapter (S-11421). Varje filter räcker i 24 h.</p>	
<p>Förlängningsrör</p> <p>S-15982, 15 cm. För patienter som behöver inhalera liggande.</p>	
<p>Låsring för avtryckaren</p> <p>S-15290 Används för att ge ett kontinuerligt flöde.</p>	

Inhalator Inspiration Elite Dolema






S-18753 Utgått leverantör. Årsförbrukningsset kan beställas.

<p>Leverantör</p>	<p>Bröderna Berner AB</p>	
<p>Kokningsbara delar</p>	<p>Ja</p>	
<p>Rekommenderad Fyllningsvolym</p>	<p>2-8 ml</p>	
<p>Restvolym ml</p>	<p><0,5 ml</p>	
<p>Inhalationslösningar</p>	<p>Samtliga på marknaden mest förekommande inhalationslösningar, utom antibiotika (det finns inget filter).</p>	
<p>Årsförbrukningsset S-32225 Innehåller nebulisator, munstycke, barnmask, vuxenmask, slang och 4 st filter</p>		

Inhalator InnoSpire Deluxe SideStream



S-38174 Utgått leverantör, gäller även tillbehör och reservdelar.

Vissa tillbehör finns fortfarande kvar på HMC

Leverantör	Medidyne	
Kokningsbara delar	Ja	
Vikt	2,2 kg	
Rekommenderad Fyllningsvolym	Max. 10 ml Min. ca 2 ml	
Nebuliseringskapacitet	Ca 0,6 ml/min	
Restvolym ml	Ca 0,4 ml	
Inhalationslösningar	<p>Inhalatorn kan användas med samtliga på marknaden förekommande inhalationslösningar.</p> <p>OBS! Då antibiotika ska inhaleras krävs nebulisator SideStream Plus (S-38176) och aerosol/utandningsfilter-kit (S-38175), med det täta munstycket alt. förskrivs tät mask.</p>	
<p>Årsförbrukningsset</p> <p>S-38176 Årsförpackning Inspiration Plus SideStream Denna årsförpackning ska användas om patienten ska inhalera antibiotika Ingår 1 st Sidestream Plus-nebulisator, munstycke, slang. Mask och filter ingår inte, beställs separat</p> <p>S-38178 Årsförpackning Deluxe SideStream Ingår 1 st Sidestream-nebulisator, munstycke, barnmask, vuxenmask och slang. Filter ingår inte, beställs separat</p>		 <p>S-38176</p> <p>S-38178</p>
<p>Aerosolmask</p> <p>S-38181 Aerosolmask, vuxen S-38182 Aerosolmask, barn</p>		 <p>S-38181 S-38182</p>
<p>Tillbehör till antibiotikainhalaton</p> <p>S-38175 Aerosolfilter kit (hållare) S-41659 Extra filter</p> <p>Detta tillbehör bör användas vid inhalation av antibiotika eller läkemedel där det är viktigt att inget ska gå ut i den omgivande luften.</p> <p>Kitet innehåller hållare, slutet munstycke och 10 st filterdukar. Filter till ventilen byts efter varje inhalation.</p>		
<p>Filter kompressor</p> <p>S-38180 ingår 4 st filter – bytes var 3e månad.</p>		

Inhalator Aeroneb Go

S-18755 Utgått leverantör, gäller även tillbehör och reservdelar. HMC har inga tillbehör kvar.

Leverantör	Bröderna Berner AB	
Kokningsbara delar	Ja	
Vikt	60 g (260 g med styrningsmodul och batterier)	
Max drifttid	ca 3 timmar från en ny uppsättning engångsbatterier.	
Rekommenderad Fyllningsvolym	Max. ca 10 ml/min. ca 1 ml.	
Nebuliseringskapacitet	Ca 0,35 ml/min	
Restvolym ml	Ca 0,2 ml	
Inhalationslösningar	Samtliga, på marknaden, mest förekommande inhalationslösningar, utom antibiotika (det finns inget filter)	
Årsförbrukningsset S-32227 Årsförpackningen innehåller nebulisator, 2 munstycken och batterikabel/nebulisatorkabel (för anslutning mellan nebulisator och batterienhet)		

Inhalator Pari Boy Mobil S

S-16693 Utgått leverantör. Årsförbrukningsset kan beställas.

Leverantör	Mediplast	
Kokningsbara delar	Ja	
Vikt	520 g	
Max drifttid	50 minuter	
Rekommenderad Fyllningsvolym	2-8 ml	
Restvolym ml	<0,5 ml	
Inhalationslösningar	Samtliga på marknaden mest förekommande inhalationslösningar, utom antibiotika (det finns inget filter).	
Årsförbrukningsset S-16616 Årssetet innehåller nebulisator PARI LC Sprint, munstycke, slang och filter till inhalatorn		