

Produktinformation

Slemsugar



hjälpmedelskonsulent

Helena Lagerbäck, telefon: 021-17 44 63

E-post: helena.lagerback@regionvastmanland.se

John Franzén, telefon: 021-17 46 43

E-post: john.franzen@regionvastmanland.se

Våren 2019

FÖRSKRIVNINGSGREGLER

Hjälpmedelsnivåer

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekviritions-hjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda, griptång och sängklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

Allmänna förskrivningsregler

Artikel	Kriterier/utprovningrutin	Kommentarer
Slamsug Clario	Förskrivning sker av alla läkare i Västmanland.	Går att lägga i websesam
Slamsug Vario	Förskrivning sker av alla läkare i Västmanland. Fysioterapeut eller sjuksköterska kan prova ut apparat	Kräver kontakt med Konsulent.

SLEMSUGAR

Slemsugar förskrivs till patient med svår nedsättning av funktioner för att transportera slem i övre och nedre luftvägarna. Förskrivaren ansvarar för att instruktion ges till patient kring hantering av apparaten och rengöringsinstruktioner. Rengöringsinstruktioner för de olika inhalatorerna finns på vårdgivarwebben under fliken Slemsugar.


OBS! Viktigt att låta apparaten gå på tomgång så att batteriet får ladda ur sig helt minst 1 gång i månaden. Detta för att batteriet ska fungera korrekt.

Portabel slemsug

Clario

S – 14131, Upphandlad

Ingår: 2 st 0,5 L behållare, 1 st 1,5 m slang samt transportväska.

Leverantör:	Medela	
Kapacitet:	15 L/min	
Vikt:	1,7 kg	
Max drifttid batteri:	50 min	
Behållare:	0,5 L	
Ljud volym:	64,3 decibel	
Vakuuminställning:	Har 3 steg/inställningar min. -18 kPa – 135 mmHg med. -36 kPa – 270 mmHg max. -80 kPa – 600 mmHg	

Tillbehör Clario

Slang: S-40272 Rekommenderat att bytas 1 gång i veckan.	
Behållare: S-14136 Innehåller Flaska, Lock, Flottör	

<p>Anslutningskabel för 12 V</p> <p>S- 14133</p>	
<p>Sugkateter</p> <p>Tillhandahålls från behandlande klinik.</p> <p>Byts efter varje användning.</p>	

Stationär slemsug

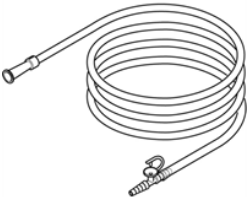
Vario


S – 09816, Ej upphandlad. Välj Clario sugen i förstahand.

Ingår: 1 st 1 L behållare, 1 st 1,8 m slang, 5 st bakteriefilter.

Leverantör:	Medela	
Kapacitet:	18 L/min	
Vikt:	4,2 kg	
Max drifttid batteri:	30 min	
Behållare:	1 L	
Ljud volym:	52 decibel	
Vakuuminställning:	Steglös inställning. –75 kPa–563 mmHg	

Tillbehör Vario

<p>Slang:</p> <p>S-40273</p> <p>Rekommenderat att bytas 1 gång i veckan.</p>	
---	--

<p>Behållare:</p> <p>S-10341</p> <p>Innehåller 1 st 1 L behållare & 1 st 1,8 m slang</p>	
<p>Bakterie Filter:</p> <p>S-11236</p> <p>Rekommenderat att bytas 1 gång i veckan.</p>	
<p>Anslutningskabel för 12 V</p> <p>S-08326</p>	
<p>Sugkateter</p> <p>Tillhandahålls från behandlande klinik.</p> <p>Byts efter varje användning.</p>	